



9120-9120R

Ayudas de baño

MANUAL DE USUARIO

Ref. BSDPAL9120

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva **silla de ducha 9120 y 9120R**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes	4
2 – Descripción	4
3 – Características técnicas	5
4 – Instalación y uso	6
5 – Mantenimiento y limpieza	6
6 – Garantía	7

1. PARTES DE LA SILLA 9120



2. DESCRIPCIÓN DE LA SILLA 9120 Y 9120R

SILLA DE DUCHA CON AGARRES

La **9120** es una silla de ducha con respaldo. Con dos agarres laterales tanto en el respaldo como en el asiento para facilitar el posicionamiento del usuario. Proporciona al usuario un máximo confort y seguridad a la hora de ducharse. Además, las conteras antideslizantes la convierten en una silla segura.

SILLA DE DUCHA CON AGARRES REFORZADA

La **9120R** es una silla de ducha con respaldo. Con dos agarres laterales tanto en el respaldo como en el asiento para facilitar el posicionamiento del usuario. Proporciona al usuario un máximo confort y seguridad a la hora de ducharse. Además, las conteras antideslizantes la convierten en una silla segura..

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



9120



9120R

Medidas	9120	9120R
Ancho total	51 cm	51 cm
Profundidad total	49,5 cm	49,5 cm
Alto total (regulable en altura · 5 niveles)	75,5 - 85,5 cm	75,5 - 85,5 cm
Alto del asiento al suelo	35 - 45 cm	35 - 45 cm
Ancho del asiento	51 cm	51 cm
Profundidad del asiento	30 cm	30 cm
Ancho del respaldo	50,5 cm	50,5 cm
Alto del respaldo	30 cm	30 cm

Peso	9120	9120R
Peso total	3 kg	3 kg
Peso máximo soportado	100 kg	136 kg

Material Plástico y aluminio

Color Azul y blanco

4. INSTALACIÓN Y USO DE LA SILLA 9120 Y 9120R



- Antes de comenzar con el montaje, revise que tiene todas las piezas para realizar el montaje correctamente. **1**
- Coloque la base de la silla boca abajo, colocar las patas de manera de cruz, la pata con hundido central va la primera y después va la pata más gruesa de alto en el centro, en último lugar. **2**
- Primero, deberá de coger la pieza con forma de L y ver que los agujeros encajen correctamente. Haga el mismo paso una vez más pero en el lado opuesto. **3**
- Después, coloque los siguientes tornillos haciéndolos girar, como ya a hecho anteriormente, Haga lo mismo en los cuatro agujeros visibles. **4**
- Ponga primero el tubo de aluminio y después coloque los embellecedores para justar la altura de su silla. **5**

9120R

- Coloque las dos barras de aluminio y que hagan forma de cruz. Ajuste las barras a los extremos de la silla y coloque los tornillos y las arandelas. **6**

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Por favor, compruebe si todas las piezas están bien ajustadas antes de usarlas.
- Sugerimos estar acompañado de un asistente.
- No lo use en una rampa. Tenga cuidado cuando lo use en un lugar resbaladizo .
- Mantenga la misma altura de los 4 tubos cuando se ajuste.
- Las ventosas de las patas son de plástico. Por favor, cambiar cuando estén gastadas.
- Transporte: Este producto necesita ser almacenado en un ambiente seco, estable, no corrosivo y lejos de la lluvia.
- Limpie el producto con un paño suave y seco.
- Desechar el producto según las normativas medioambientales locales
- Partes vulnerables: las ventosas.

ATENCIÓN: Cuidado cuando lo use si los miembros inferiores del usuario estan impedidos.

6. GARANTÍA DE LA SILLA 9120 Y 9120R

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.

Manual de usuario

Silla de ducha 9120 y 9120R

V3 · 22/04/2022