



# Mikostar

Silla manual infantil

## MANUAL DE USUARIO

Ref. SALMIKOSTAR550

más de 50 años viviendo sin límites

**!** Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DESDE TOTALCARE EUROPE

# LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva silla manual infantil **Mikostar**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

<b>1 – Partes de la silla.....</b>	<b>4</b>
<b>2 – Descripción del producto .....</b>	<b>4</b>
<b>3 – Características del producto .....</b>	<b>5</b>
<b>4 – Pautas generales .....</b>	<b>6</b>
<b>5 – Inspección de seguridad.....</b>	<b>9</b>
<b>7 – Garantía.....</b>	<b>11</b>

## 1. PARTES DE LA SILLA



## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La silla infantil **Mikostar** se adaptará al niño, proporcionándole movilidad y confort. Cuenta con un diseño divertido, moderno y funcional perfecto que cumplirá todas las expectativas, tanto la del niño como la de los padres.


### SILLA INFANTIL FUNCIONAL Y SEGURA

La silla infantil **Mikostar** es cómoda y ligera ya que su chasis está fabricado en aluminio. Es una silla que se pliega fácilmente para ser transportada allí donde se desee y acompañe al niño en todas sus aventuras. Trae reposabrazos abatibles y reposapiés fijos graduables en altura de serie. Además, también cuenta con un chaleco de seguridad de serie.

### ACOMPañARÁ AL NIÑO EN TODAS SUS AVENTURAS

Gracias a su ligereza y su plegado fácil, la silla **Mikostar** puede meterse en el maletero fácilmente. Por otro lado, las ruedas traseras disponen de sistema Quick Release para su fácil extracción. También cuenta con ruedas antivuelco para mejorar la estabilidad de la silla.

### 3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

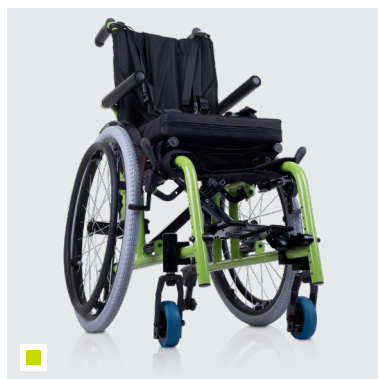

#### INFORMACIÓN GENERAL

##### Medidas

Ancho total	47 cm
Profundidad total	80 cm
Alto total	84 cm
Alto del asiento al suelo sin cojín	45 cm
Alto del asiento al suelo con cojín	51 cm

##### Peso

Peso total	14,5 kg
Peso máximo soportado	75 kg

Material	Aluminio
----------	----------

Color	Verde
-------	-------

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### Asiento

Ancho del asiento	29 cm
Profundidad del asiento	30 cm
Tipo de asiento	Fijo

##### Reposabrazos

Largo del reposabrazos	28 cm
Ancho del reposabrazos	4 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles

##### Reposapiés

Profundidad del reposapiés	28 cm
Tipo de reposapiés	Fijos graduables en altura

##### Respaldo

Ancho del respaldo	30 cm
Alto del respaldo	33 cm
Tipo de respaldo	Fijo

##### Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 10 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 50 cm
Tipo de ruedas delanteras	Macizas
Tipo de ruedas traseras	Hincables

##### Otras características

Tipo de freno	Freno bloqueo
Tipo de plegado	Cruceta simple con 4 estabilizadores
Ruedas antivuelco	Sí
Chaleco seguridad	Sí



Ruedas antivuelco



Reposapiés fijos regulables en altura

## 4. PAUTAS GENERALES

### 4.1 ESTABILIDAD

La posición de las ruedas delanteras, la posición de las ruedas traseras, así como la condición del usuario se relacionan directamente con la estabilidad de la silla de ruedas.

Cualquier cambio en uno o cualquier combinación de los tres puede hacer que la silla de ruedas disminuya su estabilidad. Estos ajustes DEBEN ser realizados por un técnico cualificado.

### 4.2 INFORMACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

**Todas las advertencias y precauciones en este manual deben seguirse a menos que se indique lo contrario.**

- **NO** utilice, **SUBE** o **BAJE** rampas o pendientes de más de 10 grados.
- **NO** opere en carreteras, calles o autopistas.
- **NO** intente subir o bajar una pendiente con una película de agua, hielo o aceite.
- **NO** intente andar sobre bordillos u obstáculos. Si lo hace, su silla de ruedas podría volcarse y causarle daños corporales o daños a la silla de ruedas.
- **NO** se ponga de pie en el marco de la silla de ruedas.
- **NO** use el reposapiés como plataforma. Al subir o bajar de la silla de ruedas, asegúrese de que la plataforma del reposapiés esté hacia arriba.
- **SIEMPRE** use los aros de mano para la autopropulsión. **NO** agarre las ruedas traseras por sí mismas.
- **NO** use piezas, accesorios o adaptadores que no sean los autorizados por el fabricante.
- La temperatura de la superficie de las sillas de ruedas puede aumentar si están expuestas a fuentes externas de calor (por ejemplo, luz solar).

### 4.3 LIMITACIÓN DE PESO

La silla de ruedas de la serie tiene una limitación de peso de 100 kg.

### 4.4 SEGURIDAD Y MANEJO

La seguridad y el manejo de la silla de ruedas requieren la atención cuidadosa del usuario de la silla de ruedas y del asistente. Este manual señala los procedimientos y técnicas más comunes involucrados en la operación segura y el mantenimiento de la silla de ruedas. Es importante practicar y dominar estas técnicas seguras hasta que se sienta cómodo maniobrando alrededor de las barreras arquitectónicas que se encuentran con frecuencia.

Use esta información solo como guía básica. Las técnicas que se analizan en las siguientes páginas han sido utilizadas con éxito por muchos usuarios. Los usuarios individuales de sillas de ruedas a menudo desarrollan habilidades para lidiar con las actividades de la vida diaria que pueden diferir de las descritas en este manual. **TotalCare Europe** reconoce y alienta a cada individuo a intentar lo que funciona mejor para superar los obstáculos arquitectónicos que puedan encontrar, sin embargo **TODAS LAS ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES** dadas en este manual **DEBEN** ser seguidas. Las técnicas en este manual son un punto de partida para el nuevo usuario y asistente de silla de ruedas, y la seguridad es la consideración más importante para todos.

### 4.5 ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO

Para garantizar la estabilidad y el funcionamiento adecuado de la silla de ruedas, debe mantener en todo momento el equilibrio adecuado. Su silla de ruedas ha sido diseñada para mantenerse erguida y estable durante las actividades diarias normales siempre que no se mueva más allá del centro de gravedad.

Prácticamente todas las actividades que implican movimiento en la silla de ruedas tienen un efecto en el centro de gravedad. Se recomienda usar correas de posicionamiento del asiento / para mayor seguridad mientras participa en actividades que cambian su peso.

**NO** se incline hacia afuera de la silla de ruedas más allá de la longitud de los reposabrazos. Asegúrese de que las ruedas estén apuntando hacia adelante cada vez que se incline hacia adelante. Esto se puede lograr haciendo avanzar la silla de ruedas y luego invirtiéndola en línea recta.

## 4.6 LIDIANDO CON LOS OBSTÁCULOS COTIDIANOS

Hacer frente a la irritación de los obstáculos cotidianos se puede aliviar un poco aprendiendo a manejar su silla de ruedas. Tenga en cuenta su centro de gravedad para mantener la estabilidad y el equilibrio.

## UNA NOTA PARA ASISTENTES DE SILLAS DE RUEDAS

Cuando se requiera asistencia para el usuario de silla de ruedas, recuerde utilizar una buena mecánica corporal. Mantenga la espalda recta y doble las rodillas siempre que incline la silla de ruedas o cruce bordillos u otros impedimentos. Cuando aprenda una nueva técnica de asistencia, pídale a un asistente experimentado que lo ayude antes de intentarlo solo.

NO intente levantar la silla de ruedas por ninguna parte removible (desmontable). Levantar por medio de cualquier parte extraíble (desmontable) de una silla de ruedas puede provocar lesiones al usuario o daños a la silla de ruedas. Siempre verifique que las empuñaduras en el bastón trasero estén seguras ANTES de usar cuando se usa un asistente para propulsar o levantar la silla. Verifique si hay signos de aflojamiento o deterioro y, si lo encuentra, comuníquese con un técnico calificado. NO intente mover la silla de ruedas tirando de las empuñaduras si se encuentran inseguras o deterioradas.

## 4.7 PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE PESO

### ADVERTENCIA

Para determinar y establecer sus límites de seguridad particulares, practique las actividades de doblar, alcanzar y transferir en varias combinaciones en presencia de un profesional de la salud calificado ANTES de intentar el uso activo de la silla de ruedas.

Muchas actividades requieren que el propietario de la silla de ruedas se estire, doble y se transfiera dentro y fuera de la silla de ruedas. Estos movimientos provocarán un cambio en el equilibrio normal, el centro de gravedad y la distribución del peso de la silla de ruedas.

La posición adecuada es esencial para su seguridad. Al alcanzar, inclinarse o inclinarse hacia adelante, es importante usar las ruedas delanteras como herramienta para mantener la estabilidad y el equilibrio.

## 4.8 ALCANZAR, INCLINARSE Y DOBLARSE HACIA ADELANTE

### ADVERTENCIA

**NO** intente alcanzar objetos si tiene que moverse hacia adelante en el asiento o levantarlos del suelo al agacharse entre las rodillas.

Coloque las ruedas delanteras de modo que estén extendidas lo más adelante posible y active los bloqueos de las ruedas.



## 4.9 ALCANZAR, INCLINARSE HACIA ATRÁS

**ADVERTENCIA. NO** se incline sobre la parte superior de la tapicería del respaldo. Esto cambiará su centro de gravedad y puede hacer que se vuelque.



Coloque la silla de ruedas lo más cerca posible del objeto deseado. Apunte las ruedas delanteras hacia adelante para crear la distancia entre ejes más larga posible. Alcance hacia atrás solo hasta que su brazo se extienda sin cambiar su posición de sentado.

## 4.10 INCLINANDO BORDILLOS

Coloque el pie en el tubo de paso y comience a inclinar la silla de ruedas hacia usted. Aplique un movimiento continuo hacia abajo hasta alcanzar el punto de equilibrio y las ruedas delanteras despejen el bordillo. En este punto, el asistente sentirá una diferencia en la distribución del peso.

### ADVERTENCIA

Al bajar las ruedas delanteras de la silla de ruedas, hágalo con cuidado y suavemente. Esto podría provocar lesiones al ocupante y / o daños a la silla de ruedas.

Gire la silla de ruedas hacia adelante y baje lentamente la parte delantera de la silla de ruedas en un movimiento continuo hacia la acera. No permita que la silla de ruedas caiga los últimos centímetros al suelo. Esto podría provocar lesiones al ocupante. Empuje la silla de ruedas hacia adelante hasta que las ruedas traseras rueden hacia arriba y sobre la acera.

### ADVERTENCIA: ESCALADORES

**NO** use una escalera mecánica para mover una silla de ruedas entre pisos. Se pueden producir lesiones corporales graves.

## 4.11 TRANSFERENCIAS

### ADVERTENCIA

ANTES de intentar entrar o salir de la silla de ruedas, se deben tomar todas las precauciones para reducir la distancia de separación. Gire ambas ruedas paralelas al objeto al que está transfiriendo. También asegúrese de que los seguros de las ruedas estén activados para ayudar a evitar que las ruedas se muevan.

### PRECAUCIÓN

Al realizar la transferencia, colóquese lo más atrás posible en el asiento. Esto ayudará a evitar tornillos rotos, tapizados dañados y la posibilidad de que la silla de ruedas se incline hacia adelante.

**NOTA:** Esta actividad se puede realizar de forma independiente siempre que tenga la movilidad adecuada y la fuerza de la parte superior del cuerpo. Coloque la silla de ruedas lo más cerca posible del costado del asiento al que está transfiriendo, con las ruedas delanteras apuntando en paralelo.

Retire o levante el reposabrazos. Enganche las cerraduras de las ruedas. Cambie el peso del cuerpo al asiento con transferencia. Durante el traslado independiente, habrá poca o ninguna plataforma de asiento debajo de usted. Use una tabla de transferencia si es posible.

## 4.12 DESPLEGAR Y PLEGAR LA SILLA DE RUEDAS

### ADVERTENCIA

Mantenga las manos y los dedos alejados de las partes móviles para evitar lesiones.

NO se siente ni transfiera a la silla de ruedas a menos que esté completamente abierta. Asegúrese de que los rieles del marco del asiento estén completamente asentados en los bloques de soporte del marco lateral antes de sentarse o transferirse a la silla de ruedas.

## DESPLIEGUE

1. Abra la silla de ruedas agarrando el bastón trasero de la silla de ruedas más cercano a usted.
2. Empuje hacia abajo en la PARTE SUPERIOR del riel del asiento más cercano a usted donde está unida la tapicería del asiento hasta que la silla de ruedas esté completamente abierta.
3. Enganche la plataforma de los reposapiés una vez el usuario ya está sentado.

## PLEGABLE

1. Levante la plataforma del reposapiés.
2. Con ambas manos, tome el centro de la tapicería del asiento en el borde delantero y trasero y levántelo.


Plataforma reposapiés regulable en altura, plataforma deslizante abatible y deslizante

Asiento y respaldo ajustable con tensores

Reposabrazos abatibles y regulables en altura



## 5. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

 **La silla de ruedas no está certificada por el crash test, por lo que no puede ser utilizada para el transporte en vehículos adaptados.**

**NOTA:** Cada seis (6) meses o, según sea necesario, lleve su silla de ruedas a un técnico calificado para una inspección y servicio exhaustivos. La limpieza regular revelará partes sueltas o desgastadas y mejorará el buen funcionamiento de su silla de ruedas. Para operar de manera adecuada y segura, su silla de ruedas debe ser cuidada como cualquier otro vehículo. La Rutina de un mantenimiento extenderá la vida útil y la eficiencia de su silla de ruedas.

### 5.1 MANTENIMIENTO PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD

#### ADVERTENCIA

A menos que se indique lo contrario, todos los ajustes de servicio deben realizarse mientras la silla de ruedas está desocupada.

Después de cualquier ajuste, reparación o servicio y antes de su uso, asegúrese de que todo los accesorios están bien apretado; de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños.

Cuando limpie el bastón trasero o las áreas de agarrar manual, use solo una toalla limpia ligeramente humedecida con agua fría. Verifique que las empuñaduras estén secas antes de usar. **NO** use jabón ni soluciones de limpieza a base de amoníaco; de lo contrario, las empuñaduras se deslizarán del conjunto del bastón. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar lesiones al usuario.

El usuario debe verificar las funciones enumeradas en el siguiente texto en los intervalos indicados. El incumplimiento de estas verificaciones simples puede ocasionar problemas que podrían invalidar la garantía.

Verificación requerida antes de comenzar, mensualmente o trimestralmente:

1. Presión de aire (impresa en la pared lateral del neumático) - **Mensual**
2. Examen visual de piezas de desgaste (por ejemplo, neumáticos, rodamientos) - **Mensual**
3. Caída del tapizado del asiento y del respaldo.

#### Mensual

4. Comprobación de las conexiones por tornillo. **Trimestral**
5. Altura del respaldo - **Mensual**
6. Prueba de funcionamiento de los bloqueos de las ruedas. - **Antes de comenzar**
7. Mecanismo plegable por desgaste. - **Trimestral**
8. Contaminación en rodamientos. - **Mensual**
9. Comprobación de la configuración del cojinete del diario de la rueda. - **Mensual**
10. Comprobación de la tensión de los radios de las ruedas traseras. - **Mensual**

**NO apriete demasiado los herrajes que se unen al marco. Esto podría dañar el tubo del marco.**

### 5.2 LIMPIEZA

Para limpiar su silla de ruedas, use un detergente suave y un paño suave. Ciertos componentes pueden ser mantenidos fácilmente por usted mismo para garantizar el buen funcionamiento de su silla de ruedas:

1. El cabello y / o partículas de suciedad pueden acumularse entre la rueda giratoria y la horquilla, esto puede restringir la rotación suave de las ruedas giratorias. Limpie a fondo entre la horquilla y las ruedas / eje con un paño suave y, si es necesario, un detergente suave.
2. Las ruedas traseras y las ruedas giratorias se pueden suministrar como un sistema de eje de liberación rápida. Para mantener este sistema operativo, asegúrese de que no se adhiera suciedad / arena al eje de liberación rápida o al alojamiento del eje. Lubrique ligeramente el eje de liberación rápida regularmente con aceite de máquina de coser sin resina.
3. Si su silla de ruedas se moja, séquela con toalla lo antes posible.
4. **NO** use su silla de ruedas en agua ya que puede causar corrosión y dañar los cojinetes de las ruedas.
5. Compruebe regularmente la estanqueidad de todas las conexiones de tornillo. Si alguna conexión de tornillo persiste en aflojarse, consulte a su distribuidor autorizado inmediatamente.

## 7. GARANTÍA

### DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

### ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto está defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

### LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

## SILLA INFANTIL MIKOSTAR

La silla infantil **Mikostar** se adaptará al niño, proporcionándole movilidad y confort. Cuenta con un diseño divertido, moderno y funcional perfecto que cumplirá todas las expectativas, tanto la del niño como la de los padres.



## Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.



Producto sanitario conforme con el MDR.

## Manual de usuario

Silla de ruedas manual infantil Mikostar

V3 · 29/04/2022