



Andador
4080

Andador
4060

4030 · 4060 · 4080

Andadores paso a paso

MANUAL DE USUARIO

Ref. AAL4030C - AAL4060P - AAL4080C

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM by TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo andador **4030, 4060 y 4080**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes de su andador	4
2 – Descripción de su andador.....	4
3 – Características técnicas	5
4 – Uso de su andador.....	6
5 – Mantenimiento y limpieza	6
6 – Garantía	7

1. PARTES DE SU ANDADOR



2. DESCRIPCIÓN DE SU ANDADOR

ANDADORES PARA EXTERIOR E INTERIOR

ANDADOR PASO A PASO RECÍPROCO Y PLEGABLE SIN ASIENTO

El andador recíproco **4030** es plegable y muy ligero, fabricado en aluminio, sin ruedas y con tacos. Permite avanzar paso a paso, gracias al movimiento articulado de los arcos laterales del caminador, junto al movimiento de sus pies, sin la necesidad de levantar el peso del caminador.

ANDADOR PASO A PASO FIJO Y RECÍPROCO PLEGABLE SIN ASIENTO

El andador fijo-recíproco **4060** se caracteriza por ofrecer al usuario su uso como andador fijo y la posibilidad de cambiar a recíproco (en un solo click).

ANDADOR PASO A PASO FIJO y PLEGABLE

El andador de aluminio **4080** se caracteriza por ser plegable y fijo. Permite realizar la acción de levantar los extremos al dar el paso a paso, permitiéndole superar obstáculos como bordillos. Su fácil sistema de plegado lo hace muy fácil de transportar y permite ahorrar espacio al guardarlo. Está disponible en color cobre. Sus empuñaduras, para mayor comodidad, están recubiertas de neopreno.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



4030



4060



4080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas	4030	4060	4080
Ancho total	57,5 cm	56 cm	57 cm
Ancho entre ruedas traseras	47,5 cm	48,5 cm	50 cm
Profundidad total	47 cm	54,5 cm	45 cm
Profundidad plegado	9 cm	9,5 cm	9,5 cm
Alto total (regulable)	77 - 94,5 cm	78 - 88 cm	75,5 - 93,5 cm

Peso	4030	4060	4080
Peso total	2,45 kg	2,40 kg	2,20 kg
Peso máximo soportado	100 kg	100 kg	100 kg

Material	Aluminio	Color	Cobre y Plata
----------	----------	-------	---------------

Otras características	4030	4060	4080
Plegable	Sí	Sí	Sí
Material empuñaduras	Neopreno	Goma	Neopreno

4. USO DE SU ANDADOR



- Para plegar su andador, presione en el botón de plegado y a continuación pliegue su andador. **1**
- Para dejar fijo su andador, deberá coger el embellecedor. Para extraerlo, coloque su dedo hacia abajo y ejerza presión. Esta opción únicamente es aplicable en el andador 4060. **2**
- Coloque los fijadores igual como se muestra en la imagen, así logrando fijar el plegado. **3**
- Para regular la altura de los tubos, deberá de presionar en la bola de aluminio y subir o bajar, dependiendo de como desee. **4**

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Hacer un mantenimiento regular al andador.
- Limpie el chasis con un paño húmedo para quitar la suciedad.
- Guarde el andador en el interior de su hogar por la noche. No lo exponga a aire salado o ambientes hostiles. Si lo expone, comprobar los daños y limpiarlo antes de utilizarlo.
- Semanalmente comprobar las ruedas, si giran correctamente, si no tienen pelusas o algo que afecte a su funcionamiento.
- El chasis que no esté dañado, que no tenga grietas, ni este desoldado en algún lugar. Que los frenos funcionen de forma optima. En caso contrario llegar al servicio técnico para su ajuste.

6. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Andadores paso a paso 4030 · 4060 · 4080

V3 · 08/04/2022