



4100

Ayudas de baño

MANUAL DE USUARIO

Ref. BBDPAL4100FG

más de **50 años** viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva **andador inodoro de baño 4100**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.


más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes	4
2 – Descripción	4
3 – Características técnicas	5
4 – Instalación y uso	6
5 – Mantenimiento y limpieza.....	6
6 – Garantía.....	7

1. PARTES DEL INODORO 4100

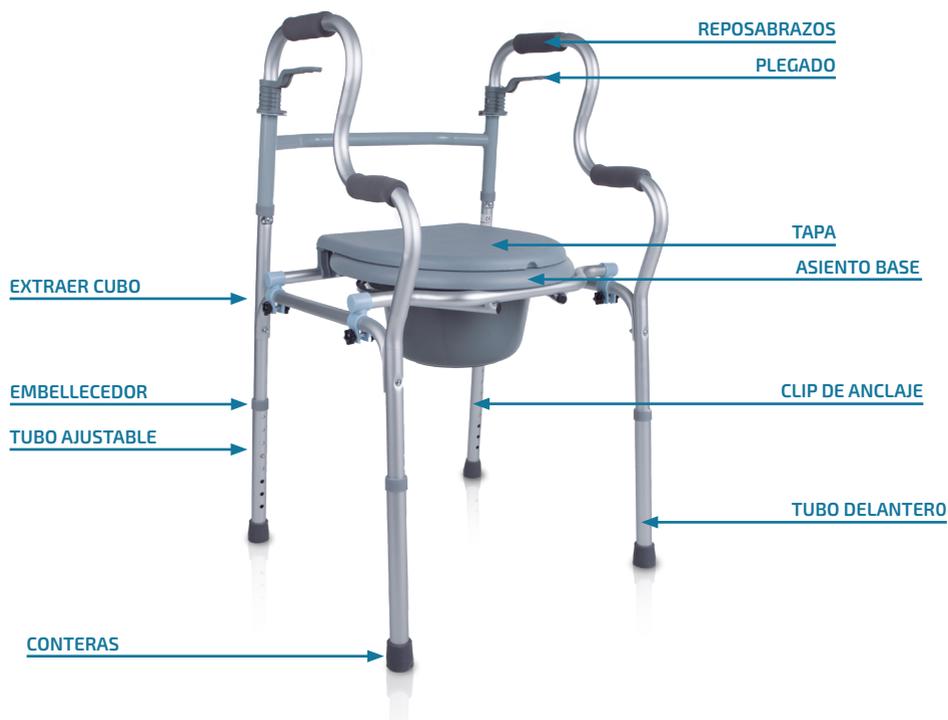

2. DESCRIPCIÓN DEL INODORO 4100

ANDADOR Y SILLA INODORO

La ayuda de baño 4100 es un andador inodoro en uno que ofrece al usuario comodidad y seguridad a la hora de ir al baño. Cuenta con cuatro agarres ergonómicos y una cubeta

extraíble. Por otro lado, las conteras antideslizantes proporcionarán al usuario estabilidad y protección a la hora de usarlo.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



4100

Medidas

Ancho total	55 cm
Profundidad total	53 cm
Alto total (regulable en altura · 8 niveles)	64 - 82 cm
Alto del asiento al suelo	47 - 65 cm
Ancho del asiento	39 cm
Profundidad del asiento	40 cm
Ancho del respaldo	46 cm
Ancho abertura para la cubeta	22 cm
Profundidad abertura para la cubeta	25 cm

Peso

Peso total	4,40 kg
Peso sin la cubeta	4,10 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Material	Plástico y aluminio	Color	Gris
-----------------	---------------------	--------------	------

4. INSTALACIÓN Y USO DEL INODORO 4100



- Para abrir su silla inodoro, coloque las manos en la misma posición que se muestra en la imagen y haga un ligero movimiento hacia arriba con las ambas manos colocadas en las dos manetas. **1**
- Coloque su cubo en la base del su silla inodoro tal cual se muestra en la imagen, repita este paso 3 veces más. **2**
- Deberá de colocar unos tornillos haciendo rosca y colocar una arandela haciendo rosca con las manos, repita este paso 3 veces más. En último lugar, ponga los tubos en los pies de su silla inodoro y después coloque el embellecedor para fijar la altura de su silla. **3**

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Por favor, compruebe si todas las piezas están bien ajustadas antes de usarlas.
- Sugerimos estar acompañado de un asistente.
- No lo use en una rampa. Tenga cuidado cuando lo use en un lugar resbaladizo.
- Mantenga la misma altura de los 4 tubos cuando se ajuste.
- Transporte: Este producto necesita ser almacenado en un ambiente seco, estable, no corrosivo y lejos de la lluvia.
- Limpie el producto con un paño suave y seco.
- Desechar el producto según las normativas medioambientales locales

ATENCIÓN: Cuidado cuando lo use si los miembros inferiores del usuario están impedidos.

6. GARANTÍA DEL INODORO 4100

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto está defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirió el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.

Manual de usuario

Andador inodoro de baño 4100

V4 · 22/04/2022