



My Bath

Ayudas de baño

MANUAL DE USUARIO

Ref. BSDPACIMYBATHGB

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo **asiento para la bañera My Bath**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.


más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes y montaje	4
2 – Descripción	5
3 – Características técnicas	5
4 – Mantenimiento y limpieza	5
5 – Uso y particularidades	6
6 – Características técnicas	6
7 – Garantía.....	7

1. PARTES Y MONTAJE

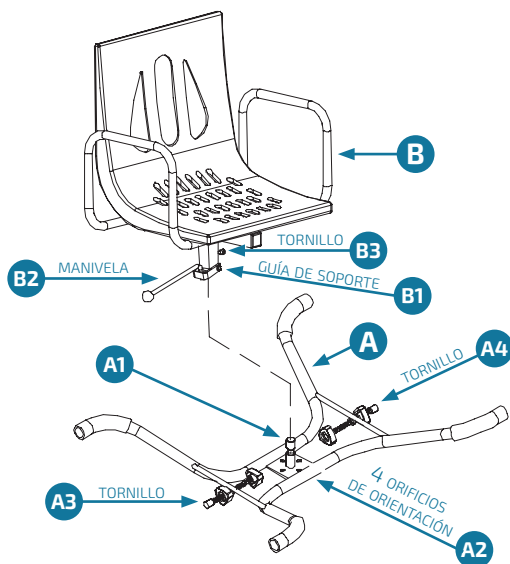

1. Coloque la base (ver fotografía A) en la bañera. Las 4 patas deben estar firmemente posicionadas dentro de la bañera. Los ajustes PVC deben estar en posición correcta para prevenir deslizarse.

2. Una vez que la base haya sido colocada en su lugar, los tornillos de acero inoxidable (ver figura A3 y A4) deben ser atornillados en ambos lados contra la pared interna de la bañera, para prevenir el movimiento de la base.

3. Todo el asiento (ver figura B) debe ser fijado dentro de la base desde la tapa usando atornillador (B3). El agujero (B1) de la base del asiento debe estar alineada con el eje central de la base (A1). El asiento debe ser instalado cuidadosamente, este seguro de que el eje central ha entrado correctamente dentro del agujero de la guía de soporte. La manivela (B2) debe ser colocada correctamente en los 4 agujeros guía (A2), de otra manera cuando el paciente se siente toda la silla podría volcarse hacia alguno de los lados, lo cual podría causar lesiones al paciente,

4. Cuando el paciente este usando el asiento, no puede entrar a la bañera directamente. El asiento debe girarse alrededor de un ángulo de 90 grados con el asiento mirando hacia afuera, Al mismo tiempo, debe de asegurarse que las agarradera de seguridad están posicionadas correctamente en los agujeros.

El paciente entonces puede apoyarse de las agarraderas y sentarse. Cuando el paciente se haya posicionado en el asiento, entonces puede girar la silla despacio en un ángulo de 90 grados (Los pies del Paciente deben estar levantados),

Las agarraderas de seguridad deben estar en la posición correcta, esto debe hacerse con cuidado, de otra manera toda la silla y el paciente tenderían a irse alguno de los lados,

Después que el paciente ha terminado su baño, se le dificulta levantarse y debe ser ayudado a salir de la bañera directamente, el asiento puede girarse alrededor con el paciente aun sentado en el. Las agarraderas de seguridad deben ser levantadas.

El asiento puede entonces girarse 90 grados antes de poner las agarraderas de seguridad hacia abajo en la posición correcta. El paciente entonces puede ser ayudado a salir del baño. Cuando se este girando el paciente, recuerde mover el asiento despacio y hacer seguro que los pies del paciente estén levantados.

Sí el asiento es empujado muy fuerte, todo la base puede empezar a moverse y el paciente y el asiento pudieran caerse; esto pudiera causarle serias heridas al paciente. Cuando el paciente esta de pie, debe tomarse sumo cuidado que el asiento y la base estén estables. Las cuatro patas no deben moverse, de otra manera existe la posibilidad de que todo el asiento y el paciente se caigan con riesgo de herir al paciente.

5. Después de usar el asiento. El asiento debe ser girado volviendo a la posición original. Revisar que las agarraderas de seguridad están en la posición correcta, luego limpie el asiento para que pueda ser usado de nuevo.

2. DESCRIPCIÓN

La silla para la bañera **My Bath** permite que las personas mayores o con problemas de movilidad reducida puedan acceder cómodamente a la bañera para realizar su aseo personal,

sin necesidad de tener que realizar obras o instalación costosa. Esta ayuda de baño de acopla fácilmente a la bañera, sin necesidad de ningún ajuste mecánico.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MY BATH

Medidas

Ancho total	73 cm
Profundidad total	50,5 cm
Alto total	50 cm
Ancho del asiento	40 cm
Profundidad del asiento	33 cm
Ancho del respaldo	35 cm
Alto del respaldo	35 cm

Peso

Peso total	4,55 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Asiento	Giratorio	Material	Plástico y acero inoxidable	Color	Blanco
----------------	-----------	-----------------	-----------------------------	--------------	--------

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



DESPUÉS DE LA DUCHA SEQUE CON UN PAÑO TODAS LAS PARTES

- Hacer un mantenimiento regular de la silla de ducha.
- Limpie el chasis con un paño húmedo para quitar la suciedad.
- Guarde la silla en el interior de su hogar por la noche. No lo exponga a aire salado o ambientes hostiles. Si lo expone, comprobar los daños y limpiarlos antes de utilizarlo.
- Comprobar periódicamente que el chasis no esté dañado. En caso contrario llamar al servicio técnico para su ajuste.

5. USO Y PARTICULARIDADES

La silla para la bañera **My Bath** destaca por estar fabricada en acero inoxidable plastificado, para de este modo evitar que la corrosión pueda afectar a la estructura tras un continuo contacto con el agua. Se monta y se desmonta de forma rápida y sencilla, permitiendo además limpiarla y secarla sin esfuerzo para su correcto mantenimiento.

Ofrece la máxima seguridad a los usuarios, ya que cuenta con un recubrimiento de goma en cada una de sus patas, con el objetivo de impedir que se mueva mientras se está usando o que se puedan producir deslizamientos con el borde de la bañera.

6. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.

Manual de usuario

Silla de ducha My Bath

V3 · 22/04/2022