



9300

Ayudas de baño

MANUAL DE USUARIO

Ref. BSDPAL9300FB

más de **50 años** viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva **silla de ducha 9300**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes	4
2 – Descripción	4
3 – Mantenimiento y limpieza.....	4
4– Características técnicas	5
5 – Instalación y uso.....	6
6 – Garantía.....	7

1. PARTES DE LA SILLA 9300



2. DESCRIPCIÓN DE LA SILLA 9300

SILLA DE DUCHA CON ASIENTO HERRADURA

La banqueta de ducha con respaldo 9300 está pensada para facilitar la higiene personal de aquellas personas con problemas de movilidad reducida, pero que conservan cierta capacidad de movimiento y un cierto grado de estabilidad

a la hora de permanecer sentados. Destaca por su estructura de aluminio que evita los efectos de la corrosión que podría provocar su continuo contacto con el agua.

3. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA SILLA 9300

- Por favor, compruebe si todas las piezas están bien ajustadas antes de usarlas.
- Sugerimos estar acompañado de un asistente.
- No lo use en una rampa. Tenga cuidado cuando lo use en un lugar resbaladizo.
- Mantenga la misma altura de los 4 tubos cuando se ajuste.
- Se debe escuchar un "clic" cuando se instala el respaldo.
- Las ventosas de las patas son de plástico. Por favor, cambiar cuando estén gastadas.
- Transporte: Este producto necesita ser almacenado en un ambiente seco, estable, no corrosivo y lejos de la lluvia.
- Limpie el producto con un paño suave y seco.
- Desechar el producto según las normativas medioambientales locales

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA SILLA 9300

9300



Medidas

Ancho total	73 cm
Profundidad total	55 cm
Alto total (regulable en altura · 6 niveles)	79,5 - 89,5 cm
Alto del asiento al suelo	43 - 53 cm
Ancho del asiento	68 cm
Profundidad del asiento	41 cm
Ancho del respaldo	39 cm
Alto del respaldo	22,5 cm

Peso

Peso total	4,25 kg
Peso máximo soportado	100 kg

Material Plástico y aluminio

Color Blanco

5. INSTALACIÓN Y USO DE LA SILLA 9300



- Revise que estén todas las piezas antes de realizar el montaje de su silla de baño. **1**
- Primero, coja las tres plataformas blancas y póngalas en línea, una detrás de otra. Después, coloque las barras de aluminio, son las más largas de todas, colóquelo en ambos extremos. Ponga 6 tornillos, los más cortos. **2**
- Ahora, deberá de coger la pieza en forma de C, la que es más pequeña, ponga la pieza en ambos extremos. Después, deberá de colocar los tornillos más largos entre los agujeros visibles de la silla, el tornillo deberá de atravesar tanto las barras de aluminio como la pieza con forma de C y colocar la tuerca. **3**
- Así le tiene que quedar la base de su silla de baño. **4**
- En tercer lugar, deberá de coger la pieza con forma de C, pero la que es más larga. Vuelva a coger un tornillo largo y repita la misma acción anterior. **5**
- Destornille 4 agujeros, que sean a la par y no discontinuo, en esos cuatro agujeros, irán colocados la base que sujeta el respaldo. **6**
- Ponga la siguiente pieza, como se muestra en la imagen, coja los tornillos más largos. **7**
- Repita la acción anterior. **8**
- En penúltimo lugar, deberá de atornillar las barras que sujetan el respaldo, hágalo en los agujeros visibles, que son cuatro. **9**
- En último lugar coloque los tubos, solo debe de introducir, en cuanto haga "clic", significara que se ha colado correctamente. **10**

En la imagen 8, puede colocar las barras de aluminio en el lado izquierdo de la imagen y lo mismo con el reposabrazos, usted decide donde le es más cómodo.

6. GARANTÍA DE LA SILLA 9300

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.

Manual de usuario

Silla de ducha 9300

V3 · 22/04/2022