



Colchón y compresor HE-703

Ayudas técnicas

MANUAL DE USUARIO

Ref. TCOL703BE

más de **50 años** viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo colchón compresor **HE-703**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta/e.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes del HE-703.....	4
2 – Descripción del producto	4
3 – Características del producto	4
4 – Interferencias electromagnéticas	5
5 – Uso del colchón compresor.....	5
6 – Mantenimiento y limpieza	6
7 – Garantía.....	7

1. PARTES DEL HE-703



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE

El colchón antiescaras previene la formación de escaras en personas con movilidad reducida. El compresor hincha y deshincha los diferentes compartimentos del colchón realizando una

alternancia y cambiando los puntos de presión sobre los que descansa el paciente. Dispone de luces indicadoras de marcha y gancho de sujeción a la cama.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas (sin hinchar)		Medidas (hinchado)	
Ancho total	97,50 cm	Ancho total	92 cm
Largo total	200 cm	Largo total	190 cm
		Alto total	7 cm
Peso			
Peso máximo soportado			110 kg
Compresor			Hiper silencioso
Material	PVC	Color	Beige

4. INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS

Este producto está diseñado para prevenir el decúbito. Tipo: Estilo celosía

El colchón antidecúbito estilo celosía se infla por turnos mediante una bomba de aire. Es eficaz para prevenir el decúbito cambiando la superficie de contacto del cuerpo. El colchón de celosía elimina el agua de la superficie del cuerpo del paciente mediante un chorro de aire. Así se mantiene la piel seca.

El producto HE-703 también dispersa la presión del paciente para evitar el decúbito. Está especialmente diseñado para reducir el sufrimiento, el dolor del paciente y reducir el trabajo del personal de enfermería. El decúbito se puede prevenir eficazmente con el uso adecuado del colchón.

4.1. INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS

No se encuentran interferencias electromagnéticas entre el producto y otros dispositivos. Si hay algún tipo de interferencia electromagnética, se puede probar abriendo y cerrando la máquina.

Si se confirma, la interferencia electromagnética puede eliminarse ajustando la distancia entre máquinas o cambiando la posición del producto.

Por favor, siga la normativa del gobierno local para eliminar los residuos.

5. USO DEL COLCHÓN COMPRESOR

5.1. USO DE LA COLOCACIÓN DEL COLCHÓN DE AIRE

El lado con la entrada de aire debe colocarse en el lado de los pies del paciente al acostarse para reducir la influencia del ruido para los pacientes.

Nota: Debe colocarse un cojín debajo del colchón cuando se utilice con una cama de cuerda de coco o un catre de acero para evitar que el colchón se desgaste.



Se puede colocar una sábana o una manta de lana fina sobre el colchón de aire, pero no se permite el uso de paños de plástico o de goma (como materiales no ventilados). Porque los materiales no ventilados afectarán al flujo de aire. Como resultado, la eficacia del tratamiento se reducirá en gran medida.

5.2. USO DE LA COLOCACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE

Conecte el tubo con la bomba firmemente y asegúrese de que el tubo no esté doblado. Por favor, utilice el colchón con la bomba específica fabricada por Totalcare Medical para garantizar un inflado de aire seguro durante 24 horas ininterrumpidas.



5.3. CONEXIÓN DEL COLCHÓN ANTIDECÚBITO Y LA RED ELÉCTRICA

Conexión del colchón antidecúbito: Conecte la entrada del colchón de aire con la salida de la bomba de aire mediante el tubo. Asegúrese de que el tubo no esté bloqueado cuando lo utilice.

Conexión de la red eléctrica: Enchufe la alimentación y encienda el interruptor de encendido. La bomba de aire comienza a funcionar cuando se enciende la lámpara.



5.5. AJUSTAR LA BOMBA DE AIRE

El pomo sirve para ajustar la dureza-suavidad del colchón. Ablande el colchón de aire girando el mando a "MIN", y endurecerlo girando a "MAX". La dureza tiene un mejor efecto para prevenir el decúbito. En circunstancias normales, la perilla debe ser girada en el rango de la línea real. En circunstancias anormales o si se ha utilizado durante mucho tiempo, el mando se puede girar en el rango de la línea imaginaria.



6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Coloque la bomba de aire en un lugar seco y limpio. Se puede colgar en la cama por el gancho de acero, que está en la parte inferior de la bomba. También puede colocarse debajo de la cama del enfermo, pero debe protegerse contra la humedad y el polvo. Evite exponer en exceso el colchón de aire al sol para retrasar el envejecimiento del mismo.

El colchón de aire debe limpiarse inflado (para evitar que el detergente pase a la cámara interior). El detergente neutro es adecuado. Por favor, utilice el alcohol 75% para la esterilización y seque antes de usarlo.

Por favor, limpie el filtro en la parte inferior de la cubierta con regularidad como sigue (normalmente 3 meses, dependiendo de la situación de uso):

1. Desenrosque el tornillo de la tapa del filtro en la parte inferior de la bomba de aire, y saque el disco del filtro y el filtro juntos.
2. Limpie el filtro con agua limpia. También se puede remojar en agua corriente.
3. Fije el filtro a la base del filtro después de secarlo, cubra la tapa y luego fíjela firmemente.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Motivo	Solución	
No se puede bombear aire en el colchón de aire.	El indicador luminoso se enciende.	Conexión anormal entre el colchón de aire y la bomba.	
	El indicador luminoso no se enciende.	El tubo de la bomba de aire se cae.	Vuelva a conectarlos correctamente con la tubería.
		No se ha conectado la alimentación.	Abrir la bomba y fijar el tubo interior.
		Fusible roto.	Conecte la alimentación.
		Sustituir un nuevo fusible de 1.0A.	

Problemas		Motivo	Solución
Se puede bombear poco aire en el colchón de aire.	El colchón de aire es demasiado blando.	El botón de ajuste se detiene en la posición "MIN".	Gire el mando a la derecha hasta la dureza adecuada.
		El colchón se rompe ligeramente o se utiliza en exceso.	Sustituir por uno nuevo.
	Hay un ruido fuerte.	No se ha conectado la alimentación.	Saque el filtro y límpielo.
		Tornillos del exterior están sueltos.	Atornille los tornillos con fuerza.

7. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.

Manual de usuario

Colchón y compresor HE-703

V2 · 09/11/2022