



CR04

Andarilho de exterior

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. BSDPAL9100FB - BSDPAL9100FREFB

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo andarilho **CR04 FM, CR04 FP ou CR04 FM R8**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 – Partes	4
2 – Descrição	4
3 – Características técnicas	5
4 – Manutenção e limpeza	6
5 – Instalação do andarilho	7
6 – Informação sobre utilização e segurança	7
8 – Utilização do andarilho	10
8 – Garantia	11



1. PARTES



2. DESCRIÇÃO

ANDARILHO LIGEIRO COM ASSENTO

Os andarilhos com travões CR04 incorporam um sistema de travões manuais que permitem um controlo total pelo utilizador e caracterizam-se por serem fabricado em alumínio, um material leve, resistente e muito duradouro. Tem um as-

sento ajustável e confortável sob o qual existe um cesto de roupa suja e uma barra acolchoada como encosto para apoiar confortavelmente as costas, tem também um sistema de dobragem fácil para facilitar o transporte.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CR04 FM



CR04 FP



CR04 FM R8

Medidas	CR04 FP	CR04 FM
Largura total	65,5 cm	64 cm
Largura entre as rodas traseiras	36 cm	45,5 cm
Profundidade geral	60/67 cm	67/73,5 cm
Profundidade dobrada	26,5 cm	31 cm
Altura total (ajustável)	80,5/97 cm	82/99 cm
Altura do assento ao chão (ajustável)	50/57 cm	50/57 cm

Peso	CR04 FP	CR04 FM
Peso total	7,15 kg	7,30 kg
Peso máximo suportado	100 kg	100 kg

Material	Alumínio	Cor	Azul / Vermelho
----------	----------	-----	-----------------

Assento	
Largura do assento	37 cm
Profundidade do assento	25 cm
Tipo de assento	Dobrável
Material do assento	Acolchoado
Cor do assento	Preto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Encosto

Largura do encosto	48 cm
Tipo de encosto	Dobrável
Material do encosto	Barra acolchoada

Roda	CR04 FP	CR04 FM	CR04 R8
Medidas das rodas dianteiras	Ø15 cm	Ø15 cm	Ø20 cm
Medidas das rodas traseiras	Ø15 cm	Ø15 cm	Ø20 cm
Largura das rodas dianteiras	2,5 cm	2,5 cm	4 cm
Largura das rodas traseiras	2,5 cm	2,5 cm	4 cm
Tipo de rodas	Maciças	Maciças	Maciças
Número de rodas dianteiras	2	2	2
Número de rodas traseiras	4	2	2


Outras características	CR04 FP	CR04 FM
Cesto	Cesto de tecido	Cesto de tecido
Dimensões do cesto (largura/altura profundidade)	36/18/19 cm	36/18/19 cm
Peso máximo do cesto	8 kg	8 kg
Dobrável	Sim	Sim

Tipo de travão	Travão pressão	Travão maneta e bloqueio de estacionamento
----------------	----------------	--


Suporte de bastão	Sim	Sim
-------------------	-----	-----



Botão de ajuste da altura

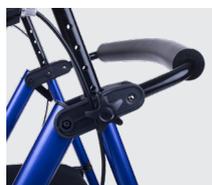

Encosto

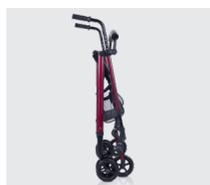

Andarilho CR04 FP dobrável



Suporte de bastão

4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Efetuar a manutenção regular do andarilho.
- Limpar o chassi com um pano húmido para remover a sujidade.
- Armazenar o andarilho dentro de casa à noite. Não o exponha ao ar salgado ou a ambientes agressivos. Se exposto, verificar se há danos e limpar antes de usar.
- Verificar semanalmente as rodas para uma rotação adequada, cotão ou qualquer coisa que afete o seu funcionamento. O chassi que não esteja danificado, não tenha fissuras, nem esteja dessoldado em algum lugar. Que os freios funcionem de forma ótima. Caso contrário, levar ao serviço técnico ajustar.

5. INSTALAÇÃO DO ANDARILHO

5.1. RETIRAR O ANDARILHO DA CAIXA

Para começar a utilizar o andarilho, retire cuidadosamente o andarilho da caixa. Abrir empurrando para baixo as dobradiças do mecanismo de dobragem.

5.2. MONTAGEM DAS RODAS

Rodas dianteiras

As rodas da frente são as que têm os garfos (as duas rodas estão unidas). Quando colocar a barra de alumínio no seu andarilho, depois de ter regulado a sua altura, deve fixá-la com o tampão.



Rodas traseiras

As rodas traseiras não têm garfos. Repita o passo anterior.


5.3. MONTAGEM DE PUNHOS E MANÍPULO DO TRAVÃO

Inserir a barra de alumínio da mesma forma que no passo anterior, mas desta vez através da parte superior do seu andarilho. Faça o mesmo que mostra na imagem.



5.4. BOTÃO DE AJUSTE DE ALTURA E PARAFUSO

Para fixar a altura da parte superior do seu andarilho, introduza o punho pelo orifício visível, depois dê voltas sobre o eixo do punho para fixar a altura adequada.

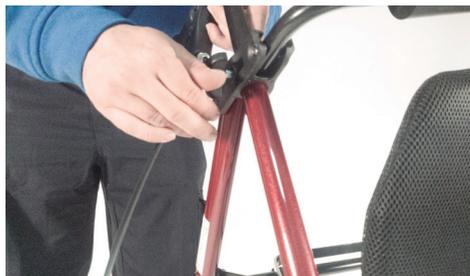

5.5. MONTAGEM DO CESTO

Coloque o cesto em ambas as extremidades, perto da dobradiça, mecanismo de dobragem, encaixe os botões com os restantes, saberá se foi colocado um botão quando ouvir um "clique".



5.6. COLOQUE O SUPORTE DE BASTÃO

No seu andarilho verá que, do lado direito, tem uma parte redonda saliente, é aqui que irá colocar o suporte de bastão.



5.7. COLOQUE CORRETAMENTE O SISTEMA DE TRAVÕES

Os cabos que ligam a pega aos travões são posicionados da seguinte forma para sua conveniência.



CUIDADO

Uma vez montado o andarilho, deve verificar se todas as peças estão devidamente montadas e se o produto está pronto para ser utilizado. Se notar que qualquer uma das peças não está completamente no lugar, não utilize o andarilho e contacte o seu especialista ortopédico.

6. INFORMAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA



CUIDADO

Não utilizar o andarilho como cadeira de rodas ou cadeira de transporte.

- Utilizar apenas o assento para ficar quieto.
- Nunca se sente e empurre com os pés.
- Não utilizar para subir ou descer escadas, escadas rolantes ou tapetes rolantes.

Consulte sempre o seu médico ou terapeuta para determinar a utilização adequada e o ajuste da altura para um apoio máximo e uma ativação correcta do travão.

Assegurar-se de que ambos os botões de ajuste de altura são apertados e que as pegas estão à mesma altura. Teste a estabilidade antes da utilização.

Certifique-se de que o andarilho está totalmente aberto, o assento está em posição e as dobradiças estão devidamente colocadas.

Verificar se as configurações de altura estão corretas e se as rodas se movem livremente antes da utilização.

Respeitar o limite de peso do produto.

Substituir as rodas quando desgastadas ou danificadas. Verificar semanalmente as rodas dianteiras para detetar sinais de danos.

Interromper a utilização do andarilho se verificar que as rodas estão soltas e volte ao local onde comprou para que as possam ajustar.

Não expor a temperaturas extremas (muito alta ou muito baixa), humidade ou que se possa molhar, a fim de evitar a deformação das peças plásticas.

Todas as rodas devem estar em contacto com o solo ao utilizar o andarilho para que esteja equilibrado.

Para evitar que tombe:

- Não tente alcançar objectos se tiver de se mover para a frente enquanto está sentado no andarilho.
- Não pendurar nada no andarilho.
- O encosto deve estar sempre no lugar e não foi concebido para suportar todo o peso do seu corpo.
- Se quiser alcançar ou apanhar um objecto, deve colocar os dois pés firmemente no chão.
- Não adicionar peso extra ao andarilho quando estiver sentado.
- Não utilizar o assento se estiver num declive ou num terreno irregular.
- O cesto tem uma capacidade de 5 kg e os objectos não devem sobressair do mesmo.
- Para travar temporariamente o andarilho, carrregar em ambas as pegas ao mesmo tempo.

7. UTILIZAÇÃO DO ANDARILHO


7.1. COMO UTILIZAR OS TRAVÕES?

Para travar sem capotar, coloque as mãos nas manetes de travão e aplique pressão em ambas ao mesmo tempo para travar sem capotar e levar o seu andarilho a uma paragem completa.



7.2. COMO UTILIZAR O BOTÃO DE AJUSTE DE ALTURA

Para ajustar a altura, retirar o botão de ajuste e levantar ou baixar a barra como desejado. Para ajustar a altura desejada, voltar a colocar o botão e aparafusá-lo novamente no seu eixo, certificando-se de que a altura é ajustada correctamente.

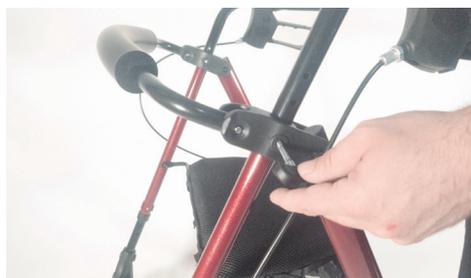

7.3. COMO AJUSTAR E FIXAR A ALTURA DO ANDARILHO

Rodas dianteiras

Para ajustar e fixar a altura das duas rodas dianteiras, é necessário remover ambos os caimentos.

Para remover as guarnições, carregar no clique de ancoragem e puxá-lo para fora. Agora ajuste a altura conforme desejado. Para fixar a altura, reintroduzir a guarnição.

Rodas traseiras

Para ajustar e definir a altura, carregar na bola saliente da barra de alumínio e baixá-la ou elevá-la como quiser, saberá que está definida quando ouvir um "clique".



7.4. COMO DOBRAR O ANDARILHO

Para dobrar o andarilho, abrir o cesto, pegar na base que segura o assento e puxar para cima.



8. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após da compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efectuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de serie.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Andarilho CR04 FM · CR04 FP · CR04 FM R8

V4 · 08/04/2022