



My Bath

Ajudas de banho

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. BSDPACIMYBATHGB

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo **assento para a banheira My Bath**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.


mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 – Partes e montagem	4
2 – Descrição	5
3 – Características técnicas	5
4 – Manutenção e limpeza.....	5
5 – Utilização e particularidades	6
6 – Características técnicas	6
7 – Garantia.....	7

1. PARTES E MONTAGEM

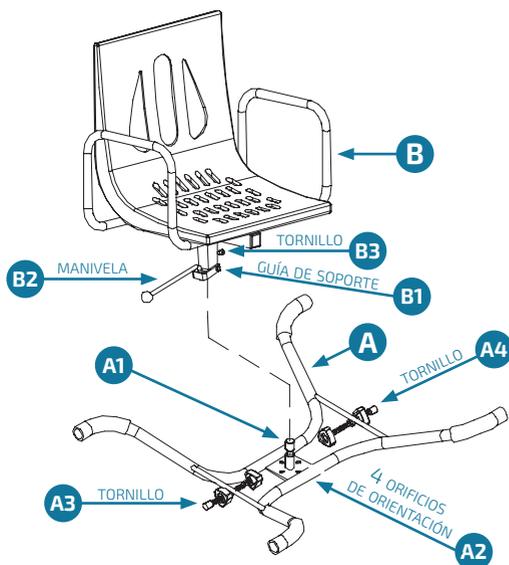

1. Colocar a base (ver imagem A) na banheira. As 4 pernas devem ser firmemente posicionadas no interior da banheira. Os acessórios de PVC devem estar na posição correcta para evitar que escorreguem.

2. Uma vez colocada a base, os parafusos de aço inoxidável (ver figura A3 e A4) devem ser aparafusados de ambos os lados contra a parede interior da banheira, para evitar que a base se mova.

3. Todo o assento (ver figura B) deve ser fixado no interior da base a partir da tampa com uma chave de parafusos (B3). O furo (B1) da base do banco deve ser alinhado com o eixo central da base (A1). O assento deve ser instalado cuidadosamente, certificando-se de que o eixo central entrou correctamente no orifício do guia de apoio. A manivela (B2) deve ser posicionada correctamente nos 4 orifícios guia (A2), caso contrário, quando o paciente se senta, a cadeira inteira pode tombar para um lado, o que pode causar lesões ao paciente,

4. Quando o paciente utilizar o assento, não pode entrar na banheira directamente. O assento deve ser rodado num ângulo de 90 graus com o assento virado para o exterior. Ao mesmo tempo, deve ser assegurado que as pegas de segurança estão correctamente posicionadas nos orifícios.

O paciente pode então apoiar-se nas pegas e sentar-se. Quando o paciente se tiver posicionado no assento, pode então rodar a cadeira lentamente num ângulo de 90 graus (os pés do paciente devem ser levantados).

Os cabos de segurança devem estar na posição correcta, isto deve ser feito com cuidado, caso contrário a cadeira inteira e o paciente tenderão a mover-se para um lado ou para o outro.

Depois de o paciente ter terminado o banho, tem dificuldade em levantar-se e deve ser ajudado a sair directamente da banheira, o assento pode ser virado com o paciente ainda sentado sobre ele. Os cabos de segurança devem ser levantados.

O assento pode então ser rodado 90 graus antes de colocar as pegas de segurança na posição correcta. O paciente pode então ser assistido fora da casa de banho.

Ao virar o paciente, lembre-se de mover o assento lentamente e de se certificar de que os pés do paciente estão levantados.

Se o assento for empurrado com demasiada força, toda a base pode começar a mover-se e o paciente e o assento podem cair; isto pode causar lesões graves ao paciente. Quando o paciente está de pé, deve ter-se o cuidado de assegurar que o assento e a base estão estáveis. As quatro pernas não devem mover-se, caso contrário existe a possibilidade de que todo o assento e o doente possam cair com risco de lesões para o doente.

5. Após a utilização do assento. O assento deve ser rodado de volta para a posição original. Verificar se as pegas de segurança estão na posição correcta, depois limpar o assento para que possa ser utilizado novamente.

2. DESCRIÇÃO

A cadeira para a banheira My Bath permite aos idosos ou pessoas com problemas de mobilidade reduzida aceder confortavelmente à banheira para higiene pessoal, sem a necessidade

de trabalhos de construção ou instalação dispendiosa. Esta ajuda de banho é fácil de fixar à banheira, sem necessidade de qualquer ajuste mecânico.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MY BATH

Medidas

Largura total	73 cm
Profundidade total	50,5 cm
Altura total	50 cm
Largura do assento	40 cm
Profundidade do assento	33 cm
Largura do encosto	35 cm
Altura do encosto	35 cm

Peso

Peso total	4,55 kg
Peso máximo suportado	100 kg

Assento	Giratório	Material	Plástico e aço inoxidável	Cor	Branco
----------------	-----------	-----------------	---------------------------	------------	--------

4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA



APÓS O DUCHE, LIMPAR TODAS AS PARTES COM UM PANO.

- Manutenção regular da cadeira de duche.
- Limpar o chassi com um pano húmido para remover a sujidade.
- Guarde a cadeira no interior de sua casa pela noite. Não a exponha a ar salgado ou ambientes hostis. Se for expô-la, verificar os danos e limpar antes de utilizar.
- Verificar periodicamente se o chassi não está danificado. Em caso contrário, chamar um técnico de serviço para arranjo.

5. UTILIZAÇÃO E PARTICULARIDADES

A cadeira para a banheira My Bath destaca-se por ser fabricada em aço inoxidável revestido de plástico, evitando assim que a corrosão afete a estrutura após contacto contínuo com a água. Monta-se e desmonta-se rápida e facilmente, e também pode ser limpa e seca sem esforço para uma manutenção adequada.

Oferece a máxima segurança para os seus utilizadores, uma vez que tem um revestimento de borracha em cada uma das suas pernas para evitar que se mova durante a utilização ou que deslize da borda da banheira.

6. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS. CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual do utilizador

Cadeira de duche My Bath

V3 · 22/04/2022