



# 4100

Ajudas de banho

## MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. BBDPAL4100FG



mais de 50 anos a viver sem limites

**!** Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DE TOTALCARE EUROPE

# OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo **andarilho de sanita 4100**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.


mais de **50 anos** a viver **sem limites**

# GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

<b>1 – Partes .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – Descrição .....</b>	<b>4</b>
<b>3 – Características técnicas .....</b>	<b>5</b>
<b>4 – Instalação e utilização .....</b>	<b>6</b>
<b>5 – Manutenção e limpeza .....</b>	<b>6</b>
<b>6 – Garantia.....</b>	<b>7</b>

## 1. PARTES DA SANITA 4100

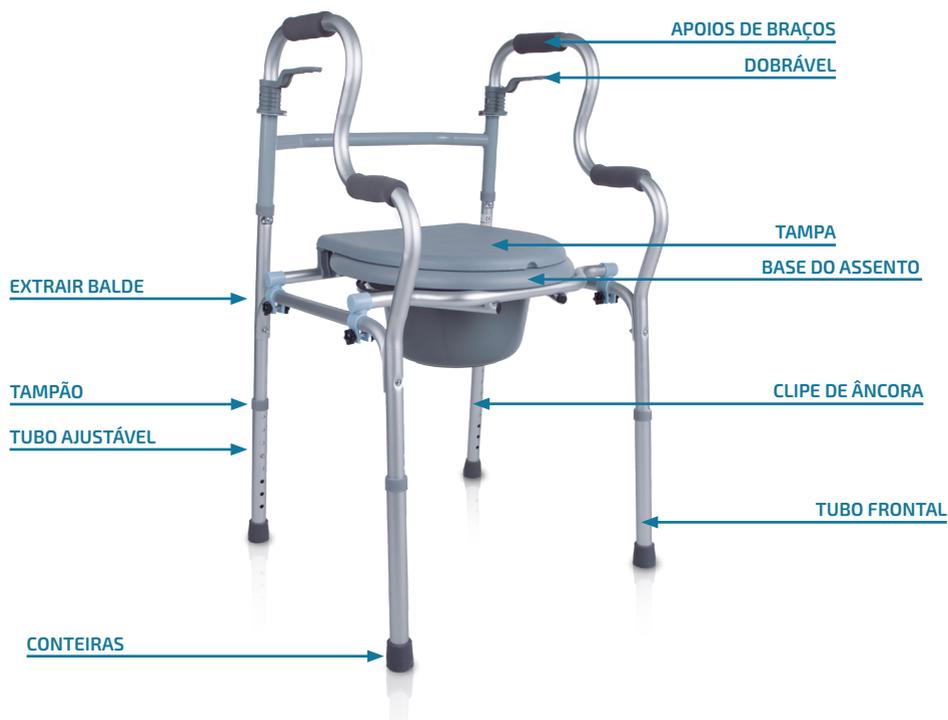

## 2. DESCRIÇÃO DA SANITA 4100

### ANDARILHO E CADEIRA DE SANITA

A ajuda de casa de banho 4100 é um andarilho de sanita dois em um que oferece ao utilizador conforto e segurança quando vai à casa de banho. Tem quatro pegas ergonómicas e um

balde removível. Por outro lado, as conteiras anti-derrapantes proporcionarão ao utilizador estabilidade e protecção quando o utilizar.

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



4100

#### Medidas

Largura total	55 cm
Profundidade total	53 cm
Altura total (altura ajustável - 8 níveis)	64 - 82 cm
Altura do assento ao chão	47 - 65 cm
Largura do assento	39 cm
Profundidade do assento	40 cm
Largura do encosto	46 cm
Largura de abertura do balde	22 cm
Profundidade da abertura do balde	25 cm

#### Peso

Peso total	4,40 kg
Peso sem balde	4,10 kg
Peso máximo suportado	100 kg

Material	Plástico e alumínio	Cor	Cinzento
----------	---------------------	-----	----------

## 4. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA SANITA 4100



- Para abrir a sua cadeira de sanita, coloque as mãos na mesma posição como mostrado na imagem e faça um ligeiro movimento ascendente com as duas mãos nas duas pegas. ①
- Coloque o balde na base da sua cadeira de sanita, como mostra a imagem, repita este passo mais 3 vezes. ②
- Deve colocar parafusos roscados e colocar uma arruela fazendo rosca com as mãos, repita esta etapa mais 3 vezes. Em último lugar, coloque os tubos nos pés de sua cadeira de sanita e depois coloque o tampão para fixar a altura da cadeira. ③

## 5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Por favor, verifique se todas as peças estão bem presas antes de as utilizar.
  - Sugerimos que seja acompanhado por um assistente.
  - Não utilizar numa rampa. Tenha cuidado quando utilizar numa superfície escorregadia.
  - Manter a mesma altura de todos os 4 tubos ao ajustar.
  - Transporte: Este produto precisa de ser armazenado num ambiente seco, estável, não corrosivo e longe da chuva.
  - Limpar o produto com um pano macio e seco.
  - Eliminar o produto de acordo com os regulamentos ambientais locais.
- ATENÇÃO:** Cuidado na utilização se os membros inferiores do utilizador estiverem impedidos.

## 6. GARANTIA DA SANITA 4100

### DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

### ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

### PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

É essencial apresentar uma cópia da factura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

### ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

**NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.**

**CONTACTE O SEU FORNECEDOR.**

## Legenda da etiquetagem.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

## Manual do utilizador

Andarilho de sanita 4100

V4 · 22/04/2022