

Colchão e compressor HE-703

Ajudas técnicas

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. TCOL703BE



más de **50 años** a viver **sin límites**

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo colchão compressor **HE-703**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 – Partes do HE-703.....	4
2 – Descrição do produto	4
3 – Características do produto	4
4 – Interferência electromagnética	5
5 – Utilização do colchão compressor.....	5
6 – Manutenção e limpeza.....	6
7 – Garantia.....	7

1. PARTES DO HE-703



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

COLCHÃO COMPRESSOR

O colchão anti-escaras impede a formação de escaras em pessoas com mobilidade reduzida. O compressor enche e esvazia os diferentes compartimentos do colchão, alternando e

mudando os pontos de pressão sobre os quais o paciente repousa. Tem luzes indicadoras e um gancho para o fixar à cama.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total	100 cm
----------------------	--------

Comprimento total	200 cm
--------------------------	--------

Peso

Peso máximo suportado	110 kg
------------------------------	--------

Compressor	Silencioso
-------------------	-------------------

Material	PVC y nylon termo	Color	Bege
-----------------	-------------------	--------------	------

4. INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA

Este produto foi concebido para evitar o decúbito. Tipo: Estilo celosia

O colchão anti-decúbito estilo celosia é enchido por turnos por uma bomba de ar. É eficaz na prevenção do decúbito, alterando a superfície de contacto do corpo. O colchão celosia remove a água da superfície do corpo do paciente com um jacto de ar. Isto mantém a pele seca.

O HE-703 também dispersa a pressão do paciente para evitar o decúbito. Foi especialmente concebido para reduzir o sofrimento e a dor do paciente e para reduzir o trabalho do pessoal de enfermagem. O decúbito pode ser eficazmente evitado com uma utilização adequada do colchão.

4.1. INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA

Não são encontradas interferências eletromagnéticas entre o produto e outros dispositivos. Se houver qualquer interferência eletromagnética, esta pode ser testada abrindo e fechando a máquina.

Se confirmado, a interferência eletromagnética pode ser eliminada ajustando a distância entre máquinas ou mudando a posição do produto.

Por favor, siga os regulamentos do governo local para a eliminação de resíduos.

5. UTILIZAÇÃO DO COLCHÃO COMPRESSOR

5.1. UTILIZAÇÃO DA COLOCAÇÃO DE ALMOFADA DE AR

O lado com a entrada de ar deve ser colocado no lado dos pés do paciente deitado para reduzir a influência do ruído para os pacientes.

Nota: Uma almofada deve ser colocada debaixo do colchão quando utilizada com uma cama de corda de coco ou uma cama de aço para evitar o desgaste do colchão.



Um lençol ou uma fina manta de lã pode ser colocada sobre o colchão de ar, mas não é permitida a utilização de panos de plástico ou de borracha (como materiais não ventilados). Porque os materiais não ventilados irão afectar o fluxo de ar. Como resultado, a eficácia do tratamento será reduzida.

5.2. UTILIZAÇÃO DA COLOCAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR

Ligar a tubagem à bomba com segurança e assegurar que a tubagem não é dobrada. Utilize o colchão com a bomba específica fabricada pela Totalcare Medical para assegurar uma insuflação de ar segura durante 24 horas ininterruptas..



5.3. LIGAÇÃO DO COLCHÃO ANTI-DECÚBITO E DA REDE DE ELÉTRICA

Ligação do colchão anti-decúbito: Ligar a entrada do colchão de ar à saída da bomba de ar utilizando a tubagem. Certificar-se de que o tubo não está bloqueado quando em uso.

Ligação à rede eléctrica: Ligar a fonte de alimentação e ligar o interruptor de corrente. A bomba de ar começa a funcionar quando a lâmpada se acende.



5.5. AJUSTAR A BOMBA DE AR

O botão é utilizado para ajustar a dureza - suavidade do colchão. Amaciar o colchão de ar rodando o botão para "MIN", e endurecê-lo rodando o botão para "MAX". A dureza tem um melhor efeito na prevenção do decúbito. Em circunstâncias normais, o botão deve ser rodado no intervalo da linha real. Em circunstâncias anormais ou se tiver sido utilizado durante muito tempo, o botão pode ser rodado no intervalo da linha imaginária.



6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Colocar a bomba de ar num local seco e limpo. Pode ser pendurado na cama pelo gancho de aço, que se encontra no fundo da bomba. Também pode ser colocado debaixo da cama do paciente, mas deve ser protegido contra humidade e poeira. Evitar a exposição excessiva do colchão de ar ao sol para retardar o envelhecimento do colchão de ar.

O colchão de ar deve ser limpo insuflado (para evitar que o detergente passe para a câmara interior). O detergente neutro é adequado. Por favor, usar 75% de álcool para esterilização e seque antes da utilização.

Limpar o filtro no fundo da tampa regularmente da seguinte forma (normalmente 3 meses, dependendo da situação de utilização):

1. Desaparafusar o parafuso da tampa do filtro no fundo da bomba de ar, e sa- ce o disco filtrante e o filtro juntos.
2. Limpar o filtro com água limpa. Também pode ser encharcado em água corrente.
3. Fixar o filtro à base do filtro depois de secar, tapar a tampa e depois fixá-la firmemente.

GUÍA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Razão	Solução	
Não é possível bombear ar para o colchão de ar	A luz indicadora acende	Ligação anormal entre almofada de ar e bomba	Voltar a ligá-los corretamente ao tubo
	A luz indicadora não se acende	O tubo da bomba de ar cai	Abrir a bomba e fixa o tubo interior
		Nenhuma fonte de alimentação ligada	Ligar a fonte de alimentação
		Rastilho partido	Substituir o novo fusível 1.0A

Problemas		Motivo	Solução
Pode-se bombear pouco ar para o colchão de ar	O colchão de ar está demasiado mole	O botão de ajuste pára na posição "MIN"	Roda o botão para direita até a dureza apropriada
		O colchão está ligeiramente partido ou demasiado utilizado	Substituir por um novo
	Faz um ruído forte	A energia não foi ligada	Retirar o filtro e limpá-lo
		Os parafusos do exterior estão soltos	Apertar bem os parafusos

7. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Conformidade Europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual do utilizador

Colchão e compressor HE-703

V1 · 05/07/2022