



Sofa Springfield

Ajudas técnicas

MANUAL DO UTILIZADOR

mais de 50 años a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas indentificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo sofá **Springfield**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 – Partes do sofá	4
2 – Descrição do produto	4
3 – Características do produto	5
4 – Utilização e montagem	6
5 – Manutenção	6
6 – Garantia	7

1. PARTES DO SOFÁ



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SOFÁ RECLINÁVEL E INCORPORADO ELÉTRICO

O sofá individual Springfield tem um mecanismo elétrico que lhe permite ajustar a inclinação do encosto e a elevação dos apoios para os pés.

Além disso, permite que o utilizador se levante por si próprio sem necessidade de fazer um esforço extra.

Tem um motor e um novo sistema inovador de controlo motorizado com controlo remoto incluído.

Tem um design moderno e individual e uma grande funcionalidade que o torna ideal para as pessoas com mobilidade reduzida se adaptarem perfeitamente às suas necessidades.

Tem dimensões de 105 cm de altura, 82 cm de profundidade e 80 cm de largura que reafirmam a compacidade do seu design. Inclui um controlo para regular a sua reclinção de modo a que se adapte perfeitamente ao utilizador.

3. CARATERÍSTICAS DO PRODUTO



INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total 80 cm

Altura total 105 cm

Profundidade total 82 cm

Peso

Peso máximo suportado 130 kg

Material

Polipele

Cor

Castanho / Preto



Sofá lateral



Sofá lounge reclinável



Cabeça




Apoio para os pés

4. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

Utilização

4.1. UTILIZAÇÃO DO CARREGADOR

1. Conector para motor e cablagem.
2. Conector para cablagem e adaptador.
3. Conector para a cablagem do adaptador e cablagem da ficha.
4. Conector para controlo motor e manual.

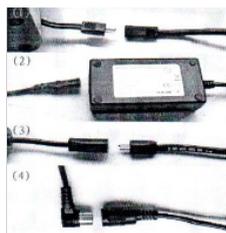

4.2. UTILIZAÇÃO DO CONTROLO

O controlo manual activa os motores do sofá que lhe permitem sentar-se, levantar-se e reclinar-se.

Depois, os controlos manuais para as cadeiras motorizadas simples e duplas diferem na aparência e função. Os controlos para cada sofá são ilustrados abaixo.


Partes do controlador do sofá de Springfield:



1. O sofá é levantado ou o encosto é devolvido.
2. Reclinando o sofá.

Montagem

4.3. MONTAGEM DO SEU SOFÁ

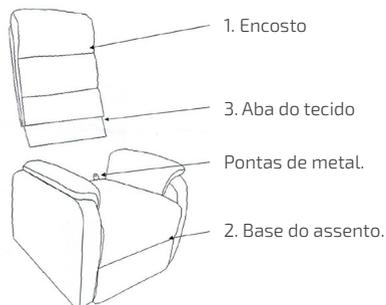

- Inserir o encosto (1) nos pontos metálicos, como se mostra no desenho.
- Fixar a aba de tecido com o velcro no assento (2).

5. MANUTENÇÃO

- **Limpar todas as peças com um pano se o produto tiver sido molhado.**
- O sofá deve ser colocado sobre um chão plano.
- Não utilize o seu sofá em ambientes húmidos ou poeirentos, pois isto pode causar choques elétricos ou problemas com a máquina. O sofá deve estar numa sala seca.
- Não utilize o seu sofá em temperatura ambiente superior a 40°.
- Não exponha o seu sofá a aquecedores, fogões ou à luz directa do sol.
- Não utilizar o sofá ao ar livre. Utilização apenas em interiores. Evitar a exposição à chuva, neve, gelo, sal ou água parada. Manter e guardar num ambiente limpo e seco.
- Quando o seu sofá não estiver a ser utilizado, desligue o cabo de alimentação da rede para evitar o sobreaquecimento.
- Não descansar ou colocar quaisquer objectos pesados no apoio do braço, apoio para os pés ou encosto do sofá.

- Não saltar nem brincar no sofá.
- Não se sentar ou ficar de pé no apoio para os pés.
- As crianças devem ser supervisionadas por um adulto quando utilizam o elevador de sofá, este sofá não é concebido para crianças.
- Mantenha os animais de estimação afastados quando o elevador do sofá estiver em movimento.
- A ligação elétrica deve estar em conformidade com os regulamentos locais.
- Não ligar ou desligar a ficha da tomada com as mãos molhadas. Pode causar choques elétricos ou problemas com a máquina.
- Ao desligar a ficha de alimentação, puxe-a segurando-a e não pelo cabo, e provocará fogo ou choque elétrico.
- Não tocar na superfície da ficha imediatamente após a utilização, pois pode estar muito quente.

6. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega pos-

terior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.
-

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Conformidade Europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual do utilizador

Sofá Springfield

V3 · 04/05/2022