



Calabria 5

Cadeira de rodas
elétrica basculante

MANUAL DO UTILIZADOR

SEFACALABR

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova cadeira de rodas elétrica **Calabria 5**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 – Partes da cadeira	4
2 – Descrição do produto	4
3 – Características do produto	5
4 – Antes de começar e mais informações	7
5 – Unidade de controlo.....	8
6 – Utilização e montagem	9
7 – Bateria	12
8 – Manutenção e limpeza.....	13
9 – Lista de verificação de problemas.....	9
10 – Garantia.....	10

1. PARTES DA CADEIRA



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CADEIRA DE RODAS ELÉTRICAS COM BASCULAÇÃO ELÉTRICA

A Calabria 5 é a cadeira de rodas elétrica mais completa em características da família Calabria. Os destaques são a basculação elétrica com o premir de um botão e o ajuste da altura dos apoios para os pés, também eletronicamente. Tem um sistema de iluminação muito completo e o apoio de cabeça é ajustável em altura.

Além disso, tem um encosto confortável que a torna uma cadeira de rodas elétrica muito confortável para o utilizador.

Tem dois motores de 500W que lhe permitem atingir 12 km/h, duas baterias de gel de 75 Ah que proporcionam uma autonomia de 40 a 50 km.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



CALABRIA 5

INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total	68 cm
Profundidade sem apoio para os pés	85,5 cm
Profundidade total	112 cm
Altura total	118 cm
Altura do assento ao chão	55 cm

Peso

Peso total	126 kg
Peso máximo suportado	180 kg

Material	Alumínio	Cor	Preto/ Laranja
-----------------	----------	------------	----------------

Assento

Largura do assento	45 cm
Profundidade do assento	44 cm
Tipo de assento	Fixo
Material do assento	Acolchoado

Apoios de braços

Largura do apoio de braço	7 cm
Comprimento do braço de apoio	36 cm
Material de apoio ao braço	Injetado
Tipo de apoio de braço	Dobrável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apoio para os pés

Tipo de apoio para os pés Individuais, eleváveis, reguláveis e dobráveis

Material do apoio para os pés Plástico e alumínio

Encosto

Largura do encosto 42,5 cm

Altura do encosto 60 cm

Tipo de encosto Reclinação

Material de encosto Estofado

Rodas

Medidas da roda dianteira Ø 25 cm

Medidas da roda traseira Ø 35 cm

Largura das rodas frontais 8 cm

Largura da roda traseira 10 cm

Tipo de rodas Sólido / Insuflável

Motor

Potência motora 2 x 500 W

Bateria 2 x 75 Ah (gel)

Número de baterias 2

Velocidade máxima 12 km/h

Autonomia 40 - 50 km

Carregador externo 8 Ah

Outras características

Tilting Elétrico

Cinto de segurança Sim

Trompa Sim

Travões Eletromagnético

Joystick Programável

Luzes frontais Sim

Luzes traseiras Sim

Luzes indicadoras Sim

Marcha-atrás Sim

Inclinação máxima de escalada 12°

Raio de viragem 1000 mm

Rodas Anti-tipagem Sim



Semi-perfil.



Parte de trás.



Calabria 5 reclinável.

4. ANTES DE COMEÇAR E MAIS INFORMAÇÕES

4.1. PRATICAR ANTES DE OPERAR

- Antes de conduzir o veículo todos os dias, deve encontrar uma área aberta, como por exemplo um parque para que possa praticar manobras.
- Recomendamos que seja acompanhado por um assistente ao conduzir.
- Certifique-se sempre de que o veículo não está a circular antes de entrar ou sair do veículo.
- Verifique sempre se a regulação da velocidade é escolhida de acordo com a sua experiência e competências.
- Enquanto pratica, mantenha a velocidade na posição mais lenta.

Para conduzir em segurança, certifique-se de que está familiarizado com as características e estilo de condução do veículo.

4.2. DURANTE A OPERAÇÃO

1. Em primeiro lugar, pratique o avanço. Certifique-se de que a velocidade é definida para a posição mais lenta.
2. Em seguida, pratique em forma de "S". Finalmente, pratique a condução em macha-trás.
3. Enquanto conduz em marcha-atrás, o veículo move-se sempre mais devagar, independentemente da regulação de velocidade.



4.3. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Não transportar passageiros.
- Não conduzir depois de beber álcool.
- Consulte o seu médico para ver se a sua medição afeta a sua capacidade de conduzir.
- Não utilizar quaisquer dispositivos de comunicação pessoal, tais como rádios ou telemóveis.
- Não rebocar um reboque.

4.4. CONDUÇÃO AO AR LIVRE

- Não utilizar a cadeira de rodas em superfícies macias, irregulares e desprotegidas, tais como relva, cascalho, areia, margens de rios, lagos,...
- Não utilizar as cadeiras de rodas para condução fora da estrada.
- Certifique-se de que não há obstáculos atrás de si quando conduz em marcha-atrás. Recomendamos que ajuste a velocidade para a posição mais lenta.
- Não pare de repente, tente sempre fazer curvas suaves.
- Mantenha sempre os braços nos apoios de braços e os pés no apoio para os pés, enquanto conduz.
- Não tente subir lancis superiores a 7 cm.
- Não tente conduzir sobre um buraco/espaco com mais de 10 cm de largura.

4.5. CONDUZIR EM COLINAS E TERRENOS IRREGULARES

Conduzir em colinas e outros terrenos irregulares é mais perigoso do que conduzir em superfícies planas. Seguir as seguintes regras é essencial para evitar acidentes e ferimentos graves.

- Não tentar subir uma colina cujo grau exceda 10°.
- Não recuar enquanto se sobe ou desce a colina.
- Não utilizar a cadeira de rodas em superfícies macias, irregulares e desprotegidas, tais como relva, cascalho ou areia.
- Ao descer a encosta, escolher a velocidade mais lenta.
- Não entrar ou sair da cadeira de rodas se esta estiver numa encosta (para entrar ou sair da cadeira de rodas é necessário colocá-la sobre uma superfície plana).
- Subir ou descer sempre colinas perpendiculares à encosta.

5. UNIDADE DE CONTROLO



5.1. PARÂMETROS TÉCNICOS

- Painel de controlo eletrónico.
- O painel de controlo eletrónico permite monitorizar a cadeira de rodas elétrica, o estado da bateria e o estado geral do sistema eletrónico.
- O painel de controlo eletrónico é normalmente colocado no apoio do braço e é ligado à bateria e ao motor. O painel pode ser colocado no apoio de braço esquerdo/direito ou atrás da cadeira de rodas (quando usado por um técnico de saúde).

5.2. JOYSTICK

O joystick permite controlar a direcção e a velocidade do movimento. Empurrar o joystick para a frente para libertar o travão electromagnético e pôr a cadeira de rodas em movimento. Quanto mais se empurrar o joystick para a frente, mais depressa a cadeira de rodas se moverá. Se soltar o joystick, a cadeira de rodas vai abrandar e parar.

5.3. MODOS DA CADEIRA

Ajuste das costas, assento e apoio para os pés:

O joystick permite-lhe ajustar a posição do encosto, do assento e do apoio para os pés. Mova o joystick para a esquerda ou para a direita para escolher a parte da cadeira de rodas que deseja ajustar.

Quando se empurra o joystick para a frente, a parte seleccionada sobe. Quando se move o joystick para trás, ele desce.

Modo de condução:

O joystick permite-lhe controlar e manobrar a cadeira de rodas. Empurrar o joystick para a frente para ir sempre em frente. Mova o joystick para trás para conduzir em marcha-atrás. Para virar à esquerda ou à direita, mover o joystick para o lado esquerdo ou direito. Se quiser parar, solte o joystick.

5.4. BARRA DE ESTADO DA BATERIA

Pode encontrar a barra de estado da bateria na parte superior do controlador. Utilizando o indicador luminoso colorido, a barra de estado da bateria fornece informações sobre o fornecimento, a potência aproximada das baterias, os sistemas elétricos da cadeira de rodas utilizando um código de cores.

● ● ● A luz constante vermelha, amarela e verde indicam que as baterias estão totalmente carregadas, os sistemas elétricos e a eletrónica do painel de controlo são eficientes.

● ● A luz vermelha e amarela constante indicam que deve carregar as baterias, os sistemas elétricos e a eletrónica do painel de controlo são eficientes.

● ● A apenas luz vermelha constante ou luz vermelha intermitente: deve carregar as baterias o mais rápido possível, os sistemas elétricos e a eletrónica do painel de controlo são eficientes.

● ● ● Se as luzes piscarem, a eletrónica ou o sistema elétrico não está a funcionar correctamente. Se as luzes de aviso piscarem 6 vezes, o motor esquerdo é danificado. Se as luzes de aviso piscarem 5 vezes, o motor direito não está a funcionar corretamente.

Se as luzes de aviso piscarem continuamente, o joystick não estava na posição neutra quando a cadeira de rodas foi desligada. Desligue a corrente, solte o joystick e volte a ligá-lo.

Se seguiu as instruções do manual do utilizador, mas as luzes de aviso continuam a piscar, por favor contacte o seu revendedor.

6. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

6.1. UTILIZAÇÃO DO COMANDO DE CONTROLO

Botões de ajuste de velocidade: Existem dois botões de ajuste de velocidade: se quiser reduzir a velocidade, prima o botão de desaceleração. A velocidade real é mostrada no indicador abaixo da barra de estado da bateria. Quanto mais rápido se mover, mais luzes se acendem.

Botão da buzina: Premir o botão para ativar a buzina.

Tomada do carregador: A tomada é utilizada para carregar a bateria, ligar o carregador (máx. 12A).

Botão das luzes de condução: Quando se ligam as luzes de condução, o ícone de luz correspondente será activado.

Botão de virar à esquerda: Ao premir o botão ativar-se-á o ícone de luz correspondente. Para desligar o indicador, premir novamente o botão.

Botão de rotação à direita: Ao premir o botão ativar-se-á o ícone de luz correspondente. Para desligar o indicador, premir novamente o botão.

Botão de luz de aviso: Ativa as luzes de aviso.

Lembre-se que quando o sistema de accionamento elétrico é desligado, os travões eletromagnéticos também são desligados.

Nunca desligue a unidade electromagnética se não houver ninguém para empurrar a sua cadeira de rodas.

Nunca desligar a unidade electromagnética se a cadeira de rodas estiver numa encosta ou em qualquer outro terreno inclinado: a cadeira de rodas pode descer, o que pode resultar em danos na cadeira de rodas ou ferimentos.

6.2. UTILIZAÇÃO DO CARREGADOR

Ligar o cabo de saída do carregador à tomada na parte inferior do controlador.

Depois de ligar o cabo de saída do carregador à ficha de carga e à tomada de alimentação, ligar o painel de controlo eletrónico. A barra de estado da bateria irá piscar.

A cadeira de rodas não se moverá enquanto carrega, mesmo que o joystick seja empurrado.



6.3. UTILIZAÇÃO DO INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO

"-" Botão de ligar/desligar

Botão de desligar "0".

Para ligar o carregador, prima o botão para o colocar na posição "-".



6.4. UTILIZAÇÃO DE LUZES INDICADORAS DE CARGA

- Luz laranja: carga em curso.
- Luz amarela: carga concluída, as baterias estão totalmente carregadas.



6.5. UTILIZAÇÃO DO CONFORTO DA CADEIRA

Para passar do modo de condução para o modo de ajuste de conforto da cadeira de rodas, deve premir o botão "M" no botão de controlo, se não o encontrar, na secção "Botão de controlo, página 8" apontámo-lo.

Por favor, olhar para o ícone da cadeira de rodas no controlador: indicará que parte da cadeira de rodas (encosto, assento ou apoio para os pés) está pronta a ser ajustada. Mova o joystick para a esquerda ou para a direita para alterar a parte da cadeira de rodas que pretende ajustar. Quando a sua escolha for feita, a luz indicadora correspondente indicará-lhe-á que peça será ajustada. Quando se empurra o joystick para a frente, a parte escolhida avançará para cima. Quando se move o joystick para trás, ele irá mover-se para baixo.



6.6. UTILIZAÇÃO DA CABEÇA

O apoio de cabeça tem vários ajustes de altura para melhorar o seu conforto. Ajuste o apoio de cabeça até encontrar a posição ideal.



6.7. USO DO APOIO DE BRAÇO

Para ajustar a altura do apoio de braço, é necessário desapertar a pega, escolher a altura desejada e substituir o parafuso.




6.8. UTILIZAÇÃO DO AJUSTE DO CONTROLADOR

É possível ajustar a posição do controlador às necessidades individuais. Desaparafusar o parafuso na haste do controlador debaixo do apoio de braço e escolher a posição desejada do controlador. Em seguida, substituir o parafuso. O controlador pode ser colocado no apoio de braço esquerdo ou direito. Também pode ser colocada na parte de trás da cadeira de rodas e utilizada pelo prestador de cuidados.



6.9. USO DO CINTO DE SEGURANÇA

Antes de conduzir a cadeira, colocar o cinto de segurança. Para soltar o fivela, premir o botão que diz "press".

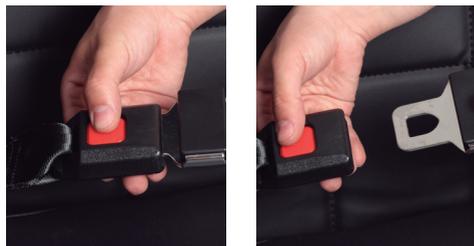

6.10. UTILIZAÇÃO DA ALAVANCA DO APOIO PARA OS PÉS

Puxar a alavanca para cima, mover o apoio de braço para fora e levantá-lo para cima para o retirar, deslizar o cabo que o liga ao apoio de braço



6.11. UTILIZAÇÃO DA EMBRAIAGEM DO MOTOR

Se desejar empurrar a cadeira elétrica, puxe a alavanca da embraiagem para um dos lados para abrir.

Operação automática: puxar a alavanca da embraiagem para o outro lado para fechar.



6.12. UTILIZAÇÃO DE RODAS ANTI-VOLTEIO

As rodas anti-volteio protegem a cadeira de rodas de tombar no caso de pequenas inclinações laterais e proporcionam uma melhor estabilidade. É possível dobrar ou desdobrar as rodas, como se mostra nas imagens seguintes:



6.13. MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BATERIA

Puxar o trinco do compartimento da bateria para cima. Retirar o compartimento da bateria.



7. BATERIA

Para carregar as baterias de forma rápida e segura, utilizar apenas o carregador original fornecido com a cadeira e seguir as regras abaixo.

1. Ligar sempre o carregador à tomada de carga na parte inferior do controlador, depois ligá-lo à tomada de alimentação.
2. Seguir as instruções detalhadas no quadro do carregador.
3. O tempo de carga depende do estado da bateria. A melhor opção é carregar as baterias à noite quando as baterias estão carregadas, o carregador deixará de funcionar automaticamente.
4. Se o carregamento estiver completo, remover o carregador da tomada de alimentação e depois remover da tomada da ficha. Nunca deixar o carregador ligado à tomada do carregador se este não estiver ligado à fonte de alimentação de saída.

Se precisar de substituir as pilhas, por favor contacte o seu revendedor.



Nunca ligar o carregador a uma tomada de alimentação superior a 12V. Utilizar sempre o carregador original fornecido com a cadeira de rodas. O não cumprimento das regras acima mencionadas pode provocar o sobreaquecimento e a ignição do carregador. Não carregar baterias em locais húmidos. Nunca parar ou suspender a carga se as baterias não estiverem completamente carregadas. A carga deve durar até as baterias estarem completamente carregadas.

As baterias estão equipadas com um protector de sobrecarga (75AH) que desliga automaticamente uma carga quando a corrente excede um valor pré-determinado.

Quando a cadeira de rodas está sobrecarregada, o protetor de sobrecarga salta e desliga a carga. Se o motor estiver sobrecarregado, parar a cadeira de rodas e esperar até o motor arrefecer. Depois empurrar para baixo o protector de sobrecarga e reativar a cadeira de rodas. Se não for possível reativar a cadeira de rodas, contacte o seu ponto de serviço.



Nunca deixar as pilhas descarregarem completamente. Se notar a última luz amarela ou a primeira luz vermelha no controlador, carregue as baterias. Lembre-se que o ciclo de carregamento deve demorar entre 9 e 10 horas, até que as baterias estejam completamente carregadas.

Nunca parar ou suspender a carga se as baterias não estiverem completamente carregadas. O não cumprimento das regras acima mencionadas pode causar danos na bateria.

Se armazenar baterias, certifique-se de que estão completamente carregadas.

Se não utilizar a sua cadeira de rodas regularmente, deverá carregar as baterias pelo menos de duas em duas semanas. Lembre-se que cada carga deve ser completada e durar aproximadamente 9-10 horas, até que as baterias estejam completamente carregadas.

Se notar qualquer fuga da bateria, por favor contacte o seu revendedor.

Ao carregar as baterias, mantenha sempre a cadeira de rodas e o carregador afastados de qualquer fonte de calor.

8. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Para assegurar que a sua cadeira de rodas tenha anos de funcionamento sem problemas, o utilizador deve inspecionar e manter regularmente a cadeira de rodas e entregá-la ao revendedor autorizado para a sua verificação e inspeção anual de manutenção geral. Se encontrar quaisquer problemas ou anomalias durante a utilização da cadeira de rodas, contacte o seu ponto de serviço autorizado mais próximo.

8.1. INSPEÇÃO ANUAL

A inspeção anual consiste em verificar se a cadeira de rodas está em boas condições e se todos os sistemas (sistema de accionamento, sistemas elétricos e eletrónicos) estão a funcionar corretamente. Também ajuda a prevenir potenciais problemas que possam surgir de defeitos existentes. A inspeção deve incluir:

- Inspeção de pneus.
- Inspeção da bateria e dos cabos.
- Inspeção do programa de controlo do controlador e verificar se é necessária uma reedição.
- Inspeção do quadro principal.
- Inspeção das costas dos bancos e das almofadas dos bancos.

8.2. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Proteger o controlador e o joystick contra choques e solavancos violentos.
- Evitar a exposição prolongada da cadeira de rodas elétrica ao frio extremo, calor ou humidade.
- Manter sempre o controlador e o joystick limpos.
- Manter a cadeira de rodas afastada do contacto direto com a água.
- Manter sempre a armação e os estofos limpos. Utilizar um pano macio e seco para limpar a armação principal e os estofos. Não utilizar nenhum abrasivo. Durante a limpeza, não utilizar detergentes diretamente no controlador, carregador de bateria ou outros conetores de alimentação.
- Lubrificar ligeiramente o pino do eixo, o eixo da roda e os rolamentos de três em três meses.
- Utilizar apenas as baterias originais fornecidas

com a cadeira de rodas. Se desejar substituir as pilhas, contacte o seu revendedor.

- Carregue as baterias regularmente. Certifique-se sempre de que o carregador está corretamente ligado à tomada de alimentação. Nunca desligar o carregador puxando o cabo.
- Inspecionar regularmente o estado do joystick: desligar a corrente e verificar se o joystick não está danificado. Tente empurrar o joystick e depois soltá-lo; ele deve voltar automaticamente à sua posição de centro morto. Verificar se a manga de borracha à volta da base do joystick não está danificada. Não operar ou tentar reparar o joystick. Consulte o seu revendedor autorizado se surgir algum problema.
- Verifique cuidadosamente todas as cablagens; se notar quaisquer danos, contacte o ponto de serviço autorizado. Certifique-se de que todas as ligações elétricas estão corretas e adequadas; Não apertar demasiado os parafusos.
- Certifique-se de que todas as partes do sistema controlador estão firmemente presas à sua cadeira de rodas.
- A sua cadeira de rodas elétrica deve ser armazenada num local seco e livre de temperaturas extremas. Ao guardar a cadeira e desligar as baterias da cadeira elétrica, consultar "Pilhas" neste manual. Se não armazenar a unidade nas condições acima referidas, a moldura pode enferrujar e a eletrónica pode ser danificada.

8.3. ARMAZENAMENTO

A cadeira de rodas elétrica deve ser armazenada num local seco, livre de temperaturas extremas. Retirar sempre as baterias quando a cadeira de rodas estiver armazenada. Lembre-se que, como a maioria do equipamento elétrico, a sua cadeira de rodas elétrica é susceptível de ser danificada. Evitar ambientes húmidos de qualquer tipo. Se armazenar a cadeira de rodas em locais impróprios, a estrutura pode facilmente enferrujar e os componentes elétricos podem ser danificados.

9. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
As luzes do controlador piscam rapidamente quando a energia é ligada.	Desligar a corrente, colocar o joystick na sua posição neutra. Depois esperar alguns segundos e reativar a cadeira de rodas.
As luzes do controlador piscam lentamente enquanto conduz.	A intermitência lenta significa que o nível do carregador de baterias está baixo e que as baterias devem ser carregadas o mais rápido possível.
As luzes do controlador piscam continuamente e não é possível controlar a cadeira de rodas.	O piscar contínuo das luzes indica que pode haver um problema elétrico. Desligue a corrente e contacte o seu ponto de serviço autorizado.
A luz vermelha do controlador no carregador de bateria não se acende durante o carregamento.	Verificar se todos os cabos estão corretamente ligados e ligados a uma tomada elétrica. Se o controlador vermelho ainda não acender, desligar o carregador de bateria da tomada e do painel de controlo, desligar a cadeira de rodas e contactar um ponto de serviço autorizado.
A cadeira é difícil de manusear.	Primeiro, verificar se as quatro rodas estão corretamente instaladas na cadeira de rodas elétrica. Segundo, verificar se a alavanca da embraiagem está na posição correcta.
Se detetar problemas com os motores, carregador de bateria, controlador ou danos na estrutura da cadeira de rodas, recomenda-se que contacte o seu revendedor autorizado mais próximo.	Se notar quaisquer outras irregularidades com a sua cadeira de rodas ou se não responder após a realização de qualquer uma das inspeções acima referidas, contacte o ponto de serviço autorizado mais próximo.

10. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efectuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Cadeira de rodas elétrica Calabria 5

V1 · 14/06/2022