



9000 · 9000R

Ayudas de baño

MANUAL DE USUARIO

Ref. BBDPAL9000FB
BBDPAL9000FREFB

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM by TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva **banqueta de ducha 9000 y 9000R**, le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes	4
2 – Descripción	4
3 – Características técnicas	5
4 – Instalación y uso	6
5 – Mantenimiento y limpieza	6
6 – Garantía	7

1. PARTES DE LA SILLA 9000 Y 9000R



2. DESCRIPCIÓN DE LA SILLA 9000 Y 9000R

BANQUETA DE DUCHA CON DOS ASAS

La banqueta de ducha 9000R, no tiene respaldo y cuenta con dos asas laterales para hacer más fácil la transferencia a la banqueta, ayudando al usuario a sentarse correctamente. Cuenta con conteras antideslizantes que proporcionan estabilidad y seguridad a la persona que usa la banqueta.

BANQUETA DE DUCHA CON DOS ASAS

La banqueta de ducha 9000R, no tiene respaldo y cuenta con dos asas laterales para hacer más fácil la transferencia a la banqueta, ayudando al usuario a sentarse correctamente. Cuenta con conteras antideslizantes que proporcionan estabilidad y seguridad a la persona que usa la banqueta.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



9000



9000R

Medidas	9000	9000R
Ancho total	49 cm	49 cm
Profundidad total	44,5 cm	44,5 cm
Alto total (regulable en altura · 5 niveles)	36 - 46 cm	36 - 46 cm
Ancho del asiento	40 cm	40 cm
Profundidad del asiento	33 cm	33 cm

Peso	9000	9000R
Peso total	2,30 kg	2,30 kg
Peso máximo soportado	100 kg*	136 kg

Material Plástico y aluminio

Color Blanco

4. INSTALACIÓN Y USO DE LA SILLA 9000 Y 9000R



- Asegúrese de colocar bien las patas de hierro como se muestra en la primera imagen, para después ponerlas boca abajo como se muestra en la siguiente imagen. **1**
- Coloque la base de la silla boca abajo, colocar las patas de manera de cruz, la pata con hundido central va la primera y después va la pata más gruesa de alto en el centro. **2**
- Coloque las arandelas dentro del tornillo de cruz. Coloque el tornillo central con su arandela y así con los restantes. **3**
- Coloque los reposabrazos, es importante que la dirección sea hacia afuera y no hacia dentro, colóquelo a la altura que usted necesite. **4**

9000R

- Coloque las dos barras de metal y que hagan forma de cruz. **5**
- Ajuste las barras a los extremos de la silla y coloque los tornillos con sus arandelas. **6**
- Para colocar el reposabrazos, haga presión en la bola para ajustarlo a la altura que mas desee. **7**
- Fíjese en que el reposabrazos queda hacia afuera, como se muestra en la imagen. **8**

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Por favor, compruebe si todas las piezas están bien ajustadas antes de usarlas.
- Sugerimos estar acompañado de un asistente.
- No lo use en una rampa. Tenga cuidado cuando lo use en un lugar resbaladizo .
- Mantenga la misma altura de los 4 tubos cuando se ajuste.
- Las ventosas de las patas son de plástico. Por favor, cambiar cuando estén gastadas.
- Transporte: Este producto necesita ser almacenado en un ambiente seco, estable, no corrosivo y lejos de la lluvia.
- Limpie el producto con un paño suave y seco.
- Desechar el producto según las normativas medioambientales locales
- Partes vulnerables, las ventosas.

ATENCIÓN: Cuidado cuando lo use si los miembros inferiores del usuario estan impedidos.

6. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por un defecto de fabricación del producto que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 2 años desde la compra del producto, a partir del tercer año, para hacer valer la garantía, el usuario deberá demostrar que el producto está defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor también deberá dirigirse preferiblemente al punto de venta donde adquirió el producto. En el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunidad autónoma, podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com. El cual podrá dirigirle al punto de venta más cercano a su domicilio.

Es imprescindible presentar **copia de la factura o del ticket de compra** en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha. Así como el **justificante del pago** para importes de más de 1000€. También deberá ser acompañado con una nota explicativa de la falta de conformidad y una fotografía del número de serie.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario, negligencia, por no obedecer las instrucciones indicadas en este manual, causadas por otros factores humanos, por colisión con algún objeto o por daños causado por un tercero.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas, cualquier evento de la naturaleza o de fuerza mayor.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante.
- Los daños ocasionados por el transporte o por un mal embalaje.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste provocados por el uso, tales como: Ruedas, tapizados, almohadillas de reposabrazos, electrofreno, bombillas, baterías, etc...
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.

Manual de usuario

Silla de ducha 9000 y 9000R

V3 · 15/02/2022