



PC-20/21

Silla de ruedas
manual de acero

MANUAL DE USUARIO

Ref: SACPC2

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.


Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva silla de ruedas **PC-20/21**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes de la silla.....	4
2 – Descripción del producto	4
3 – Características del producto.....	5
4 – Uso	7
5 – Mantenimiento.....	9
6 – Aviso	9
7 – Garantía.....	10



1. PARTES DE LA SILLA



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PC-20 SILLA DE RUEDAS DE ACERO PLEGABLE

Silla de ruedas plegable y resistente

Sencilla, robusta, plegable y pensada para durar. La silla de ruedas PC-20, es una silla manual de acero pintado con epoxy poliéster, de color negro, que se caracteriza por su respaldo fijo y su ancho de asiento que varía entre 40, 42 y 45 cm. Cuenta con un tapizado acolchado en color negro, fabricado en un material ignífugo con una alta capacidad para resistir el contacto con una llama, evitando la propagación del fuego. Sus reposabrazos son abatibles e incorporan un clip de seguridad que bloquea el movimiento y facilita la transferencia del usuario. Y sus reposapiés son desmontables y permiten ser regulados en altura.

SILLA DE RUEDAS PC-21 DE ACERO PLEGABLE

Silla de ruedas con sistema Quick Release

Además de ser resistente, las ruedas PC-21 de acero les ofrece el sistema Quick Release, un sistema de extracción rápida de la rueda trasera, esto hará que la silla se separe con un simple clic. Las ruedas delanteras son macizas, con un diámetro de 200x32mm y tienen horquillas metálicas que las hacen más resistentes. Sus ruedas traseras son de 600 mm y pueden ser macizas o neumáticas. Por su tamaño, estas ruedas tienen mayor estabilidad para el usuario a la hora de maniobrar en superficies inestables, el cual además podrá auto propulsarse. El peso máximo que soporta la silla de ruedas PC-21 es de 120kg.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



PC-20



PC-21



PC-20 BARIÁTRICA



PC-21 BARIÁTRICA

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	PC-20	PC-21
Ancho total (Talla 36)	51 cm	53,5 cm
Ancho total (Talla 38)	55 cm	56 cm
Ancho total (Talla 40)	58 cm	58 cm
Ancho total (Talla 42)	60 cm	60,5 cm
Ancho total (Talla 45)	62 cm	63 cm
Alto total	91,5 cm	93 cm
Prof. sin los reposapiés	71,5 cm	79 cm
Profundidad total	95 cm	103 cm
Ancho total plegada	27 cm	27 cm
Alto del asiento al suelo	50,5 cm	50,5 cm

Peso	PC-20	PC-21
Peso total	14,95 kg	17,15 kg
Peso sin los reposapiés	13,30 kg	15,40 kg
Peso máximo soportado tallas (36, 38, 40, 42 y 45)	120 kg	120 kg

Material Acero

INFORMACIÓN GENERAL

PC-20/21 BARIÁTRICAS

Medidas	PC-20	PC-21
Ancho total (Talla 48)	64 cm	67,5 cm
Ancho total (Talla 50)	66 cm	69,5 cm
Ancho total (Talla 56)	71,5 cm	73 cm
Alto total	92 cm	90 cm
Prof. sin los reposapiés	72,5 cm	81 cm
Profundidad total	95 cm	103 cm
Ancho total plegada	27 cm	28 cm
Alto del asiento al suelo	50,5 cm	49 cm

Peso	PC-20	PC-21
Peso total	18,20 kg	20,15 kg
Peso sin los reposapiés	16,60 kg	18,55 kg
Peso máximo soportado tallas (48, 50 y 56)	180 kg	180 kg

Color Negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento (talla)	36 cm / 38 cm / 40 cm / 42 cm / 45 cm / 48 cm / 50 cm / 56 cm
Profundidad del asiento	40 cm
Tipo de asiento	Fijo
Material del asiento	Tela ignífuga

Reposabrazos

Ancho de reposabrazos	26,5 cm
Largo del reposabrazos	Abatibles
Tipo de reposabrazos	5,5 cm

Reposapiés

Altura del reposapiés (regulable)	40 a 51 cm
Peso de los 2 reposapiés	1,65 kg
Tipo de reposapiés	Individuales, regulables y extraíbles

Respaldo

Ancho del respaldo (talla)	36 cm / 38 cm / 40 cm / 42 cm / 45 cm / 48 cm / 50 cm / 56 cm
Alto del respaldo	42 cm
Tipo de respaldo	Fijo
Material del respaldo	Tela ignífuga

Ruedas	PC-20	PC-21
Medidas ruedas delanteras	Ø 20 cm	Ø 20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 31,5 cm	Ø 60 cm
Ancho ruedas delanteras	3 cm	3 cm
Ancho ruedas traseras	5 cm	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas / Hinchables	Macizas / Hinchables

Otras características

Tipo de freno	Freno bloqueo
Tipo de plegado	Cruceta simple con 4 estabilizadores



Reposapiés individuales



Reposabrazos abatibles



Freno bloqueo



Rueda delantera

4. USO

5.1. PARA DESPLEGAR LA SILLA

Colocar las manos en la parte delantera y trasera por la mitad del tapizado de asiento, empujar hacia abajo para abrir la silla. Silla desplegada.



PRECAUCIÓN

Al desplegar la silla, no empujar con fuerza el chasis hacia abajo para no dañar piezas. No sostenga la silla por los tubos del asiento cuando empuje hacia abajo, puede cogerse los dedos.

5.2. PLEGADO

Primero, levantar las plataformas de los reposapiés, y el tapizado del asiento para poder plegar la silla.



5.3 AJUSTE DE LA PLATAFORMA DEL REPOSAPIÉS

Aflojar las tuercas con una llave, mueva hacia abajo el tubo y ajuste la plataforma a la posición correcta, luego bloquear y ajustar los tornillos con una llave en sentido de las agujas del reloj.



5.4 USO DE LOS FRENOS

El usuario sujeta los frenos con las manos, una vez la silla está quieta, los acciona, para que las ruedas traseras queden completamente bloqueadas.



5.5 SUPERAR OBSTÁCULOS

En caso de encontrarse con obstáculos, el acompañante debe coger la silla por los puños, pisar el extremo del tubo hacia atrás para que se eleve la parte de las ruedas delanteras, y así poder pasar el obstáculo.



5.6 REPOSABRAZOS ABATIBLES

Para abatir el reposabrazos hacia atrás, presione el seguro para separar el soporte del tubo del asiento, luego mueva el reposabrazos hacia atrás. Para volver a colocar el reposabrazos en su posición original bajar el reposabrazos y encajar el reposabrazos en el soporte del tubo del asiento.



5.7 REPOSAPIÉS DESMONTABLE

Para la instalación del reposapiés, primero póngalo del derecho, encaje el pivote, luego mueva el reposapiés de fuera hacia adentro hasta que encaje y quede bien fijado; para extraer el reposapiés, lo que debería hacer primeramente es mover el sistema gatillo hacia adentro, sáquelo hacia arriba, extraiga el reposapiés



5. MANTENIMIENTO

- **La silla de ruedas no está certificada por el crash test, por lo que no puede ser utilizada para el transporte en vehículos adaptados.**
- Examinar la silla periódicamente para comprobar que estén todos los tornillos y que estén ajustados antes de utilizar la silla. En caso que falte alguno o que alguno esté flojo llevarla al servicio técnico.
- Se debe añadir aceite lubricante en las partes móviles de la silla para un mejor funcionamiento.
- Limpiar la silla con un paño suave y seco.
- Mantener el tapizado de asiento y respaldo limpios para proteger la piel del usuario.

6. AVISO

- Se aconseja utilizar la silla en superficies planas, dentro o fuera de una habitación, en recorridos más largos es preferible que siempre haya un acompañante para poder ayudar al usuario, en caso de encontrarse con obstáculos.
- La silla tiene una capacidad máxima de 120kg.
- Para utilizar la silla de ruedas sin problemas, la velocidad debe ser de 3 a 5km/h.
- Los frenos se utilizan para subir o bajar, para parar la silla. No utilizar los frenos si está en movimiento, especialmente si se sube o baja una pendiente, hay riesgo de volcar.
- Los usuarios no deben incorporarse sobre los reposapiés podrían volcar la silla y caer.
- Mientras usa la silla de ruedas en una pendiente no incline la silla ni giré repentinamente.

7. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

SILLA DE RUEDAS MANUAL PLEGABLE PC-20/PC-21

Ideal para el hogar. Sus ruedas traseras tienen un diámetro de 315 mm, convirtiendo a la **PC-20** y la **PC-21** son unas sillas ideales para utilizar en el hogar, hospitales o residencias.



Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Silla de ruedas manual de acero, PC-20/21

V2 · 21/03/2022