



Capri

Silla de ruedas
manual de aluminio

MANUAL DE USUARIO

Ref. SALCAPRI

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva silla de ruedas **Capri**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes de la silla.....	4
2 – Descripción del producto	4
3 – Características del producto.....	5
4 – Uso y montaje.....	7
5 – Consejos de seguridad	9
6 – Transporte de la silla de ruedas.....	10
7 – Mantenimiento y aviso.....	10
8 – Garantía	11

1. PARTES DE LA SILLA



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO LIGERA PLEGABLE Y DE AUTOPROPULSIÓN

La silla de ruedas Capri de aluminio destaca por ser muy ligera y por su sistema de cruceta simple, que la convierte en una silla rápida y fácil de plegar. Sus reposabrazos son abatibles hacia atrás, regulables en altura y completamente extraíbles.

Incorpora sistema Quick Release para extraer la rueda trasera de 600 mm con un solo clic.

Del mismo modo, los reposapiés también pueden extraerse si así lo desea el usuario.

El ancho del asiento se puede escoger entre 40, 42 y 45 cm.

Disponible en color naranja, plata y negro.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



CAPRI

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total (talla 40)	63 cm
Ancho total (talla 42)	63,5 cm
Ancho total (talla 45)	66 cm
Alto total	94 cm
Profundidad total	97 cm
Ancho total plegada (talla 40)	27 cm
Ancho total plegada (talla 42)	29 cm
Ancho total plegada (talla 45)	31 cm
Alto del asiento al suelo	51 cm

Peso

Peso total	14,70 kg
Peso sin los reposapiés	12,85 kg
Peso máximo soportado	120 kg

Material

Aluminio

Color

Negro / Plata / Naranja

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento (talla)	40 cm / 42 cm / 45 cm
Profundidad del asiento	40 cm
Tipo de asiento	Fijo
Material del asiento	Tela ignífuga

Reposabrazos

Ancho de reposabrazos	4 cm
Largo del reposabrazos	32 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles



Freno bloqueo de aluminio

Reposapiés

Altura del reposapiés (regulable)	37 a 53 cm
Peso de los 2 reposapiés	1,80 kg
Tipo de reposapiés	Individuales, regulables y extraíbles



Reposabrazos abatibles

Respaldo

Ancho del respaldo	42 cm
Alto del respaldo	42 cm
Tipo de respaldo	Fijo
Material del respaldo	Tela ignífuga

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø 15 cm
Medidas ruedas traseras	Ø 60 cm
Ancho ruedas delanteras	3 cm
Ancho ruedas traseras	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas



Reposapiés extraíbles

Otras características

Tipo de freno	Freno bloqueo
Tipo de plegado	Cruceta simple con 4 estabilizadores

4. USO Y MONTAJE

Uso

4.1. USO DEL PLEGADO

Posicione la silla a su lado. Para desplegar su silla de ruedas, deberá de colocar sus manos en ambos laterales de los tubos que se posicionan debajo de la tela del asiento, ejerza presión hacia abajo para desplegar la silla.



4.2. USO DEL DESPLEGADO

Para plegar su silla, los reposapiés deben de estar abatidos. Deberá de coger desde el centro del asiento por ambos extremos y ejercer un movimiento hacia arriba, si se pasa de fuerza, puede levantar la silla.



4.3. ABATIR LOS REPOSABRAZOS

Desbloquee el reposabrazos empujando el pivote hacia abajo. Tire del reposabrazos hacia arriba para poner los reposabrazos, sitúelos dentro de los tubos del chasis y presione hacia abajo.



4.4. USO DE LOS FRENOS MANUALES

Para frenar la silla, empujar la palanca del freno hacia adelante. Para desbloquear los frenos, tirar de la palanca del freno hacia atrás. Los frenos pueden incorporar en opción una prolongación de palanca que facilita su manejo.



4.5. USO DE LOS REPOSAPIÉS

- Desmonte y monte el reposapiés estándar:
- Tire de la palanca de liberación del reposapiés hacia atrás.
- Gire el reposapiés hacia afuera a 90 grados y levántelo para sacar el reposapiés de las tomas de la silla de ruedas.



- Coloque el reposapiés a 90 grados desde el exterior de la silla de ruedas.
- Gire el reposapiés y bloquee el asa de liberación mientras coloca el mismo en los orificios del reposapiés.



4.6. ELEVACIÓN DEL REPOSABRAZOS

Presione el botón plateado ubicado en la base del reposabrazos. Levante o baje el brazo hasta la altura deseada. Suelte el botón plateado para bloquear la posición.



4.7. COMO SUBIR UN BORDILLO

La silla de ruedas puede subir un bordillo de hasta 10 grados. La altura máxima del bordillo es aproximadamente el 17,5% de las ruedas delanteras.

El uso de antivuelcos es recomendado para subir bordillos. Se recomienda que el usuario de la silla de ruedas suba a la acera con cuidado y tenga asistencia de un asistente. Las ruedas antivuelco están disponibles para comprar.

PRECAUCIÓN

Antes de subir y bajar de la silla bloquear los frenos. Utilice la silla en el exterior únicamente cuando ya domine la silla. Al principio aconsejamos que lleve un acompañante. No intente levantar la silla por los reposabrazos ni por los reposapiés, si estos son extraíbles. Riesgo de lesionarse tanto el usuario como a persona que lo asiste.

PRECAUCIÓN

¡Para que los frenos funcionen perfectamente, la presión de los neumáticos debe ser de 3-4 bar! Si los neumáticos no tienen suficiente presión, los frenos no actúan correctamente. Los frenos manuales actúan únicamente en las ruedas traseras. Es importante que las ruedas tengan la misma presión para garantizar que la silla marche derecha.

Montaje

4.8. MONTAR Y DESMONTAR LA RUEDA TRASERA

- Tome las llantas alrededor del eje trasero de la silla de ruedas.
- Presione el botón en el eje de liberación rápida con el pulgar.
- Montar o desmontar la rueda trasera. Cuando se suelta el botón, el eje de liberación rápida se encuentra firmemente en los ejes de las ruedas.



4.9. MONTAR Y DESMONTAR EL REPOSABRAZO

Colóquese detrás de la silla, y en el respaldo verá un botón que debe de estirar hasta su tope. Con el reposabrazo totalmente abatido, y estirando el botón, extraiga el reposabrazo.



5. CONSEJOS DE SEGURIDAD

El uso indebido del panel lateral puede dañar su salud o dañar partes de la silla de ruedas.

Asegúrese de que se oiga un "clic" después de que el panel lateral esté montado en los orificios de la silla de ruedas, para señalar que está bloqueado en su lugar.

5.1. PANEL LATERAL

Existe el peligro potencial de dedos pellizcados o de cualquier parte del cuerpo. No coloque los dedos ni ninguna parte de su cuerpo entre el panel lateral y el marco de la silla de ruedas. Los paneles laterales se utilizan para evitar que la ropa del usuario se ensucie. También puede proporcionar apoyo adicional a los brazos del usuario.

5.2. RUEDAS TRASERAS

La temperatura puede aumentar al reducir la velocidad con la mano debido a la fricción. Se recomienda usar un guante para empujar la silla de ruedas.

Los dedos pueden estar pellizcados o arañados durante el uso de la rueda trasera. No agarre ninguna parte entre el freno y la rueda trasera. No agarre ninguna parte de las llantas o entre las llantas.

Las ruedas traseras se utilizan para el movimiento de la silla de ruedas, la dirección de giro y parada. Las ruedas traseras se pueden sacar de la silla de ruedas para facilitar el transporte.

5.3. RUEDAS DELANTERAS Y LA HORQUILLA

El método de montaje incorrecto de la horquilla delantera y la rueda giratoria puede hacer que la silla de ruedas se vuelque y provoque lesiones.

Tenga cuidado cuando realice movimientos de inclinación hacia delante, por ejemplo (cuando se ate los cordones de los zapatos), siempre asegure la máxima estabilidad de la silla de ruedas.

5.4. FRENOS

Los frenos están diseñados para evitar que una silla de ruedas detenida rueda, especialmente en una pendiente. No lo utilice para detener la silla de ruedas repentinamente cuando está en movimiento. Esto puede hacer que los dedos queden atrapados, o incluso la silla de ruedas, se vuelquen y le causen lesiones.

Siempre usé los frenos en ambos lados para detener la silla de ruedas gradualmente.

Cuando se detenga en una pendiente o en un vehículo de transporte, mantenga la silla de ruedas bloqueada por los frenos en ambos lados. No coloque los dedos ni ninguna parte de su cuerpo entre los frenos y la rueda trasera cuando la silla de ruedas esté en movimiento.

Mantenga el freno a una distancia adecuada de la rueda y mantenga una presión de aire normal en los neumáticos. La distancia recomendada es de 4mm. Puede variar según cada usuario.

El montaje o desmontaje de los frenos de la silla de ruedas debe ser realizado por un profesional. El usuario tiene prohibido montar / desmontar / ajustar los frenos.

Empuje la palanca de la palanca del freno hacia adelante para bloquear las ruedas.

Levante la palanca de la palanca del freno para liberar las ruedas bloqueadas.

6. TRANSPORTE DE LA SILLA DE RUEDAS

- Retire el asiento acolchado de la silla de ruedas y levántela desde la mitad del asiento para plegarla.
- No utilice la silla de ruedas cuando esté plegada.
- La silla de ruedas plegada no puede soportar peso, ya que puede distorsionarse y provocar un riesgo en el uso una vez que se haya desplegado. No coloque objetos pesados sobre una silla de ruedas plegada.
- Utiliza un vehículo para transportar la silla de ruedas. Asegúrese de que los frenos de las ruedas estén bloqueados en el transporte. No utilice la silla de ruedas cuando esté en transporte.
- Está prohibido por el fabricante que una silla de ruedas se use en un vehículo de transporte. Puede causar daños graves y lesiones al usuario.
- El usuario de la silla de ruedas debe usar el asiento en el vehículo de transporte durante el transporte.

7. MANTENIMIENTO Y AVISO



La silla de ruedas no está certificada por el crash test, por lo que no puede ser utilizada para el transporte en vehículos adaptados.

Mantenimiento

- Se requieren controles periódicos para un usuario de silla de ruedas.
- Verifique las funciones especiales de la silla de ruedas, especialmente los frenos de las ruedas cada vez antes de usar. Si se encuentra algún componente dañado, comuníquese con TotalCare inmediatamente.
- Consulta las condiciones generales de la silla de ruedas cada mes. Revise las llantas de la rueda trasera cada 3 meses.
- Si el usuario es joven o adolescente, manténgalo bajo la supervisión de un asistente profesional y, cada 6 meses, la silla de ruedas deberá revisarse periódicamente.
- La tuerca de seguridad solo se puede utilizar una vez. Reemplácelo si está suelto unas cuantas veces.

- Comuníquese con su proveedor habitual inmediatamente si se encuentra un defecto, especialmente cuando hay una condición anormal o si la silla de ruedas no está estable.
- El fabricante recomienda que la silla sea revisada y mantenida por un profesional cada 12 meses. Puede tener riesgo de daños o lesiones potenciales sin mantenimiento después de 12 meses de uso.
- La reparación y el mantenimiento solo pueden ser realizados por un profesional del fabricante o TotalCare.

Limpieza

- Use un detergente suave y agua tibia para limpiar.
- Elimine la suciedad o las manchas con una esponja o cepillo suave.
- Use un paño húmedo para eliminar los líquidos de la silla de ruedas.
- Secarlo después de limpiar con agua unas cuantas veces.
- Esteriliza las partes de la silla de ruedas cuando sea necesario.

8. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto está defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Silla de ruedas manual Capri

V2 · 26/04/2022