



## Silla de inodoro 8800 · 8800-U

Ayudas de baño

**MANUAL DE USUARIO**

Ref. BSDPAL8800

más de 50 años viviendo sin límites

**!** Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DESDE TOTALCARE EUROPE

# LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nueva silla inodoro **8800** y **8800U**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

<b>1 – Partes y montaje .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – Descripción .....</b>	<b>5</b>
<b>3 – Medidas.....</b>	<b>5</b>
<b>4 – Uso, particularidades y seguridad.....</b>	<b>5</b>
<b>5 – Mantenimiento y limpieza .....</b>	<b>6</b>
<b>6 – Características técnicas .....</b>	<b>6</b>
<b>7 – Garantía.....</b>	<b>7</b>

# 1. PARTES Y MONTAJE

## 1.1 PARTES



## 1.2 MONTAJE

Para el montaje de la silla necesita una llave inglesa de 10mm y un destornillador de estrella.

El contenido es:



RESPALDO TAPIZADO



4 ARANDELAS,  
4 TORNILLOS Y  
4 TUERCAS



CUBETA




MARCO DE RESPALDO

Para el montaje de la silla de ducha, saque de la caja con cuidado todas las piezas.

Y siga estos sencillos pasos:

**1.** Quitar todas las piezas de la caja: 1 chasis completo de la silla de ducha, 1 cubeta, 1 arco del respaldo, 1 tapizado del respaldo, 4 arandelas, 4 tornillos y 4 tuercas.

**2.** En el extremo posterior de la silla donde inclinan los brazos en el ángulo, localizar 4 agujeros, 2 en cada lado del marco. Deslice los 4 tornillos a través del respaldo y el chasis como se muestra en la figura 1. En el extremo roscado del tornillo, deslice las 4 arandelas y apriete las 4 tuercas como se muestra en la figura 2.

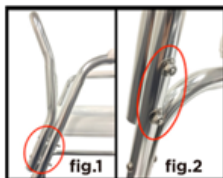

**3.** Deslice la tapicería del respaldo hacia el respaldo desde la abertura inferior de la tapicería.



**4.** Si esta de cara a la silla, para colocar la cubeta debajo del asiento por el lado izquierdo, si está detrás de la silla, deslícelo a través del lado derecho hasta que el cubo golpee el parachoques de goma en el otro extremo del asiento. El borde de la cubeta debe deslizarse entre los soportes delantero y trasero y el mango de la cubeta debe mirar hacia delante o detrás de la cubeta como se muestra.



## 2. DESCRIPCIÓN

La silla de ducha con ruedas **RI-8800**, fabricada en aluminio, ha sido diseñada pensando en personas con problemas de movilidad reducida que necesitan ser trasladadas de forma fácil

y segura al baño, para proceder a su higiene personal o para usarla como inodoro colocando en la parte inferior una cubeta o poniéndolo directamente sobre el WC.

## 3. MEDIDAS

SILLA 8800-U CON ACABADO CROMADO



### MEDIDAS

- 1 Alto total: 83 cm
- 2 Profundidad total: 52 cm
- 3 Ancho total: 57 cm
- 4 Altura del respaldo: 50 cm
- 5 Profundidad del asiento: 40 cm
- 6 Ancho del asiento: 40 cm
- 7 Diámetro de las ruedas: 10 cm

## 4. USO, PARTICULARIDADES Y SEGURIDAD

La **silla 8800** destaca asiento abatible de alta densidad, acolchado y en **forma de herradura**, para que el usuario pueda sentirse cómodo mientras la utiliza y para que al finalizar pueda ser limpiado de forma rápida. Fabricada en aluminio anodizado, convirtiéndose así en una silla ligera pero resistente a los efectos de la corrosión y abrasión, que en caso contrario podría provocar el contacto directo y continuo del agua con su estructura.

Por su altura y forma puede colocarse directamente sobre la taza del WC, aunque el usuario tiene la posibilidad de colocar una cubeta en la parte inferior de la silla. Al tratarse de un asiento en forma de herradura, se facilita que el usuario puede proceder cómodamente a su higiene íntima.

Tiene dos reposabrazos a los lados para que el usuario pueda tener una postura cómoda y correcta mientras está utilizándola.

El respaldo de esta silla de ducha para adultos tiene una altura de 50 cm y está fabricado en nylon, que se puede extraer para su lavado y volver a colocar de forma fácil y rápida.

### Nunca sentarse y empujar con los pies.

Antes de que alguien se siente en la silla, bloquee las 2 ruedas traseras pisando la parte del bloqueo de la rueda que dice "ON" y las ruedas ya no giran. Una vez que la persona esté sentada y estable, desbloquee las 2 ruedas pisando, o empujando con su pie, la parte de la cerradura de la rueda que dice, "OFF" y ruede el inodoro a la ubicación deseada.

## 5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



**DESPUÉS DE LA DUCHA SEQUE CON UN PAÑO TODAS LAS PARTES**

- Hacer un mantenimiento regular de la silla de ducha.
- Limpiar el chasis con un paño húmedo para quitar la suciedad.
- Guarde la silla en el interior de su hogar por la noche. No lo exponga a aire salado o ambientes hostiles. Si lo expone, comprobar los daños y limpiarlos antes de utilizarlo.
- Comprobar periódicamente que el chasis no esté dañado. En caso contrario llamar al servicio técnico para su ajuste.

## 6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho asiento	40 cm	Peso del producto	7,5 kg
Ancho total	57 cm	Peso máximo soportado	100 kg
Alto total	83 cm	Material	Plástico y acero
Profundidad asiento	40 cm	Tapa	Sí
Altura respaldo	50 cm	Ruedas	Sí
Reposabrazos	Fijos		

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.  
CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

8800



8800-U



## 7. GARANTÍA

### DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

### ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

### LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

**NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.**

**CONTACTE CON SU PROVEEDOR.**

## Leyenda etiquetaje.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.

## Manual de usuario

Silla de inodoro 8800 y 8800-U

V7 · 20/01/2023