



A41009

Andador para exterior

MANUAL DE USUARIO

Ref. AAL41009FM

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo andador **A41009F**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes de la silla.....	4
2 – Descripción del producto	4
3 – Características del producto.....	4
4 – Ajustes	5
5 – Información de uso y seguridad	6
6 – Mantenimiento y limpieza	7
7 – Garantía.....	7

1. PARTES DE LA SILLA



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ANDADOR A41009F

El andador con reposapiés A41009F es ideal para personas con movilidad reducida, que necesiten detenerse a descansar después de caminar algunos metros, ya que incorpora un cómodo

asiento con reposapiés, que además permite que el usuario sea empujado por otra persona. Este andador tiene una cesta bajo el asiento y frenos maneta con posición parking.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Medidas

Ancho total	61,5 cm
Ancho entre ruedas traseras	42,5 cm
Profundidad con reposapiés	79 cm
Profundidad sin reposapiés	68 cm
Profundidad plegado	32,5 cm
Alto total (regulable)	83,5 - 95,5 cm

Peso

Peso total	9,10 kg
Peso máximo soportado	120 kg

Material	Aluminio	Color	Gris y azul mate
----------	----------	-------	------------------



A41009F

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	35 cm
Profundidad del asiento	34 cm
Alto del asiento al suelo	53 cm
Tipo de asiento	Abatible
Material del asiento	Acolchado

Respaldo

Ancho del respaldo	45 cm
Tipo de respaldo	Fijo desmontable
Material del respaldo	Barra acolchada

Reposapiés


Profundidad del reposapiés	17 cm
Tipo de reposapiés	Plegable

Ruedas


Medidas ruedas delanteras	Ø19 cm
Medidas ruedas traseras	Ø19 cm
Ancho ruedas delanteras	3 cm
Ancho ruedas traseras	3 cm
Tipo de ruedas	Macizas
Número de ruedas delanteras	2
Número de ruedas traseras	2

Otras características

Cesta	Cesta de tela
Medidas cesta (ancho x alto x profundo)	41 x 20 x 22 cm
Portabastones	Sí
Plegable	Sí
Tipo de freno	Freno maneta y bloqueo

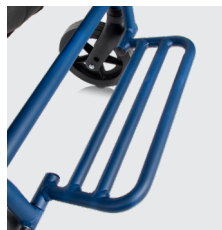

Reposapiés plegable

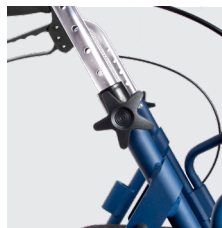

Regulable en altura



Freno de maneta

4. AJUSTES

 No utilice el andador si aparentemente está dañado o le faltan piezas. Contacte con su proveedor.

Para empezar a utilizar el andador, saque el andador de la caja con cuidado. Abrirlo empujando hacia abajo las bisagras del mecanismo de plegado.

Colocar el respaldo y puños:

- **Para colocar el respaldo**, empuje los pins de los laterales del respaldo e insértelo en los soportes de la parte delantera del chasis del andador. El respaldo debe hacer un clic si está bien instalado, los pins deben sobresalir de los agujeros.



- **1 Para colocar los puños**, afloje los tornillos y el pomo de ajuste para colocar los puños en el chasis del andador.
- **2 Ajuste la altura de los puños**, a su altura, de acuerdo a como le haya indicado su fisio o profesional capacitado. Inserte el tornillo en el chasis de modo que la cabeza hexagonal encaje en el agujero de seis caras.

Enrosque el pomo completamente, asegúrese que la cabeza del tornillo queda oculta dentro del chasis.



5. INFORMACIÓN DE USO Y SEGURIDAD

Asegúrese que está bien colocado el respaldo y el reposapiés para utilizarlo como silla de ruedas, y si solamente quiere utilizarlo para sentarse asegúrese que este puesto el freno .

- Nunca sentarse y empujar con los pies.
- No utilizar para subir o bajar escalas, escaleras mecánicas o cintas transportadoras.

Consulte siempre con su médico o terapeuta para determinar el uso y ajuste adecuado de la regulación de la altura para obtener el máximo apoyo y la correcta activación del freno.

Asegúrese que ambos pomos de ajuste de altura estén bien apretados y que los puños están a la misma altura. Pruebe la estabilidad antes de usarlo.

Asegúrese que el andador está completamente abierto, el asiento en posición y las bisagras desplegadas correctamente.

Comprobar que los ajustes de altura sean los correctos y que las ruedas se mueven libremente antes de utilizarlo.

5.1. LÍMITE DE PESO DEL PRODUCTO.

Reemplace las ruedas cuando estén desgastadas o dañadas. Comprar las ruedas delanteras semanalmente para detectar signos de daños.

Suspenda el uso del andador si comprueba que las ruedas están flojas y vuelva al lugar donde las compro para ajustarlo.

No exponer a temperaturas extremas (muy altas o muy bajas), humedad o que se moje, para evitar deformaciones de las piezas de plástico.

Todas las ruedas tienen que estar en contacto con el suelo a la hora de utilizar el andador para que esté equilibrado.

5.2. PARA EVITAR QUE VUELQUE:

- No intente alcanzar objetos si tiene que moverse hacia adelante mientras esté sentado en el andador.
- No cuelgue nada en el andador.
- El respaldo debe estar siempre en su sitio y no está diseñado para soportar todo el peso corporal.
- Si quiere alcanzar o recoger algún objeto debe color ambos pies firmemente en el suelo.
- No añadir más peso al andador cuando esté sentado.
- No use el asiento si se encuentra en un pendiente o terreno irregular.
- La cesta tiene una capacidad de 5 Kg. Y los objetos no deben sobresalir de ella.
- Para frenar el andador temporalmente, presione hacia abajo las dos empuñaduras a la vez.

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Hacer un mantenimiento regular al andador.
- Limpie el chasis con un paño húmedo para quitar la suciedad.
- Guarde el andador en el interior de su hogar por la noche. No lo exponga a aire salado o ambientes hostiles. Si lo expone, comprobar los daños y limpiarlo antes de utilizarlo.
- Semanalmente comprobar las ruedas, si giran correctamente, si no tienen pelusas o algo que afecte a su funcionamiento. El chasis que no esté dañado, que no tenga grietas, ni este desoldado en algún lugar. Que los frenos funcionen de forma óptima. En caso contrario llegar al servicio técnico para su ajuste.

7. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del

correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Andador para exterior A41009F

V6 · 30/08/2023