



Sofá Springfield

Ayudas técnicas

MANUAL DE USUARIO

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo sofá **Springfield**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes del sofá.....	4
2 – Descripción del producto	4
3 – Características del producto.....	5
4 – Uso y montaje.....	6
5 – Mantenimiento.....	6
6 – Garantía	7

1. PARTES DEL SOFÁ



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SOFA RECLINABLE E INCORPORADOR ELÉCTRICO

El sofá individual Springfield cuenta con un mecanismo eléctrico que permite regular la inclinación del respaldo y la elevación de los reposapiés.

Además, permite realizar la función de acompañar al usuario a ponerse de pie por si solo sin la necesidad de hacer un sobre esfuerzo.

Dispone de 1 motor y de un novedoso control remoto con mando incluido.

Presenta un diseño moderno e individual y una gran funcionalidad que lo hace ideal para personas con movilidad reducida al adaptarse perfectamente a sus necesidades.

Dispone de unas dimensiones de 105 cm de alto, 82 cm de profundidad y 80 de ancho que reafirman lo compacto de su diseño. Incluye un mando para regular su inclinación para que se adapte al usuario a la perfección.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total 80 cm

Alto total 105 cm

Profundidad total 82 cm

Peso

Peso máximo soportado 130 kg

Material

Polipiel

Color

Marrón / Negro



Sofá lateral



Sofá elevado reclinable



Cabezal



Reposapiés del sofá

4. USO Y MONTAJE

Uso

4.1. USO DEL CARGADOR

1. Conector para el motor y el cableado.
2. Conector para cableado y adaptador.
3. Conector para el cableado del adaptador y el cableado del enchufe.
4. Conector para el motor y el control manual.



4.2. USO DEL MANDO

El control manual activa los motores del sofá que le permiten sentarse, pararse y reclinarsse.

Luego, los controles manuales para las sillas de motor simple y doble difieren en apariencia y función. Los controles para cada sofá se ilustran a continuación.


Partes del mando del sofá Springfield:



1. Se eleva el sofá o retorno del respaldo.
2. Reclinación del sofá.

Montaje

4.3. MONTAJE DE SU SOFÁ

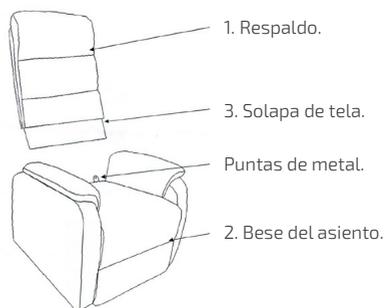

- Inserte el respaldo (1) en las puntas metálicas, tal como se ve en el dibujo.
- Adjunte la solapa de tela con el velcro que hay en el asiento (2).

5. MANTENIMIENTO

- **Seque con un paño todas las partes si se ha mojado el producto.**
- El sofá debe colocarse en un piso plano.
- No use su sofá en ambientes húmedos o polvorientos, ya que puede causar descargas eléctricas o problemas con la máquina. El sofá debe estar en una habitación seca.
- No use su sofá a temperatura ambiente superior a 40°.
- No exponga su sofá a calentadores, estufas ni a la luz solar directa.
- No use el sofá al aire libre. Solamente para uso en interiores. Evite la exposición a la lluvia, nieve, hielo, sal o agua estancada. Mantener y almacenar en un ambiente limpio y seco.
- Cuando su sofá no esté en uso, desconecte el cable de alimentación de la fuente principal para evitar el sobrecalentamiento.
- No descance ni coloque ningún objeto pesado sobre el reposabrazos, el reposapiés o el respaldo del sofá.

- No saltes ni juegues en el sofá.
- No se siente ni se pare en el reposapiés.
- Los niños deben ser supervisados por un adulto al usar el sofá elevador, este sofá no está diseñada para niños.
- Mantenga a las mascotas alejadas cuando la sofá elevadora esté en movimiento.
- La conexión eléctrica debe realizarse de acuerdo con la normativa local.
- No conecte ni desconecte el enchufe de la toma de corriente con las manos mojadas. Puede provocar descargas eléctricas o problemas con la máquina.
- Al desconectar el enchufe, sáquelo sosteniéndolo y no por el cable, y provocará un incendio o una descarga eléctrica.
- No toque la superficie del enchufe inmediatamente después del uso, ya que puede estar muy caliente.

6. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto está defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su número de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.

Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.

Manual de usuario

Sofá Springfield

V3 · 04/05/2022