



9000 - 9000R

Ausili da bagno

MANUALE D'ISTRUZIONE

Ref. BBDPAL9000FB
BBDPAL9000FREFB

Oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPA

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto da **IM by Totalcare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo fa sì che i nostri prodotti offrano le migliori funzionalità, permettendoti di godere di una maggiore libertà e autonomia di cui hai bisogno ogni giorno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. In questo modo potrai familiarizzare con il tuo nuovo banco doccia 9000 e 9000R che ti permetterà di ottenere da esso il massimo delle prestazioni e della vita utile.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti	4
2 — Descrizione	4
3 — Caratteristiche tecniche	5
4 — Installazione e uso.....	6
5 — Manutenzione e pulizia.....	6
6 — Garanzia	7

1. PARTI



2. DESCRIZIONE

SEDIA DOCCIA CON DUE MANIGLIE

La sedia doccia 9000R senza schienale dispone di due maniglie laterali per facilitare la seduta e aiutare la persona a sedersi correttamente.

I puntali in gomma antiscivolo garantiscono stabilità e sicurezza alla persona che usa questa sedia.

SGABELLO PER DOCCIA CON DUE MANIGLIE

Lo sgabello da doccia 9000R è privo di schienale ed è dotato di due maniglie laterali che facilitano il trasferimento sullo sgabello, aiutando l'utente a sedersi correttamente. È dotato di tappetini antiscivolo che garantiscono stabilità e sicurezza alla persona che lo utilizza.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE



9000



9000R

Misure	9000	9000R
Larghezza	49 cm	49 cm
Profondità	44,5 cm	44,5 cm
Altezza totale (regolabile su 5 livelli)	36 - 46 cm	36 - 46 cm
Larghezza della seduta	40 cm	40 cm
Profondità della seduta	33 cm	33 cm

Peso	9000	9000R
Peso total	2,30 kg	2,30 kg
Portata massima	100 kg*	136 kg

Materiale	Plastica e alluminio	Colore	Bianco
-----------	----------------------	--------	--------

4. MONTAGGIO E UTILIZZO



- Assicurarsi di posizionare correttamente i tubi di alluminio come mostrato nella figura 1, do-dodiché. **1**
- Capovolgere la base della sedia e posizionare i tubi trasversalmente. Il tubo con l'incavo si appoggia sulla seduta e sopra questo il tubo più grosso. **2**
- Collocare le rondelle e le corrispondenti viti, al centro e lungo i tubi. **3**
- Inserire i braccioli facendo attenzione ad allineare i fori verso l'esterno, e aggiustare all'altezza desiderata. **4**

9000R

- Posizionare le due barre di metallo a forma di croce. **5**
- le barre alle estremità della sedia con le viti e rondelle rispettive. **6**
- Per posizionare il bracciolo all'altezza desiderata basta premere sulla sfera. **7**
- Il bracciolo deve essere posizionato verso l'esterno. **8**

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Verificare il corretto inserimento dei pezzi prima dell'uso.
 - Quando necessario farsi aiutare per garantire un corretto montaggio.
 - Non utilizzare la sedia su salite o discese. Usare con prudenza su superfici bagnate o scivolose.
 - Assicurarsi di mantenere la stessa altezza di tutte 4 le barre verticali durante il montaggio e la regolazione.
 - Cambiare i puntali in gomma antiscivolo quando questi sono consumati.
 - Trasporto: questo prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, lontano da sostanze corrosive, e lontano dalla pioggia.
 - Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
 - Si raccomanda di smaltire il prodotto secondo le comuni isole ecologiche previste per il riciclo
 - Parti vulnerabili: i puntali in gomma antiscivolo
- ATENCIÓN:** FARE PARTICOLARE ATTENZIONE SE L'USUARIO HA PROBLEMI DI DISABILITÀ AI MEMBRI INFERIORI

6. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIERERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

Simboli grafici



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto.



Codice prodotto.



Numero di serie

Manuale d'istruzione

Sedia da doccia con maniglie 9000 y 9000R

V3 · 15/02/2022