



9000 · 9000R

Ajuda de banho

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. BBDPAL9000FB
BBDPAL9000FREFB

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova **banqueta de duche 9000 e 9000R**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes	4
2 — Descrição	4
3 — Características técnicas	5
4 — Instalação e utilização.....	6
5 — Manutenção e limpeza	6
6 — Garantia	7

1. PARTES DE LA SILLA 9000 Y 9000R



2. DESCRIÇÃO DO CADEIRA 9000 Y 9000R

BANQUETA DE DUCHE COM DUAS PEGAS

A banqueta de duche 9000R é sem costas e tem duas pegas laterais para facilitar a transferência para o banco, ajudando o utilizador a sentar-se corretamente. Tem tapetes antiderrapantes que proporcionam estabilidade e segurança à pessoa que utiliza as banquetas.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



9000



9000R

Medidas	9000	9000R
Largura total	49 cm	49 cm
Profundidade total	44,5 cm	44,5 cm
Altura total (ajustável em altura - 5 níveis)	36 - 46 cm	36 - 46 cm
Largura do assento	40 cm	40 cm
Profundidade do assento	33 cm	33 cm

Peso	9000	9000R
Peso total	2,30 kg	2,30 kg
Peso máximo suportado	100 kg*	136 kg

Material	Plástico e alumínio	Cor	Branco
----------	---------------------	-----	--------

4. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE LA SILLA 9000 Y 9000R



- Certifique-se de que as pernas de ferro estão bem posicionadas como mostra a primeira fotografia, e depois vire-as de cabeça para baixo como mostra a fotografia seguinte. **1**
- Colocar a base da cadeira de cabeça para baixo, colocar as pernas em forma de cruz, a perna com o afundado central vai primeiro e depois a perna mais grossa vai para cima no centro. **2**
- Colocar as anilhas no interior do parafuso de cruz. Colocar o parafuso central com a sua arruela e assim sucessivamente com os parafusos restantes. **3**
- Coloque os apoios de braços, é importante que a direção seja para o exterior e não para o interior, coloque-os à altura que necessita. **4**

9000R

- Posicionar as duas barras de metal e fazer a forma de cruz. **5**
- Colocar as barras nas extremidades da cadeira e colocar os parafusos e as anilhas. **6**
- Para fixar o apoio de braço, pressionar na bola para ajustar o apoio de braço à altura desejada. **7**
- Certifique-se de que o apoio de braço está virado para o exterior, como mostra a imagem. **8**

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Por favor, verifique se todas as peças estão bem presas antes de as utilizar.
- Sugerimos que seja acompanhado por um assistente.
- Não utilizar em rampa. Ter cuidado ao utilizar num local escorregadio.
- Manter a mesma altura de todos os 4 tubos ao ajustar.
- As ventosas nas pernas são feitas de plástico. Por favor, substitua-as quando estiverem desgastados.
- Transporte: Este produto precisa de ser armazenado num ambiente seco, estável, não corrosivo e longe da chuva.
- Limpar o produto com um pano macio e seco.
- Eliminar o produto de acordo com os regulamentos ambientais locais.
- As ventosas são peças vulneráveis.

ATENÇÃO: Cuidado na utilização se os membros inferiores do utilizador estiverem impedidos.

6. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após da compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das directivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da factura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efectuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.
-

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual do utilizador

Banqueta de duche 9000 y 9000R

V3 · 15/02/2022