



# 9040

Ajuda de banho

## MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. BBDPAL9040FB

mais de 50 anos a viver sem limites

### ! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

[info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com)

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DE TOTALCARE EUROPE

# OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova **banqueta de duche 9040**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

# GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

|   |          |
|---|----------|
| <b>1 — Partes .....</b>                   | <b>4</b> |
| <b>2 — Descrição .....</b>                | <b>4</b> |
| <b>3 — Características técnicas .....</b> | <b>5</b> |
| <b>4 — Instalação e utilização.....</b>   | <b>6</b> |
| <b>5 — Manutenção e limpeza .....</b>     | <b>6</b> |
| <b>6 — Garantia .....</b>                 | <b>7</b> |

## 1. PARTES DO CADEIRA 9040



## 2. DESCRIÇÃO DO CADEIRA 9040

### BANQUETA DE DUCHE SEM ENCOSTO

A ajuda de banho 9040 é uma banqueta de duche sem costas com um assento em forma de ferradura para conforto pessoal. Proporciona a máxima estabilidade no duche graças às suas conteiras antiderrapantes.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CADEIRA 9040



9040

Medidas

|   |            |
|---|------------|
| Largura total                                 | 52 cm      |
| Profundidade total                            | 53 cm      |
| Altura total (ajustável em altura - 5 níveis) | 34 - 44 cm |
| Largura do assento                            | 41 cm      |
| Profundidade do assento                       | 37 cm      |


Peso

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Peso total            | 1,80 kg |
| Peso máximo suportado | 100 kg  |

MaterialPlástico e alumínio

CorBranco

## 4. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CADEIRA 9040

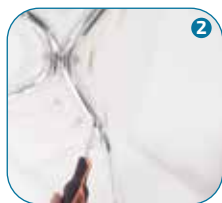

- Colocar os tubos de metal seguindo o desenho da base, colocando primeiro o pau com a maior curvatura e depois o de menor curvatura. ❶
- Aparafusar o cruzamento de ambas as pernas, colocar os objetos redondos cinzentos e depois inserir o parafuso, não esquecer a porca na extremidade do parafuso. ❷
- Enroscar os 6 buracos com os seus parafusos e anilhas. ❸

## 5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CADEIRA 9040

- Por favor, verifique se todas as peças estão bem presas antes de as utilizar.
- Sugerimos que seja acompanhado por um assistente.
- Não utilizar em rampa. Ter cuidado ao utilizar num local escorregadio.
- Manter a mesma altura de todos os 4 tubos ao ajustar.
- Transporte: Este produto precisa de ser armazenado num ambiente seco, estável, não corrosivo e longe da chuva.
- Limpar o produto com um pano macio e seco.
- Eliminar o produto de acordo com os regulamentos ambientais locais.
- Transporte: Este producto necesita ser almacenado en un ambiente seco, estable, no corrosivo y lejos de la lluvia.
- Limpie el producto con un paño suave y seco.
- Desechar el producto según las normativas medioambientales locales

**ATENÇÃO:** Cuidado na utilização se os membros inferiores do utilizador estiverem impedidos.

## 6. GARANTIA DO CADEIRA 9040

### DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

### ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

### PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

### ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

**NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.**

**CONTACTE O SEU FORNECEDOR.**

## Legenda da etiquetagem.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

## Manual do utilizador

Banqueta de duche

V3 · 15/02/2022