



Banqueta de duche 9100 · 9100R

Ajudas de banho

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. BSDPAL9100FB
BSDPAL9100FREFB

mais de 50 anos a viver **sin limites**

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se **com a sua nova** banqueta de duche 9100 y 9100R, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.


mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes	4
2 — Descrição	4
3 — Características técnicas	5
4 — Instalação e utilização.....	6
5 — Manutenção e limpeza	6
6 — Garantia	7

1. PARTES DO CADEIRA 9100

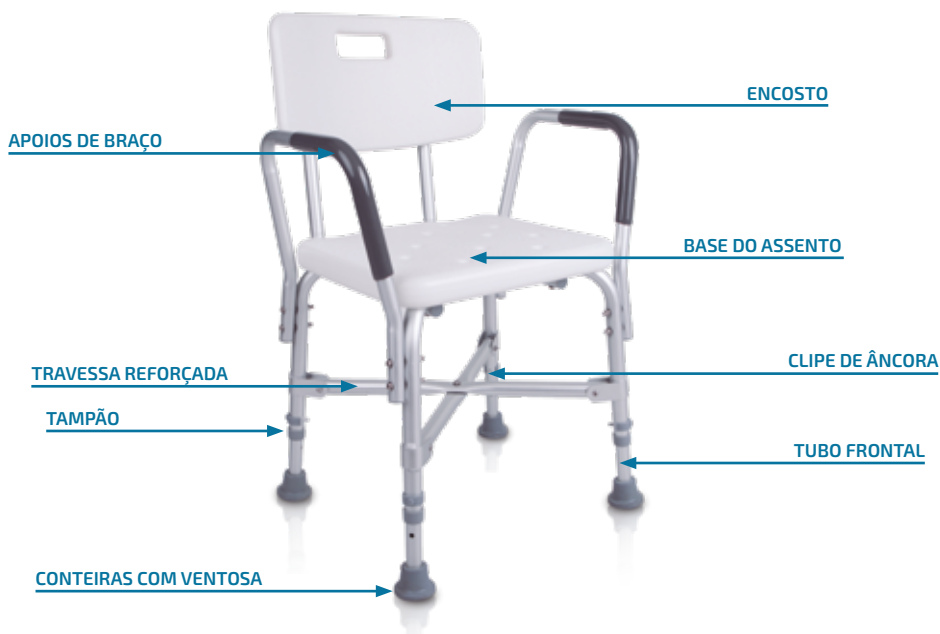

2. DESCRIÇÃO DO CADEIRA 9100 Y 9100/R

CADEIRA DE DUCHE COM APOIOS DE BRAÇOS

A cadeira de duche 9100 com encosto e apoios de braços ajuda a facilitar a higiene pessoal das pessoas com mobilidade reduzida que mantêm um certo nível de estabilidade quando sentadas. Incorpora no final de cada uma das suas pernas um conjunto de conteiras que lhe dão aderência em superfícies molhadas.

CADEIRA DE DUCHE COM APOIOS DE BRAÇOS REFORÇADA

A cadeira de duche 9100/R com encosto e apoios de braços ajuda a facilitar a higiene pessoal das pessoas com mobilidade reduzida que mantêm um certo nível de estabilidade quando sentadas. Incorpora no final de cada uma das suas pernas um conjunto de conteiras que lhe dão aderência em superfícies molhadas.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



9100



9100/R

Medidas	9100	9100/R
Largura total	49 cm	49 cm
Profundidade total	50 cm	50 cm
Altura total (regulable en altura · 5 niveles)	69,5 - 79,5 cm	69,5 - 79,5 cm
Altura do assento ao chão	36 - 46 cm	36 - 46 cm
Largura do assento	40 cm	40 cm
Profundidade do assento	33 cm	33 cm
Largura do encosto	39 cm	39 cm
Altura do encosto	22,5 cm	22,5 cm

Peso	9100	9100/R
Peso total	3,15 kg	3,15 kg
Peso máximo suportado	100 kg	136 kg

Material Plástico e alumínio

Cor Branco

4. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE LA SILLA 9100 Y 9100R



- Colocar a base da cadeira de cabeça para baixo, colocar as pernas em forma de cruz, a perna com o afundado central vai primeiro e depois a perna mais grossa no meio vai por último, colocar os ferros em forma de L no topo das cruces das pernas, colocar os parafusos mais compridos com as suas anilhas nos quatro orifícios visíveis. **1**

- Os quatro orifícios superiores das barras de ferro em forma de L, colocar mais quatro parafusos cruzados com as suas anilhas, é importante não apertar os parafusos até ter colocado os quatro parafusos cruzados. **2**

- Posicione os apoios de braços, é importante que a direcção seja para fora, e não para dentro, posicione-o na altura que necessita. **3**

9100R

- Primeiro, leia o primeiro passo se tiver o 9100R. Coloque as duas barras metálicas e faça uma forma de cruz. **4**
- Colocar as barras nas extremidades da cadeira e encaixar os parafusos com as suas anilhas. **5**
- Posicione os apoios de braços, é importante que a direcção seja para fora, e não para dentro, posicione-o na altura que necessita. **6**

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Por favor, verifique todas as peças quanto a estanqueidade antes de usar.
- Sugerimos que seja acompanhado por um assistente.
- Não utilizar em rampa. Tenha cuidado quando utilizar numa superfície escorregadia.
- Manter a mesma altura de todos os 4 tubos ao ajustar.
- Um "clique" deve ser ouvido quando o apoio de braço e o encosto são instalados.
- As ventosas nas pernas são feitas de plástico. Por favor, substitua-as quando estiverem desgastadas.
- Transporte: Este produto precisa de ser armazenado num ambiente seco, estável, não corrosivo e longe da chuva.
- Limpar o produto com um pano macio e seco.
- Eliminar o produto de acordo com os regulamentos ambientais locais.
- As ventosas são peças vulneráveis.

ATENÇÃO: Cuidado na utilização se os membros inferiores do utilizador estiverem impedidos.

6. GARANTIA DO CADEIRA 9100 Y 9100R

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.
-

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual do utilizador

Banqueta de duche 9100 y 9100R

V3 · 15/02/2022