



9110 · 9110R

Ausili da bagno

MANUALE D'ISTRUZIONE

Ref. BSDPAL9110FB
BSDPAL9110FREFB



Oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPA

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto da IM by Totalcare Europa.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo fa sì che i nostri prodotti offrano le migliori funzionalità, permettendoti di godere di una maggiore libertà e autonomia di cui hai bisogno ogni giorno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. Questo ti permetterà di familiarizzare con la tua nuova sedia da doccia 9110 e 9110R, che ti permetterà di ottenere il massimo delle prestazioni e della vita utile da essa.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti	4
2 — Descrizione	4
3 — Caratteristiche tecniche	5
4 — Installazione e uso.....	6
5 — Manutenzione e pulizia.....	6
6 — Garanzia	7

1. PARTI



2. DESCRIZIONE

SEDIA DOCCIA CON SCHIENALE

La sedia doccia con schienale 9110 è stata progettata per facilitare l'igiene delle persone anziane o con mobilità ridotta, che possono comunque rimanere stabili quando sono sedute, e che conservano un certo grado di movimento.

SEDIA DOCCIA RINFORZATA

L'ausilio per il bagno rinforzato 9110R è una sedia doccia con schienale e maniglie per favorire l'autonomia e stabilità della persona.

Questo modello 9110R offre all'utente il massimo comfort e sicurezza durante la doccia. Inoltre, i puntali antiscivolo la rendono una sedia sicura e stabile.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE



9110



9110R

Misure	9110	9110R
Larghezza totale	51 cm	51 cm
Profondità	47 cm	47 cm
Altezza totale (regolabile su 5 livelli)	73 - 83 cm	78 - 85 cm
Altezza dal pavimento alla seduta	34 - 44 cm	-
Larghezza della seduta	51 cm	51 cm
Profondità della seduta	30 cm	30 cm
Larghezza dello schienale	39 cm	39 cm
Altezza schienale	22,5 cm	22,5 cm

Peso	9110	9110R
Peso total	3 kg	3 kg
Portata massima	100 kg	136 kg

Materiale Plastica e alluminio

Colore Bianco

4. MONTAGGIO E UTILIZZO



- Girate la seduta con la parte inferiore rivolta verso l'alto. Posizionare i tubi trasversalmente facendo attenzione a mettere per primo quello con l'incavo nel mezzo e sopra esso il secondo tubo più grosso. Figura 1 **1**
- Collocare poi i ferri a forma di L per sostenere lo schienale. Troverete 4 fori per le 4 viti lunghe e le rondelle dietro lo schienale (figura 2) e altre 4 nelle barre posteriori (figura 3). È importante non stringere le viti fino a quando le quattro viti superiori siano in posizione, e ripetere con l'operazione per le 4 viti **2**
- **9110R**
 - Posizionare le due barre di metallo e farle a forma di croce, incastrare le barre alle estremità della sedia e posizionare le viti e le rondelle.4 **3**
 - Montare le barre alle estremità della sedia e fermare con le viti e le rondelle.5 **4**
 - Posiziona l'abbellitore dopo aver posizionato le gambe in ferro in modo da poter scegliere l'altezza che desideri di più. **5**

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Verificare il corretto inserimento dei pezzi prima dell'uso.
- Quando necessario farsi aiutare per garantire un corretto montaggio.
- Non utilizzare la sedia su salite o discese. Usare con prudenza su superfici bagnate o scivolose.
- Assicurarsi di mantenere la stessa altezza di tutte 4 le barre verticali durante il montaggio e la regolazione.
- Cambiare i puntali in gomma antiscivolo quando questi sono consumati.
- Trasporto: questo prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, lontano da sostanze corrosive, e lontano dalla pioggia.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
- Si raccomanda di smaltire il prodotto secondo le comuni isole ecologiche previste per il riciclo
- Parti vulnerabili: i puntali in gomma antiscivolo

ATENCIÓN: Fare particolare attenzione se l'utente ha problemi di disabilità ai membri inferiori

6. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto. È per l'intero territorio nazionale spagnolo.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIERERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

Simboli grafici



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.



Informazioni sul prodotto.



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Codice prodotto.



Numero di serie.

Manuale d'istruzione

Sedia doccia 9110 e 9110R

V3 · 15/02/2022