



9110 · 9110R

Ajudas de banho

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. BSDPAL9110FB
BSDPAL9110FREFB

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas indicadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção em função dos requisitos de fabrico.

O produto deste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Ver o nosso sítio web para o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz significar que os nossos produtos oferecem o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova **cadeira de duche 9110 y 9110R**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes	4
2 — Descrição	4
3 — Características técnicas	5
4 — Instalação e utilização.....	6
5 — Manutenção e limpeza	6
6 — Garantia	7

1. PARTES DO CADEIRA 9110



2. DESCRIÇÃO DO CADEIRA 9110 Y 9110R

CADEIRA DE DUCHE COM ENCOSTO

A cadeira de duche 9110 com encosto foi concebida para facilitar a higiene pessoal das pessoas idosas ou com problemas de mobilidade reduzida, que podem permanecer estáveis quando sentadas e que conservam alguma capacidade de movimento.

BANQUETA DE DUCHE REFORÇADA

A ajuda de banho reforçada 9110R é uma cadeira de duche com um assento com duas pegadas laterais para facilitar o posicionamento do utilizador e um encosto com uma pega na parte superior. Tem uma cinta transversal que a torna uma cadeira muito resistente.

O **9110R** proporciona ao utilizador o máximo conforto e segurança ao tomar banho. Além disso, as conteiras antiderrapantes fazem dela uma cadeira segura e estável para o utilizador.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



9110



9110R

Medidas	9110	9110R
Largura total	51 cm	51 cm
Profundidade total	47 cm	47 cm
Altura total (ajustável em altura · 5 níveis)	73 - 83 cm	78 - 85 cm
Altura do assento ao piso	34 - 44 cm	-
Largura do assento	51 cm	51 cm
Profundidade do assento	30 cm	30 cm
Largura do encosto	39 cm	39 cm
Altura do encosto	22,5 cm	22,5 cm

Peso	9110	9110R
Peso total	3 kg	3 kg
Peso máximo suportado	100 kg	136 kg

Material Plástico e alumínio

Cor Branco

4. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CADEIRA 9110 Y 9110R



- Colocar a base da cadeira de cabeça para baixo, colocar as pernas em forma de cruz, a perna com o afundado central vai primeiro e depois a perna mais grossa no meio vai por último. **1**
- Colocar os ferros em forma de L em cima das cruzes das pernas, colocar os parafusos mais compridos com as suas anilhas nos quatro orifícios visíveis. **2**
- Os quatro orifícios superiores das barras de ferro em forma de L, colocar mais quatro parafusos cruzados com as suas anilhas, é importante não apertar os parafusos até ter colocado os quatro parafusos cruzados. **3**

9110R

- Encaixar as duas barras de metal e fazer uma forma cruzada. Ajustar as barras às extremidades da cadeira e encaixar os parafusos e as anilhas. **4**
- Colocar as barras nas extremidades da cadeira e encaixar os parafusos e as anilhas. **5**
- Encaixe os tampões após a colocação das pernas de ferro para que possa escolher a altura que melhor lhe convier. **6**

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Por favor, verifique se todas as peças estão bem presas antes de as utilizar.
- Sugerimos que seja acompanhado por um assistente.
- Não utilizar em rampa. Tenha cuidado quando utilizar numa superfície escorregadia.
- Manter a mesma altura de todos os 4 tubos ao ajustar.
- Um "clique" deve ser ouvido quando se instala o encosto.
- As ventosas nas pernas são feitas de plástico. Por favor, substitua-as quando estiverem desgastadas.
- Transporte: Este produto precisa de ser armazenado num ambiente seco, estável, não corrosivo e longe da chuva.
- Limpar o produto com um pano macio e seco.
- Eliminar o produto de acordo com os regulamentos ambientais locais.
- As ventosas são peças vulneráveis.

ATENÇÃO: Cuidado na utilização se os membros inferiores do utilizador estiverem impedidos.

6. GARANTIA DO CADEIRA 9110 Y 9110R

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.
-

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual do utilizador

Cadeira de duche 9110 y 9110R

V3 · 15/02/2022