



9402 · 9402R

Ajudas de banho

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. BTDPAL9402FB

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz scem que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo **banco de duche 9402 e 9402R**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes	4
2 — Descrição	4
3 — Características técnicas	5
4 — Instalação e utilização.....	6
5 — Manutenção e limpeza	6
6 — Garantia	7

1. PARTES



2. DESCRIÇÃO

BANCO DE DUCHE LEVE E PRÁTICA

O banco de duche 9402 é um assento fixo, ajustável em altura, leve e prático para a pessoa que a utiliza. As suas conteiras antiderrapan-

tes proporcionam ao utilizador estabilidade e segurança ao tomar banho, tornando esta tarefa mais fácil e mais confortável.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



9402



9402R

Medidas

Largura total	35 cm
Profundidade total	35 cm
Altura total (ajustável em altura - 8 níveis)	37 - 55 cm
Largura do assento	32 cm
Profundidade do assento	32 cm

Peso

Peso total	1,50 kg
Peso máximo suportado	100 kg

Material Plástico e alumínio

Cor Branco

4. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO



- Verifique se tem todas as peças antes de realizar a montagem. ①
- Virar a base redonda de cabeça para baixo, colocar as pernas em cruz, a perna com o afundado central vai primeiro e depois a perna mais grossa no meio. Aparafusar todos os orifícios visíveis. ②
- Para encaixar o tampão, colocar a perna primeiro e depois colocar o tampão para definir uma altura, saberá que está colocado quando ouvir um "clique". ④

9402R

- Posicionar as duas barras de metal e fazer uma forma de cruz. Colocar as barras nas extremidades da cadeira e colocar os parafusos e as anilhas. ③

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Por favor, verifique se todas as peças estão bem presas antes de as utilizar.
- Sugerimos que seja acompanhado por um assistente.
- Não utilizar em rampa. Tenha cuidado quando utilizar numa superfície escorregadia.
- Manter a mesma altura de todos os 4 tubos ao ajustar.
- Transporte: Este produto precisa de ser armazenado num ambiente seco, estável, não corrosivo e longe da chuva.
- Limpar o produto com um pano macio e seco.
- Eliminar o produto de acordo com os regulamentos ambientais locais.

ATENÇÃO: Cuidado na utilização se os membros inferiores do utilizador estiverem impedidos.

6. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual do utilizador

Banco de duche 9402 y 9402R

V3 · 15/02/2022