



9401

Ausili da bagno

MANUALE D'ISTRUZIONE

BTDPAL9401GB



Oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato per il modello actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPA

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA

Grazie per aver acquistato un prodotto IM di Total-Care Europe.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo fa sì che i nostri prodotti offrano le migliori funzionalità, permettendoti di godere di una maggiore libertà e autonomia di cui hai bisogno ogni giorno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. In questo modo potrai familiarizzare con il tuo nuovo sgabello doccia 9401, che ti permetterà di ottenere da esso il massimo delle prestazioni e della vita utile.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti	4
2 — Descrizione	4
3 — Caratteristiche tecniche	5
4 — Installazione e uso.....	6
5 — Manutenzione e pulizia.....	6
6 — Garanzia	7

1. PARTI



2. DESCRIZIONE

SGABELLO DA BAGNO GIREVOLE

Lo sgabello da doccia modello 9401 è un ausilio da bagno molto pratico per aumentare la mobilità sotto la doccia grazie al suo sedile girevole. Altezza regolabile su 8 livelli e dotato di puntali

di gomma antiscivolo per maggior stabilità e sicurezza.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE



9401

Misure

Larghezza	29 cm
Profondità	29 cm
Altezza totale (regolabile su 8 livelli)	37 - 56 cm
Diametro della seduta (cuscino)	29,5 cm
Profundità seduta	29,5 cm

Peso

Peso total	1,80 kg
Portata massima	100 kg

Seduta	Girevole	Materiale	Plastica e alluminio	Colore	Bianco e blu
--------	----------	-----------	----------------------	--------	--------------

4. MONTAGGIO E UTILIZZO



- Controllare di avere tutti pezzi prima di iniziare il montaggio (figura 1) **1**
- Posizionare il sedile su una superficie piana con la superficie del sedile rivolta verso il basso. Avvitare le gambe a croce avendo cura di mettere sotto quella con l'incavo centrale. Tra le viti, ne troverete una diversa da tutte le altre e serve appunto a fissare la croce centrale; le altre vi serviranno per i restanti fori di fissazione (2). **2**
- Finalmente collocare le barre/gambe, gli abbellitori e impostare all'altezza desiderata inserendo fino a sentire un clic (figura 3)

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Verificare il corretto inserimento dei pezzi prima dell'uso.
- Quando necessario farsi aiutare per garantire un corretto montaggio.
- Non utilizzare la sedia su salite o discese. Usare con prudenza su superfici bagnate o scivolose.
- Assicurarsi di mantenere la stessa altezza di tutte 4 le barre verticali durante il montaggio e la regolazione.
- Trasporto: questo prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, lontano da sostanze corrosive, e lontano dalla pioggia.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
- Si raccomanda di smaltire il prodotto secondo le comuni isole ecologiche previste per il riciclo.

ATENCIÓN: Fare particolare attenzione se l'utente ha problemi di disabilità ai membri inferiori

6. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDIMENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Simboli grafici



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Codice prodotto



Numero di serie

Manuale d'istruzione

Sgabello da doccia 9401

V3 · 18/02/2022