



PC-20/21

Sedia a rotelle
manuale in acciaio

MANUALE D'USO

Ref: SACPC2



più di 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCcare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose.

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso della nuova sedia a rotelle manuale in acciaio **PC-20/21**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.

più di **50 anni** di vita **senza limiti**

GUIDA RAPIDA.

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 - Parti della sedia.....	4
2 - Descrizione del prodotto	4
3 - Caratteristiche del prodotto	5
4 - Utilizzo	7
5 - Manutenzione	9
6 - Avvertenze	9
7 - Garanzia	10

1. PARTI DELLA SEDIA



2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE IN ACCIAIO PC-20

Robusta sedia a rotelle pieghevole

Semplice, robusta, pieghevole e progettata per durare nel tempo. La sedia a rotelle PC-20 è una sedia manuale in acciaio verniciato con epossidico poliestere, di colore nero, caratterizzata dallo schienale fisso e dalla larghezza della seduta che varia tra 40, 42 e 45 cm. Ha un rivestimento imbottito nero, realizzato in materiale ignifugo con un'elevata capacità di resistere al contatto con la fiamma, impedendo la propagazione del fuoco. I braccioli sono pieghevoli e incorporano una clip di sicurezza che blocca il movimento e facilita il trasferimento dell'utente. I poggiatesta sono rimovibili e possono essere regolati in altezza.

SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE IN ACCIAIO PC-21

Carrozzina con sistema di sgancio rapido

Oltre a essere robuste, le ruote in acciaio del PC-21 offrono il sistema Quick Release, un sistema di sgancio rapido della ruota posteriore che permette di staccare la carrozzina con un semplice clic. Le ruote anteriori sono solide, con un diametro di 200x32 mm e hanno forcelle in metallo che le rendono più resistenti.

Le ruote posteriori sono da 600 mm e possono essere piene o pneumatiche. Grazie alle loro dimensioni, queste ruote sono più stabili per l'utente durante le manovre su superfici instabili e sono anche in grado di autospingersi. Il peso massimo della carrozzina PC-21 è di 120 kg.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



PC-20



PC-21



PC-20 BARIATRICA



PC-21 BARIATRICA

INFORMAZIONI GENERALI

Misure	PC-20	PC-21
Larghezza totale (taglia 36)	51 cm	53,5 cm
Larghezza totale (taglia 38)	55 cm	56 cm
Larghezza totale (taglia 40)	58 cm	58 cm
Larghezza totale (taglia 42)	60 cm	60,5 cm
Larghezza totale (taglia 45)	62 cm	63 cm
Altezza complessiva	91,5 cm	93 cm
Profondità senza poggipiedi	71,5 cm	79 cm
Profondità complessiva	95 cm	103 cm
Larghezza complessiva da chiuso	27 cm	27 cm
Altezza dal sedile al pavimento	50,5 cm	50,5 cm

Peso	PC-20	PC-21
Peso totale	14,95 kg	17,15 kg
Peso senza poggipiedi	13,30 kg	15,40 kg
Peso massimo supportato misure (36, 38, 40, 40, 42 e 45)	120 kg	120 kg

Materiale	Acciaio
-----------	---------

INFORMAZIONI GENERALI
PC-20/21 BARIATRICAS

Misure	PC-20	PC-21
Larghezza totale (taglia 48)	64 cm	67,5 cm
Larghezza totale (taglia 50)	66 cm	69,5 cm
Larghezza totale (taglia 56)	71,5 cm	73 cm
Altezza totale	92 cm	90 cm
Prof. senza poggipiedi	72,5 cm	81 cm
Profondità complessiva	95 cm	103 cm
Larghezza complessiva da chiuso	27 cm	28 cm
Altezza dal sedile al pavimento	50,5 cm	49 cm

Peso	PC-20	PC-21
Peso totale	18,20 kg	20,15 kg
Peso senza poggipiedi	16,60 kg	18,55 kg
Peso massimo supportato dimensioni (48, 50 e 56)	180 kg	180 kg

Colore	Nero
--------	------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sedile

Larghezza del sedile (dimensioni)	36 cm / 38 cm / 40 cm / 42 cm / 45 cm / 48 cm / 50 cm / 56 cm
Profondità del sedile	40 cm
Tipo di sedile	Fisso
Materiale del sedile	Tessuto ignifugo

Braccioli

Larghezza del bracciolo	26,5 cm
Lunghezza bracciolo	Pieghevole
Tipo di bracciolo	5,5 cm

Poggiapiedi

Altezza poggiapiedi (regolabile)	40 a 51 cm
Peso dei 2 poggiapiedi	1,65 kg
Tipo di poggiapiedi	Individuale, regolabile e rimovibile

Schienale

Larghezza dello schienale (dimensioni)	36 cm / 38 cm / 40 cm / 42 cm / 45 cm / 48 cm / 50 cm / 56 cm
Altezza dello schienale	42 cm
Tipo di schienale	Fisso
Materiale dello schienale	Tessuto ignifugo

Ruote

	PC-20	PC-21
Dimensioni della ruota anteriore	Ø 20 cm	Ø 20 cm
Misure delle ruote posteriori	Ø 31,5 cm	Ø 60 cm
Larghezza delle ruote anteriori	3 cm	3 cm
Larghezza delle ruote posteriori	5 cm	3 cm
Tipo di ruote	Solido / Gonfiabile	Solido / Gonfiabile

Altre caratteristiche

Tipo di freno	Blocco dei freni
Tipo di piegatura	Testa a croce singola con 4 stabilizzatori



Reposapiés individuales



Braccioli pieghevoli



Blocco dei freni



Ruota anteriore

4. UTILIZZO

5.1. PER DISPIEGARE LA SEDIA

Posizionare le mani sulla metà anteriore e posteriore dell'imbottitura del sedile e spingere verso il basso per aprire la sedia. Sedia dispiegata.



ATTENZIONE

Quando si apre la carrozzina, non spingere con forza verso il basso il telaio per evitare di danneggiare le parti. Non tenere la carrozzina per i tubi del sedile quando si spinge verso il basso, si rischia di incastrare le dita.

5.2. RIPIEGAMENTO

Per prima cosa, sollevare le pedane e il rivestimento del sedile in modo da poter ripiegare la carrozzina.



5.3 REGOLAZIONE DELLA PEDANA POGGIAPIEDI

Allentare i dadi con una chiave, spostarsi lungo il tubo e regolare la piattaforma nella posizione corretta, quindi bloccare e serrare i bulloni con una chiave in senso orario.



5.4 USO DEI FRENI

L'utente tiene i freni con le mani e, una volta che la carrozzina è ferma, li aziona in modo da bloccare completamente le ruote posteriori.



5.5 SUPERARE GLI OSTACOLI

In caso di ostacolo, l'accompagnatore deve tenere la carrozzina per le maniglie, spingere all'indietro l'estremità del tubo in modo da sollevare le ruote anteriori e superare l'ostacolo.



5.6 BRACCIOLI PIEGHEVOLI

Per ripiegare il bracciolo, premere il fermo per staccare il bracciolo dal supporto del tubo sella, quindi spostare il bracciolo all'indietro. Per riportare il bracciolo nella posizione originale, abbassarlo e innestarlo nel supporto del tubo sella..



5.7 POGGIAPIEDI RIMOVIBILE

Per installare il poggiatesta, posizionarlo prima sul lato destro, inserire il perno, quindi spostare il poggiatesta dall'esterno verso l'interno finché non scatta in posizione; per rimuovere il poggiatesta, è necessario prima spostare il sistema di attivazione verso l'interno, tirarlo verso l'alto, estrarre il poggiatesta e rimuoverlo.



5. MANUTENZIONE

- **La carrozzina non è certificata per i crash test e pertanto non può essere utilizzata per il trasporto in veicoli adattati.**
- Prima di utilizzare la carrozzina, controllare regolarmente che tutte le viti siano serrate e fissate. Se alcune viti sono allentate o mancanti, portare la carrozzina presso un centro di assistenza.
- Per un migliore funzionamento, è necessario aggiungere olio lubrificante alle parti mobili della carrozzina.
- Pulire la carrozzina con un panno morbido e asciutto.
- Mantenere puliti i rivestimenti del sedile e dello schienale per proteggere la pelle dell'utente..

6. AVVERTENZE

- È consigliabile utilizzare la carrozzina su superfici piane, all'interno o all'esterno di una stanza; nei viaggi più lunghi è preferibile che ci sia sempre un accompagnatore che aiuti l'utente in caso di ostacoli.
- La carrozzina ha una portata massima di 120 kg.
- Per utilizzare la carrozzina senza problemi, la velocità dovrebbe essere compresa tra i 3 e i 5 km/h.
- I freni servono a sollevare o abbassare la carrozzina e a fermarla. Non usare i freni quando si è in movimento, soprattutto quando si sale o si scende da un pendio, perché si rischia di ribaltarsi.
- Gli utenti non devono stare in piedi sulle pedane, perché potrebbero ribaltare la carrozzina e cadere.
- Quando si utilizza la sedia a rotelle in pendenza, non inclinarla né girarla improvvisamente.

7. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto da te acquistato è protetto da questa garanzia, a causa del difetto di conformità del cliente che si manifesta entro un periodo di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, da 2 anni a 3 anni, il consumatore dovrà continuare a rivolgersi alla parte venditrice per ottenere la riparazione del difetto di conformità del bene, ma se necessario, l'utente dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso per motivi di fabbricazione e non per uso improprio o mancanza di manutenzione.

L'ambito territoriale della presente Garanzia si estende all'intero territorio nazionale spagnolo. La presente Garanzia non pregiudica i diritti riconosciuti al consumatore in conformità con le disposizioni del Regio Decreto Legge 7/2021, del 27 aprile, che recepisce le direttive dell'Unione Europea a difesa dei consumatori.

PROCEDURA PER RENDERE EFFICACE LA GARANZIA

Affinché la Garanzia abbia effetto, il consumatore dovrà recarsi presso il punto vendita in cui ha acquistato il prodotto, nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, sia perché chiuso, sia perché il prodotto è stato acquistato in un'altra comunità autonoma, è possibile contattare direttamente il produttore tramite e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com.

È indispensabile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o ricevuta d'acquisto, oppure una bolla di consegna successiva alla fattura o ricevuta, riportante chiaramente il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore dovrà consegnare il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato,

accompagnandolo con una nota esplicativa del difetto di conformità.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente non rispettando le istruzioni indicate in questo manuale o causati da altri fattori umani, uso improprio, collisione con qualsiasi oggetto...
- Danni causati da incidenti, abusi, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto che non riporti o il cui numero di serie o di fabbrica sia alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli articoli soggetti ad usura.
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, S.L..

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE APPARE DANNEGGIATO O CON PARTI MANCANTI.

CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE.

SEDIA A ROTELLE MANUALE PIEGHEVOLE PC-20/PC-21

Ideale per la casa. Le ruote posteriori hanno un diametro di 315 mm e rendono i **PC-20** e **PC-21** ideali per l'uso domestico, ospedaliero o di cura.



Etichettatura legenda.



Conformità europea



Dovresti fare riferimento alle istruzioni di utilizzo per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Riferimento prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico conforme al MDR

Manuale d'uso

Sedia a rotelle manuale in acciaio, PC-20/21

V2 · 21/03/2022