



4030 · 4060 · 4080

Camminatori passo-passo

MANUALE DI ISTRUZIONI

Ref. AAL4030C - AAL4060P - AAL4080C

Oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCcare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso del nuovo **camminatore 4030, 4060, 4080**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.


oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti	4
2 — Descrizione	4
3 — Caratteristiche tecniche	5
4 — Montaggio e utilizzo.....	6
5 — Manutenzione e pulizia.....	6
6 — Garanzia	7

1. PARTI

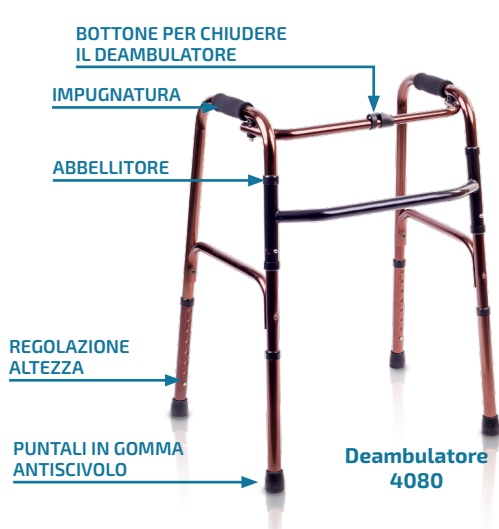

2. DESCRIZIONE

DEAMBULATORI DA INTERNO ED ESTERNO

DEAMBULATORE 4030 PIEGHEVOLE SENZA SEDUTA

Questo deambulatore in alluminio, è un modello pieghevole e molto leggero. Senza ruote segue il movimento del paziente e asseconda meccanicamente la deambulazione trasmettendo sicurezza e stabilità.

DEAMBULATORE 4060 PIEGHEVOLE SENZA SEDUTA

Questo deambulatore fisso-alternativo, modello 4060, può essere usato come deambulatore fisso e deambulatore reciproco (con un solo click).

DEAMBULATORE 4080 FISSO E PIEGHEVOLE

Il deambulatore in alluminio, modello 4080 consente di alzare le barre durante il percorso, evitando superficie sopraelevate e bordi. Il suo semplice sistema di piegatura permette un comodo utilizzo, trasporto e stivaggio. Questo prodotto è disponibile in color rame, e possiede impugnature in neoprene, morbide e confortevoli.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE



4030



4060



4080

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure	4030	4060	4080
Larghezza totale	57,5 cm	56 cm	57 cm
Larghezza tra le ruote posteriori	47,5 cm	48,5 cm	50 cm
Profondità	47 cm	54,5 cm	45 cm
Profondità ripiegato	9 cm	9,5 cm	9,5 cm
Altezza totale (regolabile)	77 - 94,5 cm	78 - 88 cm	75,5 - 93,5 cm

Peso	4030	4060	4080
Peso total	2,45 kg	2,40 kg	2,20 kg
Portata massima	100 kg	100 kg	100 kg

Materiale	Alluminio	Colore	Rame e argento
-----------	-----------	--------	----------------

Altre caratteristiche	4030	4060	4080
Pieghevole	Sì	Sì	Sì
Impugnature	Neoprene	Gomma	Neoprene

4. USO DE SU ANDADOR



- Per ripiegare il deambulatore e sufficiente premere la leva al centro come si vede nella figura 1. **1**
- Per lasciare fisso il deambulatore, è necessario rimuovere l'abbellitore e premere verso il basso (figura 2). Unicamente per il modello 4060. **2**
- Collocare gli abbellitori come descritto nella figura 3 per fissare la chiusura. **3**
- Per regolare l'altezza dei tubi, è necessario premere sulla sfera di alluminio e fare salire o scendere le barre all'altezza desiderata (figura 4). **4**

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Eseguire una manutenzione regolare del deambulatore.
- Pulire il telaio con un panno umido per rimuovere lo sporco.
- Conservare il deambulatore in casa durante la notte. Non esporlo ad aria salmastra o ambienti ostili. Se esposto, verificare la presenza di danni e pulirlo prima dell'uso.
- Controllare settimanalmente le ruote, vedere se girano correttamente, se non hanno sporco o qualsiasi altra cosa che possa interferire con il suo buon funzionamento. Controllare ugualmente che il telaio non sia danneggiato, che non presenti crepe o altri problemi con le saldature. Per ultimo, assicurarsi che i freni funzionino correttamente, altrimenti, contattare il servizio tecnico per la sua regolazione.

6. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE

Simboli grafic.



Conformità Europea



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto di produzione



Codice prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico

Manuale d'istruzione

Deambulatori 4030 · 4060 · 4080

V3 · 08/04/2022