



Andador
4080

Andador
4060

4030 · 4060 · 4080

Andarilhos passo-a-passo

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. AAL4030C - AAL4060P - AAL4080C

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo andarilho **4030, 4060 e 4080**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes do seu andarilho	4
2 — Descrição do seu andarilho	4
3 — Características técnicas	5
4 — Utilização do seu andarilho.....	6
5 — Manutenção e limpeza.....	6
6 — Garantia	7

1. PARTES DO SEU ANDARILHO



DESCRIÇÃO DO SEU ANDARILHO

ANDARILHOS PARA EXTERIOR E INTERIOR

ANDARILHO PASSO-A-PASSO RECÍPROCO E DOBRÁVEL SEM ASSENTO

O andarilho recíproco **4030** é dobrável e muito leve, feito de alumínio, sem rodas e com blocos. Permite-lhe avançar passo a passo, graças ao movimento articulado dos arcos laterais do andarilho, juntamente com o movimento dos pés, sem necessidade de levantar o peso do andarilho.

ANDARILHO PASSO-A-PASSO FIXO E RECÍPROCO DOBRÁVEL SEM ASSENTO

O andarilho fixo recíproco **4060** caracteriza-se por oferecer ao utilizador a sua utilização como andarilho fixo e a possibilidade de mudar para recíproco (em apenas um clique).

ANDARILHO PASSO-A-PASSO FIXO E DOBRÁVEL

O andarilho de alumínio **4080** caracteriza-se por ser dobrável e fixo. Permite-lhe levantar as extremidades do andarilho ao pisar, permitindo-lhe ultrapassar obstáculos como as calçadas. O seu sistema de dobragem fácil torna-o muito fácil de transportar e poupa espaço ao armazenar. Está disponível na cor cobre. As suas pegas, para maior conforto, são cobertas com neoprene.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



4030



4060



4080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas	4030	4060	4080
Largura total	57,5 cm	56 cm	57 cm
Largura entre as rodas traseiras	47,5 cm	48,5 cm	50 cm
Profundidade geral	47 cm	54,5 cm	45 cm
Profundidade dobrada	9 cm	9,5 cm	9,5 cm
Altura total (ajustável)	77 - 94,5 cm	78 - 88 cm	75,5 - 93,5 cm

Peso	4030	4060	4080
Peso total	2,45 kg	2,40 kg	2,20 kg
Peso máximo suportado	100 kg	100 kg	100 kg

Material	Alumínio	Cor	Cobre e Prata
----------	----------	-----	---------------

Outras características	4030	4060	4080
Dobrável	Sim	Sim	Sim
Material das pegas	Neoprene	Borracha	Neoprene

4. UTILIZAÇÃO DO SEU ANDARILHO



- Para dobrar o seu andarilho, prima o botão de dobrar e depois dobre o seu andarilho. **1**
- Para fixar o seu andarilho no lugar, terá de agarrar o tampão. Para o remover, coloque o dedo para baixo e exerça pressão. Esta opção só é aplicável ao andarilho 4060. **2**
- Colocar os fixadores da mesma forma que se mostra na imagem para fixar a dobra. **3**
- Para ajustar a altura dos tubos, pressionar a bola de alumínio e subir ou descer, dependendo de como se deseja. **4**

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Efectuar a manutenção regular do andarilho.
- Limpar a estrutura com um pano húmido para remover a sujidade.
- Armazenar o andarilho dentro de casa à noite. Não o exponha ao ar salgado ou a ambientes agressivos. Se exposto, verificar se há danos e limpar antes de usar.
- Verificar semanalmente as rodas para uma rotação adequada, algodão ou qualquer coisa que afecte o seu funcionamento.
- O chassi não é danificado, rachado, ou soldado em qualquer lugar. Os travões estão a funcionar da melhor forma. Se não for este o caso, os travões devem ser ajustados por um técnico de serviço.

6. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de serie.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Andarilho passo-a-passo 4030 · 4060 · 4080

V3 · 08/04/2022