



9300

Ausili da bagno

MANUALE D'ISTRUZIONE

Ref. BSDPAL9300FB



oltre 50 anni di vita senza limiti



Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPA

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto da IM by Totalcare Europa.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo fa sì che i nostri prodotti offrano le migliori funzionalità, permettendoti di godere di una maggiore libertà e autonomia di cui hai bisogno ogni giorno.

Ti suggeriamo di dedicareprenditi un momento per leggere le istruzioni che forniamo. Questo ti permetterà di familiarizzare con la tua nuova sedia da doccia 9300, che ti permetterà di ottenere il massimo delle prestazioni e della vita utile da essa.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti.....	4
2 — Descrizione.....	4
3 — Caratteristiche tecniche	4
4— Manutenzione e pulizia	5
5 — Installazione e uso.....	6
6 — Garanzia	7

1. PARTI



2. DESCRIZIONE

SEDIA DOCCIA CON SEDUTA A FERRO DI CAVALLO

Il banco doccia modello 9300 con schienale e bracciolo, è concepito per facilitare l'igiene delle persone con problemi di mobilità ridotta, ma che conservano una certa capacità di movimento e un certo grado di stabilità.

La sua struttura in alluminio previene gli effetti della corrosione a causa del suo continuo contatto con l'acqua.

3. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Verificare il corretto inserimento dei pezzi prima dell'uso.
- Quando necessario farsi aiutare per garantire un corretto montaggio.
- Non utilizzare la sedia su salite o discese. Usare con prudenza su superfici bagnate o scivolose.
- Assicurarsi di mantenere la stessa altezza di tutte le 4 le barre verticali durante il montaggio e la regolazione.
- Si deve ascoltare un clic all'inserimento dello schienale.
- Cambiare i puntali in gomma antiscivolo quando questi sono consumati.
- Trasporto: Este producto necesita ser almacenado en un ambiente seco, estable, no corrosivo y lejos de la lluvia.
- Limpiar el producto con un paño suave y seco.
- Desechar el producto según las normativas medioambientales locales.

4.

CARATTERISTICHE TECNICHE

9300



Misure

Larghezza totale	73 cm
Profondità	55 cm
Altezza totale (regolabile su 6 livelli)	79,5 - 89,5 cm
Altezza dal pavimento alla seduta	43 - 53 cm
Larghezza della seduta	68 cm
Profondità della seduta	41 cm
Larghezza schienale	39 cm
Altezza schienale	22,5 cm

Peso

Peso total	4,25 kg
Portata massima	100 kg

Materiale Plastica e alluminio

Colore Bianco

5. MONTAGGIO E UTILIZZO



- Controllare che tutti pezzi siano presenti prima di iniziare il montaggio di questo ausilio (figura 1)
- Rovesciare i tre sedili, uno accanto all'altro e avvitare le due barre di alluminio sopra e sotto. Usare le barre più lunghe con le 6 viti più corte (figura 2).
- Avvitare le due barre piccole a forma di "C" alle estremità, usando per questo le viti più lunghe e fissarle con il corrispondente dado. Le viti vanno inserite nei fori e devono attraversare sia le barre che la struttura a forma di C (figura 3).
- La base della panca da doccia deve risultare come la figura 4.
- Prendere il pezzo grande a forma di C, e con una vite lunga fissarlo a un lato della panca (figura 5)
- Svitare 4 viti continue per poter fissare la base che sorregge lo schienale (figura 6)
- Fissare le barre dello schienale come mostrato nella figura 7, usando le viti lunghe.
- Ripetere l'operazione per la seconda barra (figura 8)
- Avvitare ora lo schienale alle barre usando i 4 fori (figura 9)
- Per ultimo collocare le barre anteriori e posteriori. Appena scattano con un clic le barre sono posizionate correttamente (figura 10).

Nelle immagini 5 e 8, si possono posizionare lo schienale e il bracciolo a destra o a sinistra a seconda delle convenienze personali.

6. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIERERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

Simboli grafici



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.



Informazioni sul produttore.



Data di produzione.



Rappresentante europeo.



Lotto



Codice prodotto.



Numero di serie.

Manuale d'istruzione

Sedia doccia 9300

V3 · 22/04/2022