



4100

Ausili da bagno

MANUALE D'ISTRUZIONE

Ref. BBDPAL4100FG



oltre **50 anni** di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPA

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto da IM by Totalcare Europa.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienzaNel tempo, fa in modo che i nostri prodotti offrano le migliori funzionalità, permettendoti di godere di una maggiore libertà e autonomia di cui hai bisogno ogni giorno.

Ti suggeriamo di dedicareprenditi un momento per leggere le istruzioni che forniamo. In questo modo potrai prendere dimestichezza con il tuo nuovo scopino da bagno 4100, che ti permetterà di ottenere da esso il massimo delle prestazioni e della vita utile.


oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodo-

1 — Parti.....	4
2 — Descrizione.....	4
3 — Caratteristiche tecniche	5
4 — Montaggio e uso.....	6
5 — Manutenzione e pulizia	6
6 — Garanzia	7

1. PARTI

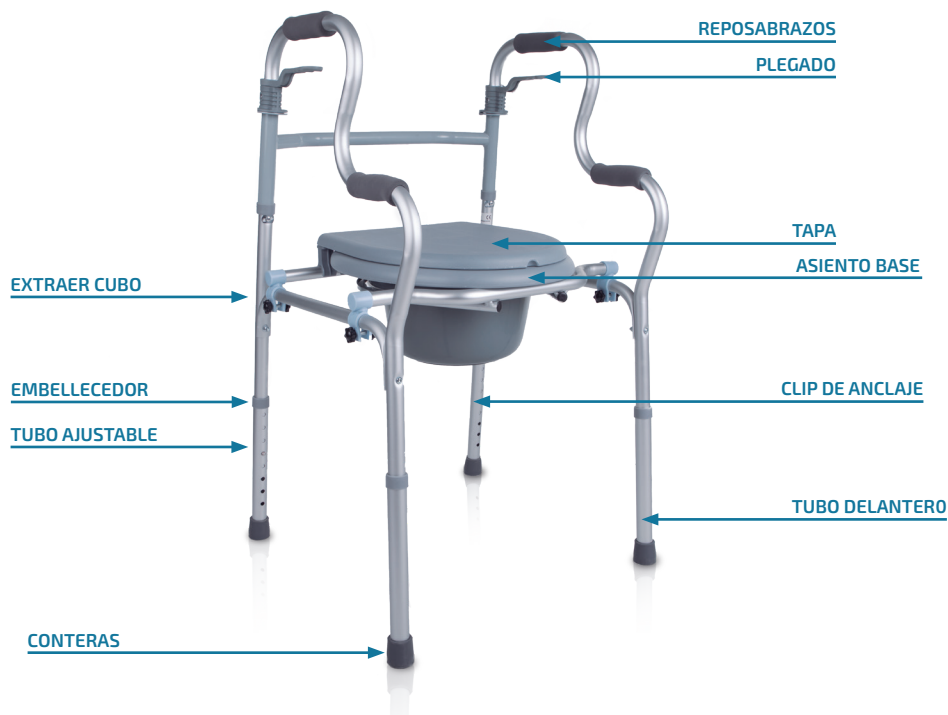

2. DESCRIZIONE

DEAMBULATORE E SEDIA WC

L'ausilio per il bagno 4100 è un deambulatore e sedia WC, per offrire più comfort e sicurezza quando si va in bagno.

Possiede quattro impugnature ergonomiche, un secchio rimovibile e puntali antiscivolo per garantire stabilità e protezione durante il suo utilizzo.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE



Misure

Larghezza totale	55 cm
Profondità totale	53 cm
Altezza totale (regolabile su 8 livelli)	64 - 82 cm
Altezza dal pavimento alla seduta	47 - 65 cm
Larghezza della seduta	39 cm
Profondità della seduta	40 cm
Larghezza schienale	46 cm
Larghezza di apertura per il secchiello	22 cm
Profondità del secchiello	25 cm

Peso

Peso total	4,40 kg
Peso senza WC	4,10 kg
Portata massima	100 kg

Materiale	Plastica e alluminio	Colore	Grigio
-----------	----------------------	--------	--------

4. MONTAGGIO E UTILIZZO



- Posizionare le gambe del telaio, e tirando delle manovelle come si mostra nella figura 1, fare un leggero movimento verso l'alto, con entrambe le mani, per aprire la struttura.
- Posizionare il secchiello e il copriwater e agganciarla al telaio (figura 2).
- Avvitare con le vite e le rondelle fornite. Per ultimo, collocare gli abbellitori e regolare l'altezza desiderata, e inserire i puntali antiscivolo.

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Verificare il corretto inserimento dei pezzi prima dell'uso.
 - Quando necessario farsi aiutare per garantire un corretto montaggio.
 - Non utilizzare la sedia su salite o discese. Usare con prudenza su superfici bagnate o scivolose.
 - Assicurarsi di mantenere la stessa altezza di tutte le barre verticali durante il montaggio e la regolazione.
 - Cambiare i puntali in gomma antiscivolo quando questi sono consumati.
 - Trasporto: questo prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, lontano da sostanze corrosive, e lontano dalla pioggia.
 - Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
 - Si raccomanda di smaltire il prodotto secondo le comuni isole ecologiche previste per il riciclo
 - Parti vulnerabili: i puntali in gomma antiscivolo
- ATENCIÓN:** Fare particolare attenzione se l'utente ha problemi di disabilità ai membri inferiori

6. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIERERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarti del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

Simboli grafici



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione.



Rappresentante europeo



Lotto



Codice prodotto



Numero di serie

Manuale d'istruzione

Deambulatore e sedia WC 4100

V4 · 22/04/2022