



**9150**

Ausili da bagno

**MANUALE D'USO**

Ref. BSDPAL9150FG

più di **50 anni** di vita **senza limiti**

**! Nota importante**

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato per il modello actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

[info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com)

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DA TOTALCARE EUROPA

# TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto da **IM by Totalcare Europe**.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo fa sì che i nostri prodotti offrano le migliori funzionalità, permettendoti di godere di una maggiore libertà e autonomia di cui hai bisogno ogni giorno.

Si consiglia di leggere attentamente le istruzioni fornite. In questo modo prenderete confidenza con la vostra nuova poltrona da **doccia 9150** e potrete ottenere il massimo delle prestazioni e della durata.


più di **50 anni** di vita **senza limiti**

# INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

<b>1 — Parti .....</b>	<b>4</b>
<b>2 — Descrizione .....</b>	<b>4</b>
<b>3 — Caratteristiche tecniche .....</b>	<b>5</b>
<b>4 — Installazione e uso .....</b>	<b>6</b>
<b>5 — Manutenzione e pulizia.....</b>	<b>6</b>
<b>6 — Garanzia .....</b>	<b>7</b>

## 1. PARTI

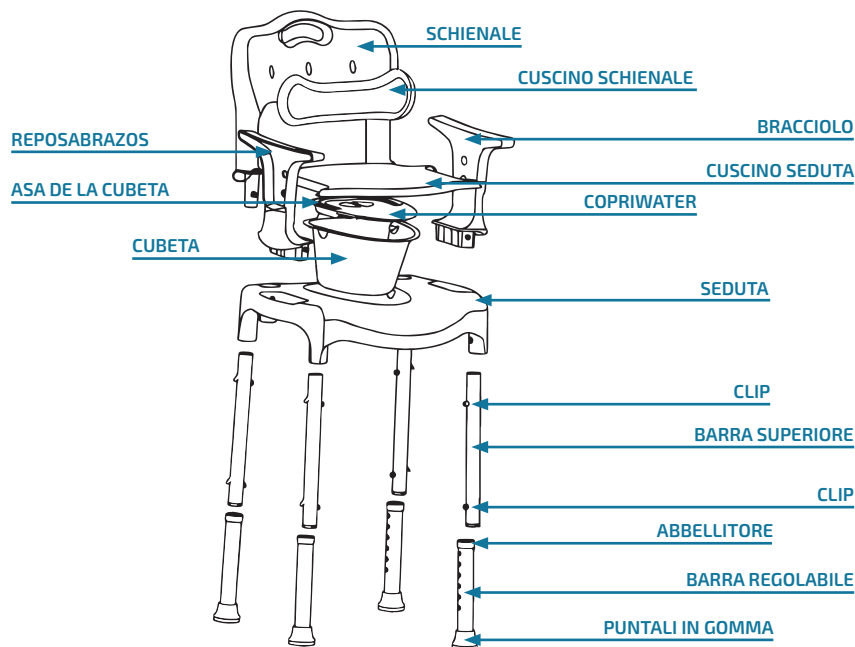

## 2. DESCRIZIONE

### SEDIA WC MULTIUSO

L'ausilio da bagno modello 9150 è una sedia versatile e multiuso che può essere usata come sedia da toilette o come sedia da doccia.

I braccioli e lo schienale sono rimovibili, ciò che permette di usarla anche come sgabello da bagno. L'altezza regolabile su 6 livelli la rende confortevole e adattabile alle necessità della persona.

### 3. CARATTERISTICHE TECNICHE



**Medidas**

Larghezza totale	53 cm
Profondità totale	46 cm
Altezza totale (regolabile su 6 livelli)	75 - 88 cm
Altezza dal pavimento alla seduta	42 - 55 cm
Larghezza della seduta	39 cm
Profondità della seduta	43 cm
Larghezza schienale	43 cm
Altezza schienale	20 cm

**Peso**

Peso total	5 kg
Portata massima	100 kg

Materiale	Plastica e alluminio	Colore	Bianco y gris
-----------	----------------------	--------	---------------

## 4. MONTAGGIO E UTILIZZO



- Inserire le 4 barre inferiori negli angoli inferiori della seduta. Assicurarsi di ascoltare un click per garantire il corretto montaggio. (figura 1).
- Procedere nello stesso modo per inserire i braccioli e lo schienale alla base superiore della seduta (figura 2).
- Posizionare il cuscino della seduta e quello dello schienale (figura 3 e figura 4).
- Collocare le parti del secchiello nell'apposito incavo (figura 5).
- Se utilizzato come sedia WC sollevare il cuscino della seduta e il copriwater.
- Se utilizzata come sedia da doccia, rimuovere il secchiello.
- Per smontare i braccioli e lo schienale, premere la clip di sicurezza sotto il bracciolo o lo schienale, e tirare fino a rimuoverli.
- Per regolare l'altezza della sedia, spingere la clip di sicurezza con una mano, tenere la barra regolabile inferiore e muovere il tubo verticalmente.
- Questo ausilio ha 6 punti livelli di altezza.
- Assicurarsi che la clip si alloggia perfettamente nel foro.

## 5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Verificare il corretto inserimento dei pezzi prima dell'uso.
  - Quando necessario farsi aiutare per garantire un corretto montaggio.
  - Non utilizzare la sedia su salite o discese. Usare con prudenza su superfici bagnate o scivolose.
  - Assicurarsi di mantenere la stessa altezza di tutte le barre verticali durante il montaggio e la regolazione.
  - Cambiare i puntali in gomma antiscivolo quando questi sono consumati.
  - Trasporto: questo prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, lontano da sostanze corrosive, e lontano dalla pioggia.
  - Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
  - Si raccomanda di smaltire il prodotto secondo le comuni isole ecologiche previste per il riciclo.
  - Parti vulnerabili: cuscini e puntali in gomma antiscivolo
- ATTENZIONE:** Fare particolare attenzione se l'utente ha problemi di disabilità ai membri inferiori

## 6. GARANZIA

### DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

### COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

### PROCEDURA PER RICHIERERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com) che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

### QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

**NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.**

**CONTATTA IL TUO FORNITORE.**

## Simboli grafici



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione.



Rappresentante europeo



Lotto



Codice prodotto.



Numero di serie

**Manuale d'uso**

Sedia WC 9150

**V3 · 22/04/2022**