



KD

Ajudas de banho

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. BSDACKDFG



mais de 50 anos a viver sem limites



Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova **cadeira de banho KD**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes	4
2 — Descrição	4
3 — Características técnicas	5
4 — Instalação e utilização	6
5 — Manutenção e limpeza	6
6 — Garantia.....	7

1. PARTES DDA SANITA KD



2. DESCRIÇÃO DA SANITA KD

CADEIRA DE BANHO EM AÇO

A cadeira de banho KD é uma solução confortável, higiênica e segura para todas as pessoas idosas ou com problemas de mobilidade reduzida, que podem utilizá-la como uma sanita improvisada se não puderem utilizar uma sanita tradicional. É feito de aço e foi revestido a pó

para combater os efeitos da corrosão, oferecendo assim uma excelente durabilidade e preservando a sua cor. Além disso, a sua superfície é completamente lisa e muito fácil de limpar.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



KD

Medidas

Largura total	59 cm
Profundidade total	53 cm
Altura total (ajustável em altura - 5 níveis)	83 - 98 cm
Altura do assento ao chão	49 - 64 cm
Largura do assento	43 cm
Profundidade do assento	46 cm
Largura do encosto	42 cm
Altura do encosto	25 cm
Largura da abertura do balde	20 cm
Profundidade da abertura do balde	25 cm

Peso

Peso total	8,60 kg
Peso sem balde	8,30 kg
Peso máximo suportado	100 kg

Material	Aço	Cor	Azul
----------	-----	-----	------

4. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA SANITA KD



- Terá de colocar os tubos da cadeira, colocar primeiro um tubo e, para fixar uma altura, colocar o tampão, repetir esta ação mais três vezes. **1**

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Por favor, verifique se todas as peças estão bem presas antes de as utilizar.
- Sugerimos que seja acompanhado por um assistente.
- Não utilizar numa rampa. Tenha cuidado quando utilizar numa superfície escorregadia.
- Manter a mesma altura de todos os 4 tubos ao ajustar.
- Transporte: Este produto precisa de ser armazenado num ambiente seco, estável, não corrosivo e longe da chuva.
- Limpar o produto com um pano macio e seco.
- Eliminar o produto de acordo com os regulamentos ambientais locais.

ATENÇÃO: Cuidado na utilização se os membros inferiores do utilizador estiverem impedidos.

6. GARANTIA DA SANITA KD

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual do utilizador

Cadeira sanitária KD

V3 · 22/04/2022