



MY SHOW

Ausili da bagno

MANUAL DE USUARIO

Ref. BSDPALMYSHOWGG

Oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCcare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso della nuova sedia doccia **My Show**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.


oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE.

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 – Parti	4
2 – Descrizione	4
3 – Caratteristiche tecniche	5
4 – Installazione e uso	6
5 – Manutenzione e pulizia	6
6 – Garanzia	7

1. PARTI

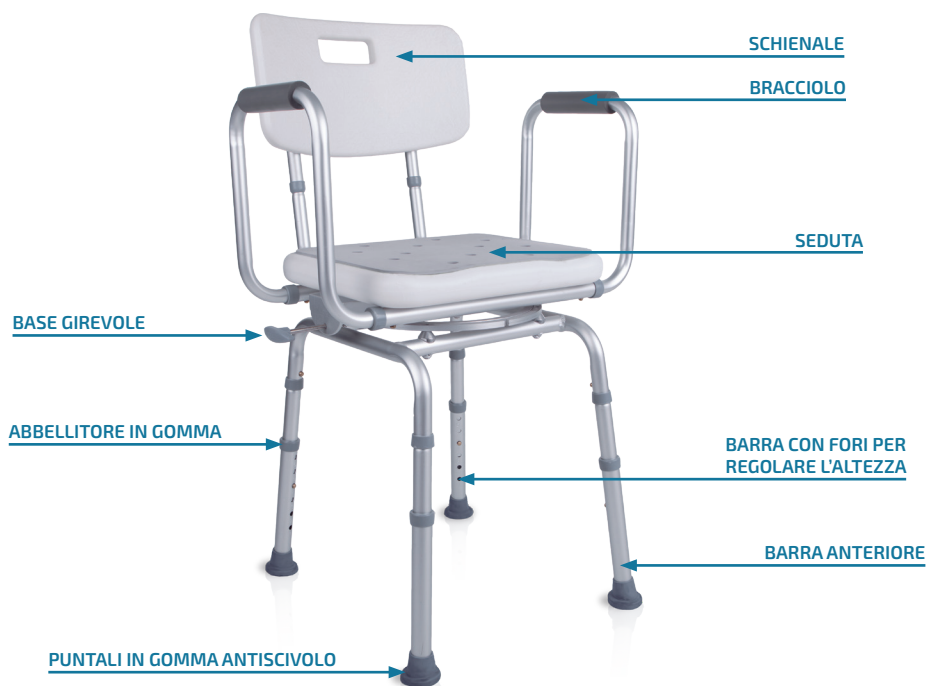

2. DESCRIZIONE

SEDIA DOCCIA GIREVOLE

My Show è una sedia ideale per la doccia o per altre stanze della casa dove realizzare l'igiene di una persona. Uno dei vantaggi di questo ausilio da bagno è poter ruotare 360° sotto la doccia che grazie alla sua seduta girevole.

Questo renderà la tua toilette più pratica e i trasferimenti più sicuri. Grazie ai braccioli e allo schienale rimovibili, le sue misure si riducono rendendolo uno sgabello ideale per bagni piccoli.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Misure

Larghezza totale	56 cm
Profondità totale	56 cm
Altezza totale (regolabile su 6 livelli)	83 - 95,5 cm
Altezza di seduta al pavimento	48,5 - 60,5 cm
Llarghezza di seduta	40 cm
Profondità di seduta	34 cm
Larghezza schienale	39 cm
Altezza schienale	22,5 cm

Peso

Peso	4,25 kg
Peso portata	100 kg

Materiale	Plastica e alluminio	Colore	Blanco
-----------	----------------------	--------	--------

4. MONTAGGIO E UTILIZZO



Tutto il montaggio con un "clic"

- Controllare di avere tutti pezzi prima di cominciare il montaggio della sedia. **1**
- Rovesciare la base e inserire i tubi con le gomme e i puntali. **2**
- Pezzo a forma di U corrisponde il bracciolo, posizionatelo ad entrambe le estremità. **3**
- Inserire il pezzo a forma di L sul retro, come mostrato nella figura 5. **4**
- Posizionare Inserire infine lo schienale come mostrato nella figura 5. **5**

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Verificare il corretto inserimento dei pezzi prima dell'uso.
- Quando necessario farsi aiutare per garantire un corretto montaggio.
- Non utilizzare la sedia su salite o discese. Usare con prudenza su superfici bagnate o scivolose.
- Assicurarsi di mantenere la stessa altezza di tutte 4 le barre verticali durante il montaggio e la regolazione.
- Trasporto: questo prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, lontano da sostanze corrosive, e lontano dalla pioggia.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
- Si raccomanda di smaltire il prodotto secondo le comuni isole ecologiche previste per il riciclo.

AVVERTENZA: Fare particolare attenzione se l'utente ha problemi di disabilità ai membri inferiori.

6. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto è garantito da difetti di materiale per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto. Da secondo anno e fino alla fine del terzo 2 anno, dovrà contattare il venditore per ottenere un risarcimento dimostrando che questoprodotto è difettoso a causa della fabbricazione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre per l'intero territorio nazionale spagnolo.

La presente Garanzia non altera i diritti a disposizione del consumatore, secondo le disposizioni del decreto-legge 7/2021, del 27 aprile, dell'Unione Europea per quanto riguarda la protezione ai consumatori

PROCEDURA PER ATTIVARE LA GARANZIA

Per attivare la Garanzia, il consumatore dovrà recarsi presso il punto vendita dove ha acquistato il prodotto.

Nel caso il punto vendita non sia più disponibile, oppure abbia chiuso, o il prodotto sia stato acquistato in un'altra regione, si può rivolgere direttamente al fabbricante usando la e-mailo info@totalcare-europe.com.

Al momento di fare il reclamo, è indispensabile presentare una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, o una bolla di consegna dopo la fattura o la ricevuta, che indichi chiaramente il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore deve consegnare il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato, accompagnato da una nota indicativa del difetto.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da un uso improprio, o montaggio inadeguato, danni causati da altri fattori umani, collisione con altri oggetti.
- Danni causati da incidente, abuso, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi altro evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto senza il suo numero di serie o che questo sia stato cancellato.
- La garanzia non copre gli articoli soggetti a deterioro naturale per l'uso.
- Le riparazioni o la sostituzione di pezzi/parti saràdifettose sarà effettuata solamente da personale qualificato e autorizzato da TotalCare Europe, SL

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

Etichettatura.



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza.



consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.



Informazioni sul produttore.



Data di produzione.



Rappresentante europeo.



Lotto.



Riferimento prodotto.



Numero di serie.

Manuale d'istruzione

Sedia da doccia My Show

V3 · 22/04/2022