



Luna

Cadeira de rodas
manual de alumínio

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SALLUNA

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Ver o nosso website para o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.


Assim poderá familiarizar-se com a sua nova cadeira de rodas **Luna**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes da cadeira	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Características do produto	5
4 — Utilização e montagem	7
5 — Manutenção	9
6 — Aviso	9
7 — Garantia	10



1. PEÇAS DA CADEIRA



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CADEIRA DE RODAS DE ALUMINO

A cadeira de rodas Luna caracteriza-se pelo seu design prático e leve, o que a torna fácil de transportar. Incorpora um cinto abdominal para segurança do utilizador. Proporciona conforto e versatilidade, com apoios de pés dobráveis e apoios de braços dobráveis.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



LUNA

INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total (tamanho 40)	47,5 cm
Largura total (tamanho 44)	51,5 cm
Profundidade total sem apoio para os pés sem anti-volteio (tamanho 40)	70 cm
Profundidade total sem apoio para os pés sem anti-volteio (tamanho 44)	69,5 cm
Profundidade geral	88,5 cm
Largura total dobrada	22 cm
Altura total	87,5 cm
Altura do assento ao chão	45,5 cm

Peso

Peso total (tamanho 40)	7,65 Kg
Peso total (tamanho 44)	7,80 Kg
Peso máximo suportado	100 kg

Material

Alumínio

Cor

Metal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento	39 / 43,5
Profundidade do assento	36 cm
Tipo de assento	Fixo
Material do assento	Tecido anti-fogo

Encosto

Largura traseira (tamanho 40)	38 cm
Largura traseira (tamanho 44)	42 cm
Altura do encosto	39 cm
Tipo de encosto	Fixo
Material del encosto	Tecido anti-fogo

Braços

Comprimento do apoio de braço	26 cm
Largura do apoio de braço	3,5 cm
Tipo de apoio de braço	Dobrando
Material do apoio de braço	Espuma

Apoio para os pés

Tipo de apoio para os pés	Plataforma dobrável
Material do apoio para os pés	Alumínio

Rodas

Medidas das rodas dianteiras	15,5 cm
Medidas das rodas traseiras	20 cm
Largura das rodas dianteiras	2 cm
Largura das rodas traseiras	3 cm
Tipo de rodas dianteiras	Sólido
Tipo de rodas traseiras	Sólido

Outras características

Tipo de travão	Travão de bloqueio
Tipo dobrável	Cruzado simples com 4 estabilizadores



Apoio de braço dobrável



Freio de mão



Cinto de segurança

4. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

4.1. BLOQUEIO DO ENCOSTO

Virar a pega para cima até que se feche no lugar.



4.2. RETIRAR O APOIO PARA OS PÉS

Segurar o exterior do apoio para os pés e puxá-lo lentamente para fora.



4.3. ABERTURA DA ESTRUTURA

Agarrar o exterior do apoio para os pés e puxá-lo lentamente para fora.



4.4. BAIXAR O APOIO DE BRAÇO

Virar o apoio de braço 90° para baixo.



4.6. DOBRAR O ENCOSTO

Pressionar a alavanca e rodar o encosto para baixo.



4.5. DOBRAGEM DA ESTRUTURA E DO APOIO PARA OS PÉS

Segurar o estofo do assento e o apoio para os pés, puxá-los suavemente para cima até a estrutura ser dobrada para baixo.



4.6. LEVANTAR O APOIO PARA OS PÉS

Levantar o apoio para os pés até este entrar em contacto com o cinto para os pés.



4.7. AUTO-BLOQUEIO

Empurrar a pega do travão de estacionamento para cima em modo de auto-bloqueio quando o passageiro sai.



5. MANUTENÇÃO



A cadeira de rodas não é submetida a testes de colisão e, portanto, não pode ser utilizada para transporte em veículos adaptados.

- Verificar se os parafusos estão apertados e a estabilização da estrutura da cadeira de rodas antes da sua utilização.
- Os utilizadores não devem exceder o peso suportado (100Kg).
- Adicionar regularmente um pouco de óleo lubrificante às peças rotativas.
- Ao virar uma curva acentuada, reduzir a velocidade para evitar a inclinação.
- Não se incline para fora da cadeira de rodas, uma vez que isto irá alterar o seu centro de gravidade e poderá causar a sua queda.
- Não se apoiar sobre o apoio para os pés para evitar a inclinação.
- Efectuar limpezas frequentes e desinfecções periódicas.
- Colocar a cadeira de rodas num ambiente seco e ventilado.

6. AVISO

- É aconselhável utilizar a cadeira de rodas em superfícies planas, dentro ou fora de uma sala, em viagens mais longas é preferível que haja sempre um acompanhante para ajudar o utilizador em caso de obstáculos.
- A cadeira de rodas tem uma capacidade máxima de 120kg.
- Para utilizar a cadeira de rodas sem problemas, a velocidade deve ser de 3 a 5km/h.
- Os travões são utilizados para levantar ou baixar, para parar a cadeira de rodas. Não utilizar os travões ao mover-se, especialmente ao subir ou descer uma encosta, há o risco de tombar.
- Os utilizadores não devem ficar de pé sobre os apoios para os pés, podem inclinar a cadeira de rodas e cair.
- Enquanto utilizar a cadeira de rodas numa inclinação, não incline a cadeira de rodas ou vire de repente.

7. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

**NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.
CONTACTE O SEU FORNECEDOR.**

CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO

LUNA

A cadeira de rodas Luna caracteriza-se pelo seu design prático e leve, o que a torna fácil de transportar. Incorpora um cinto abdominal para a segurança do utilizador.



Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Cadeira de rodas manual de alumínio, Luna

V3 · 29/04/2022