



Sofá Springfield

Ausili tecnici

MANUAL D'USO

più di **50 anni** di vita **senza limiti**

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Grazie per aver acquistato un prodotto IM by
TotalCare Europe.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più impegnativi.

L'esperienza maturata nel tempo ha fatto sì che i nostri prodotti offrano le migliori prestazioni, consentendovi di godere sempre più della libertà e dell'autonomia di cui avete bisogno ogni giorno.

Vi suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. In questo modo prenderete confidenza con il vostro nuovo divano **Springfield** e potrete ottenere il massimo delle prestazioni e della durata.

più di **50 anni** di vita **senza limiti**

GUIDA RAPIDA.

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 - Parti del divano	4
2 - Descrizione del prodotto	4
3 - Caratteristiche del prodotto	5
4 - Utilizzo e montaggio	6
5 - Manutenzione	6
6 - Garanzia	7

1. PARTI DEL SOFA



2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DIVANO RECLINABILE E SEDILE ELETTRICO INCORPORATO

Il divano singolo Springfield è dotato di un meccanismo elettrico che consente di regolare la reclinazione dello schienale e l'elevazione dei poggiatesta.

Inoltre, consente all'utente di alzarsi da solo senza dover fare uno sforzo supplementare.

È dotato di 1 motore e di un innovativo telecomando con telecomando incluso.

Ha un design moderno e personalizzato e una grande funzionalità che lo rende ideale per le persone a mobilità ridotta, adattandosi perfettamente alle loro esigenze.

alle loro esigenze.

È alto 105 cm, profondo 82 cm e largo 80 cm, il che conferma la compattezza del suo design. Include un comando per regolare la reclinazione, in modo da adattarsi perfettamente all'utente.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



INFORMAZIONI GENERALI

Misure

Larghezza totale 80 cm

Altezza totale 105 cm

Profondità totale 82 cm

Peso

Peso massimo supportato 130 kg

Materiale

Similpelle

Colore

Marrone / Nero



Divano laterale



Divano lounge reclinabile



Poggiatesta




Poggiatesta per divano

4. USO E MONTAGGIO

Utilizzo

4.1. UTILIZZO DEL CARICABATTERIE

1. Connettore per motore e cablaggio.
2. Connettore per cablaggio e cablaggio adattatore.
3. Connettore per cablaggio adattatore e cablaggio spina.
4. Connettore per motore e pulsantiera.

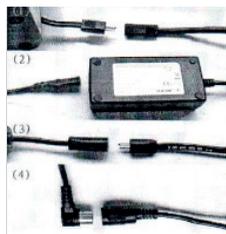


4.2. UTILIZZO DEL TELECOMANDO

La pulsantiera attiva i motori del divano che consentono di sedersi, alzarsi e reclinarsi.

Le pulsantiere delle poltrone a motore singolo e doppio differiscono per aspetto e funzione. I comandi di ciascun divano sono illustrati di seguito.


Parti del controller del divano Springfield:

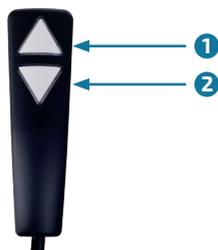

1. Il divano viene sollevato o lo schienale viene riportato indietro.
2. Reclinare il divano.

Montaggio

4.3. MONTAGGIO DEL DIVANO

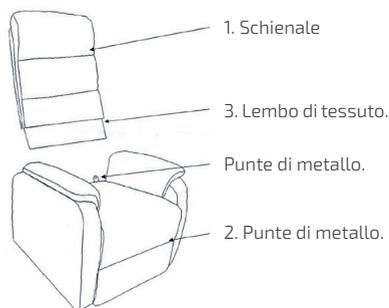

- Inserire lo schienale (1) nei punti metallici come indicato nel disegno.
- Fissare il lembo di tessuto con il velcro sul sedile (2).

5. MANUTENZIONE

- **Se il prodotto è bagnato, asciugare tutte le parti con un panno.**
- Il divano deve essere posizionato su un pavimento piano.
- Non utilizzare il divano in ambienti umidi o polverosi, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche o problemi alla macchina. Il divano deve essere collocato in un ambiente asciutto.
- Non utilizzare il divano in ambienti con temperatura superiore a 40°.
- Non esporre il divano a stufe, fornelli o luce solare diretta.
- Non utilizzare il divano all'aperto. Solo per uso interno. Evitare l'esposizione a pioggia, neve, ghiaccio, sale o acqua stagnante. Conservare e riporre in un ambiente pulito e asciutto.
- Quando il divano non è in uso, scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica per evitare il surriscaldamento.
- Non appoggiare o collocare oggetti pesanti sul bracciolo, sul poggiapiedi o sullo schienale del divano.
- Non saltare o giocare sul divano.

- Non sedersi o stare in piedi sul poggiatesta.
- I bambini devono essere sorvegliati da un adulto quando usano il sollevatore, perché questo divano non è progettato per i bambini.
- Tenere lontani gli animali domestici quando il sollevatore è in movimento.
- Il collegamento elettrico deve essere conforme alle normative locali.
- Non collegare o scollegare la spina dalla presa

di corrente con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o problemi alla macchina.

- Quando si scollega la spina di alimentazione, estrarla tenendola in mano e non dal cavo, per evitare di provocare incendi o scosse elettriche.
- Non toccare la superficie della spina subito dopo l'uso, poiché potrebbe essere molto calda.

6. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto acquistato dall'utente è protetto dalla presente garanzia, per i difetti di conformità del cliente che si manifestino entro un periodo di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi difetto o vizio di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto; dopo 2 anni e fino a 3 anni, il consumatore deve continuare a contattare il venditore per riparare il difetto di conformità del bene, ma, se necessario, l'utente deve dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della fabbricazione e non per uso improprio o mancanza di manutenzione.

L'ambito territoriale della presente Garanzia si estende a tutto il territorio nazionale spagnolo.

La presente Garanzia non pregiudica i diritti a disposizione del consumatore in conformità con le disposizioni del Real Decreto-Lei 7/2021, del 27 aprile, sul recepimento delle direttive dell'Unione Europea in difesa dei consumatori.

PROCEDURA PER RENDERE EFFETTIVA LA GARANZIA

Nel caso in cui non sia possibile comunicare con il punto vendita, perché chiuso o perché il prodotto è stato acquistato in un'altra comunità autonoma, il consumatore può contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com.

Al momento del reclamo è indispensabile presentare una copia della fattura o della ricevuta

d'acquisto, o una bolla di consegna successiva alla fattura o alla ricevuta, che indichi chiaramente il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore deve restituire il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato, accompagnato da una nota che spieghi il difetto di conformità.

LA PRESENTE GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da un uso improprio da parte dell'utente, non rispettando le istruzioni fornite in questo manuale o causati da altri fattori umani, da un uso improprio, dalla collisione con qualsiasi oggetto...
- Danni causati da incidenti, abusi, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi altro evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manomessi da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto che non riporti il numero di serie o di fabbrica o che sia stato alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura.

Le riparazioni o la sostituzione del pezzo difettoso saranno effettuate da personale qualificato e autorizzato da TotalCare Europe, S.L.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE APPARE DANNEGGIATO O MANCANTE DI PARTI.

CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE.

Legenda dell'etichettatura.



Conformidad Europea.



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto.



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Codice prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico

Manuale d'uso

Divano Springfield

V3 · 04/05/2022