



9120-9120R

Ausili da bagno

MANUALE D'ISTRUZIONE

Ref. BSDPAL9120

Oltre 50 anni di vita senza limiti

ⓘ Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPA

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto da IM by Totalcare Europa.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo fa sì che i nostri prodotti offrano le migliori funzionalità, permettendoti di godere di più della libertà e dell'autonomia di cui hai bisogno ogni giorno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. Questo ti permetterà di familiarizzare con la tua nuova sedia da doccia 9120 e 9120R, che ti permetterà di ottenere il massimo delle prestazioni e della vita utile da essa.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**


INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 – Parti	4
2 – Descrizione	4
3 – Caratteristiche tecniche	5
4 – Montaggio e uso	6
5 – Manutenzione e pulizia.....	6
6 – Garanzia	7



1. PARTI

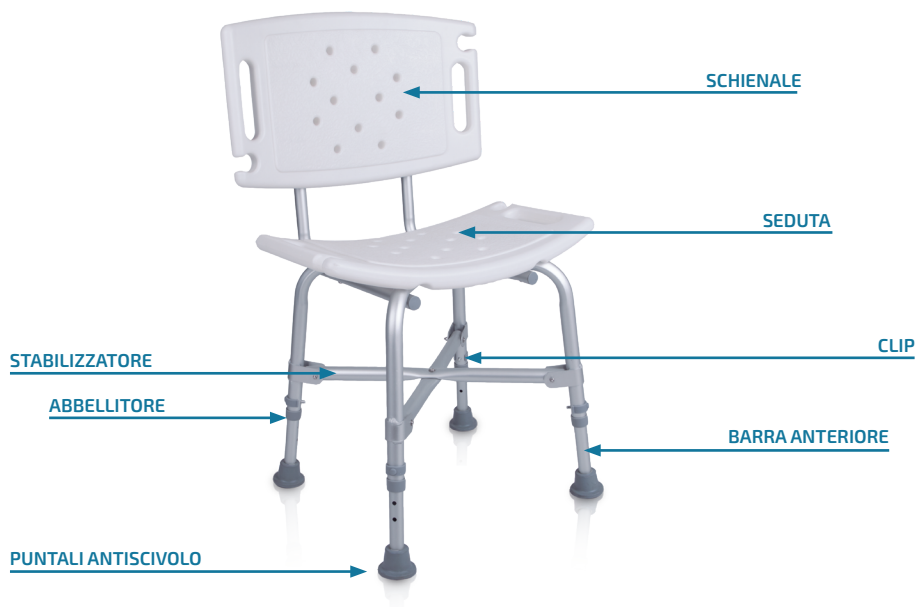

2. DESCRIZIONE

SEDIA DOCCIA CON MANIGLIE

La sedia modello 9120 è una sedia da doccia con schienale e due maniglie laterali, sullo schienale e sulla seduta per facilitare la corretta seduta della persona. Queste particolarità, assieme ai puntali antiscivolo garantiscono massimo comfort e sicurezza durante l'igiene e la doccia.

SEDIA DA DOCCIA CON IMPUGNATURE RINFORZATE

Il modello 9120R è una sedia da doccia con schienale. Con due impugnature laterali sia sullo schienale che sul sedile per facilitare il posizionamento dell'utente. Offre all'utente il massimo comfort e sicurezza durante la doccia. Inoltre, i cuscinetti antiscivolo la rendono una sedia sicura e protetta.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE



9120



9120R

Misure	9120	9120R
Larghezza totale	51 cm	51 cm
Profondità	49,5 cm	49,5 cm
Altezza totale (regolabile su 5 livelli)	75,5 - 85,5 cm	75,5 - 85,5 cm
Altezza dal pavimento alla seduta	35 - 45 cm	35 - 45 cm
Larghezza della seduta	51 cm	51 cm
Profondità della seduta	30 cm	30 cm
Larghezza schienale	50,5 cm	50,5 cm
Altezza schienale	30 cm	30 cm

Peso	9120	9120R
Peso total	3 kg	3 kg
Portata massima	100 kg	136 kg

Materiale Plastica e alluminio

Colore Blu e bianco

4. MONTAGGIO E UTILIZZO



- Prima di iniziare il montaggio, verificare di avere tutte le parti (figura 1)
- Girate la seduta con la parte inferiore rivolta verso l'alto. Posizionare i tubi trasversalmente facendo attenzione a mettere per primo quello con l'incavo nel mezzo e sopra esso il secondo tubo più grosso (figura 2)
- Collocare poi i due ferri a forma di L per sostenere lo schienale e avvitare nei fori dello schienale e della seduta (figure 3 e 4).
- Finalmente, inserire la barra Metti prima il tubo di alluminio e poi posiziona le finiture per regolare l'altezza della tua sedia.5

9120R

- Posizionare le due barre di alluminio sotto la seduta, avvitare usando viti e rondelle, aggiustare all'altezza desiderata e finire con gli abbellitori in plastica.

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Verificare il corretto inserimento dei pezzi prima dell'uso.
- Quando necessario farsi aiutare per garantire un corretto montaggio.
- Non utilizzare la sedia su salite o discese. Usare con prudenza su superfici bagnate o scivolose.
- Assicurarsi di mantenere la stessa altezza di tutte 4 le barre verticali durante il montaggio e la regolazione.
- Cambiare i puntali in gomma antiscivolo quando questi sono consumati.
- Trasporto: questo prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, lontano da sostanze corrosive, e lontano dalla pioggia.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
- Si raccomanda di smaltire il prodotto secondo le comuni isole ecologiche previste per il riciclo
- Parti vulnerabili: i puntali in gomma antiscivolo

ATENCIÓN: Fare particolare attenzione se l'utente ha problemi di disabilità ai membri inferiori

6. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIERERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- A garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

Simboli grafici



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso
per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente
prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione.



Rappresentante europeo



Lotto



Codice prodotto



Numero di serie

Manuale d'istruzione

Sedia da doccia 9120 e 9120R

V3 · 22/04/2022