



Cadeira de sanita 8800 · 8800-U

Ajudas de banho

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. BSDPAL8800

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE **OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.**

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova cadeira de sanita **8800 e 8800U**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes e montagem	4
2 — Descrição	5
3 — Medidas.....	5
4 — Utilização, particularidades e segurança.....	5
5 — Manutenção e limpeza.....	6
6 — Características técnicas	6
7 — Garantia.....	7

1. PARTES E MONTAGEM

1.1 PARTES



1.2 MONTAGEM

Para montar a cadeira de duche, remover cuidadosamente todas as peças da caixa. Depois siga estes passos simples:



ENCOSTO ESTOFADO



4 ANILHAS,
4 PARAFUSOS E
4 PORCAS



BALDE




ESTRUTURA DO ENCOSTO

Para montar a cadeira de duche, remover cuidadosamente todas as peças da caixa. Depois siga estes passos simples:

1. Retirar todas as peças da caixa: 1 armação completa da cadeira de duche, 1 base, 1 arco de encosto, 1 estofado de encosto, 4 anilhas, 4 parafusos e 4 porcas.

2. Na extremidade posterior da cadeira onde os braços se inclinam no ângulo, localizar 4 orifícios, 2 em cada lado da armação. Deslize os 4 parafusos através do encosto e da armação como mostra a figura 1. Na extremidade rosca do parafuso, deslize as 4 anilhas e aperte as 4 porcas como mostra a figura 2

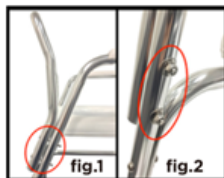

3. Deslize os estofos de encosto para o encosto a partir da abertura inferior dos estofos.



4. Se estiver virado para a cadeira, para colocar o balde deslizar o balde por baixo do assento a partir do lado esquerdo, se estiver atrás da cadeira, deslize-o através do lado direito até o balde bater no pára-choques de borracha na outra extremidade do assento. A borda do balde deve deslizar entre os suportes anterior e posterior e a pega do balde deve ficar virada para a frente ou para trás do balde, como mostrado.



2. DESCRIÇÃO

A cadeira de duche RI-8800 com rodas, feita de alumínio, foi concebida para pessoas com problemas de mobilidade reduzida que precisam de ser transportadas com facilidade e segurança

para a casa de banho, para proceder à sua higiene pessoal ou para a utilizar como sanita, colocando um balde na parte inferior ou colocando-a directamente no WC.

3. MEDIDAS



MEDIDAS

- 1 Altura total: 83 cm
- 2 Profundidade total: 52 cm
- 3 Largura total: 57 cm
- 4 Alturura do encosto: 50 cm
- 5 Profundidade do assento: 40 cm
- 6 Largura do assento: 40 cm
- 7 Diâmetro das rodas: 10 cm

4. UTILIZAÇÃO, PARTICULARIDADES, SEGURANÇA

A **cadeira 8800** apresenta um assento dobrável de alta densidade, acolchoado, em forma de ferradura, para que o utilizador se possa sentir confortável durante a sua utilização e para que possa ser rapidamente limpa após a sua utilização. Fabricada em alumínio anodizado, tornando-a uma cadeira leve e resistente aos efeitos da corrosão e da abrasão, que de outra forma poderia causar contacto directo e contínuo entre a água e a sua estrutura.

Devido à sua altura e forma, pode ser colocado directamente sobre o vaso sanitário, embora o utilizador tenha a opção de colocar um lavatório na parte inferior da cadeira. O assento em forma de ferradura facilita a higiene íntima do utilizador.

Tem dois apoios de braço nos lados para que o utilizador possa ter uma postura confortável e correcta enquanto o utiliza.

O encosto desta cadeira para adultos tem uma altura de 50 cm e é feita de nylon, que pode ser rápida e facilmente removida para lavagem e reposicionamento.

Nunca se sente e empurre com os pés.

Antes de alguém se sentar na cadeira, bloquear as 2 rodas traseiras pisando na parte do bloqueio das rodas que diz "ON" e as rodas já não rodam. Quando a pessoa estiver sentada e estável, desbloquear as 2 rodas pisando, ou empurrando com o pé, a parte do fecho da roda que diz "OFF" e rolar a sanita para o local desejado.

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA



APÓS O DUCHE, LIMPAR TODAS AS PARTES COM UM PANO

- Manutenção regular da cadeira de duche.
- Limpar o chassi com um pano húmido para remover a sujidade.
- Guardar a cadeira dentro de casa à noite. Não o exponha ao ar salgado ou a ambientes agressivos. Se exposto, verificar se há danos e limpar antes de usar.
- Verificar periodicamente se o chassi não está danificado. Se não for este o caso, chamar um técnico de serviço para ajustamento.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura do assento	40 cm	Peso do produto	7,5 kg
Largura total	57 cm	Peso máximo suportado	100 kg
Altura total	83 cm	Material	Plástico e aço
Profundidade do assento	40 cm	Tampa	Si
Altura do encosto	50 cm	Rodas	Si
Apoios de braços	Fijos		

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.
CONTACTE O SEU FORNECEDOR..

8800



8800-U



7. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS. CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual do utilizador

Cadeira de sanita 8800 e 8800-U

V7 · 20/01/2023