



walk&roll IM by TotalCare®

Kit de ruedas de frenado

MANUALE DI ISTRUZIONI

Oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCcare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose.

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso del nuovo **Kit ruota frenante Walk&Roll®**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodo-

1 – Descrizione	4
2 – Istruzioni montaggio	5
3 – Garanzia	6

DESCRIZIONE

KIT RUOTE FRENANTI PER DEAMBU- LATORI WALK&ROLL®

TotalCare Europe presenta le innovative ruote per deambulatori Walk&Roll®.



Le ruote Walk&Roll® sono utilizzate per trasformare il deambulatore da interno a uno per esterni, grazie al suo freno a pressione. Ciò significa che quando premi il deambulatore, la punta si appoggia a terra, frenando il deambulatore, fornendo maggior controllo e sicurezza.

La caratteristica principale di queste ruote è che hanno un freno a pressione regolabile, che consente all'utente di regolare la pressione del freno a proprio piacimento e necessità. Questa caratteristica distingue le ruote Walk&Roll® da altri prodotti simili.

Inoltre, possono essere adattati a molti deambulatori, poiché sono compatibili con tubi da 22, 25 e 30 mm. Venduti con 2 ruote e il necessario per il montaggio.

La qualità e l'originalità di queste ruote sono garantite. Queste ruote sono uniche sul mercato e offrono elevate prestazioni e durata.

- ✓ **2 ruote⁽¹⁾**
- ✓ **2 bulloni passanti⁽²⁾** (50 mm de largo)
- ✓ **2 dadi⁽³⁾** (con llave allen de 5 mm)
- ✓ **1 cacciavite piatto⁽⁴⁾** (para la regulación de presión)
- ✓ **1 chiave allen da 5 mm⁽⁵⁾** (para la fijación de las ruedas)
- ✓ **2 protettori⁽⁶⁾** (para tubo de 22 mm)
- ✓ **2 protettori⁽⁷⁾** (para tubo de 25 mm)
- ✓ **Senza protettori** (para tubo de 30 mm)
- ✓ **Manual de usuario**

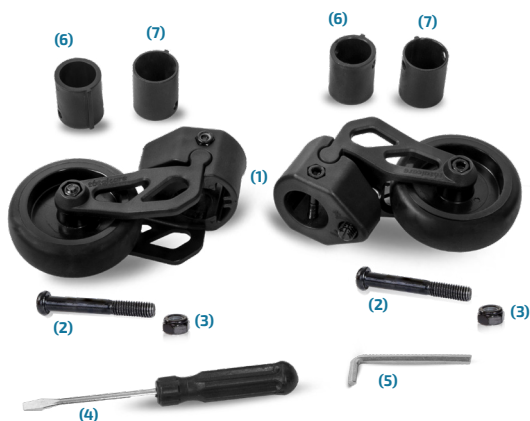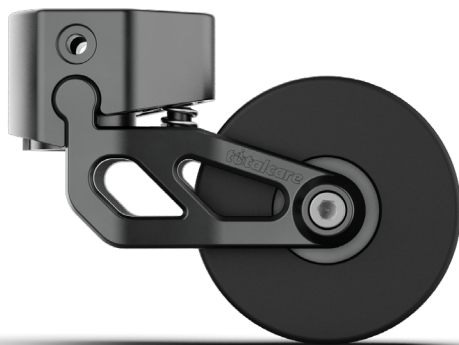

Filmato di montaggio

scannerizza il
codice QR

**Facciamo le cose semplici:
guarda la video e monta le
ruote in
un attimo!**



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Fissare la ruota

1. Rimuovi la punta del deambulatore.
2. Posizionare la ruota Walk&Roll® sul tubo del girello.
3. Mettere la protezione adeguata al diametro del telaio (22 mm o 25 mm). Nel caso di tubi da 30 mm, non sarà necessario aggiungere la boccola.
4. Fissare la ruota con il bullone passante e il dado in dotazione, aiutandosi con la chiave Allen di 5 mm contenuta nella confezione. Nel caso in cui il vostro deambulatore non abbia fori nella parte inferiore del tubo, è necessario praticare un foro con un trapano da 6 mm.



E importante notare che se è necessario un foro per installare le ruote Walk&Roll® sul deambulatore, questo deve essere eseguito da un professionista.

In caso di dubbi sulla perforazione del tubo, contattare il produttore del deambulatore.



Regolare l'altezza e la pressione

Meno pressione

Per ridurre la resistenza e ammorbidire il freno, è necessario ruotare la vite verso sinistra seguendo il simbolo "-". Man mano che la pressione si riduce, le punte del deambulatore si alzano.

Più pressione

Per aumentare la resistenza e rafforzare il freno, è necessario ruotare la vite in senso orario seguendo il simbolo "+". All'aumentare della pressione, le punte del deambulatore diventano meno elevate. È importante regolare la pressione in base alle esigenze e alle preferenze dell'utente per garantire maggiore comfort e sicurezza nell'uso.



Si consiglia di lasciare un'elevazione delle punte da terra di 15 mm.

È importante verificare che entrambe le ruote del deambulatore siano alla stessa altezza per un corretto funzionamento.

Strumento necessario: cacciavite piatto (incluso nella confezione).

GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, daccollisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.

- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.



Simboli grafici.



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto di produzione



Codice prodotto



Numero di serie

Manuale d'istruzione

Walk&Roll

V2 · 29/05/2023