



**4200**  
**FP/FM**

Andarilho para exterior

**MANUAL DO UTILIZADOR**

Ref. AAL4200

mais de 50 anos a viver sem limites

**! Nota importante**

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

**www.totalcare-europe.com**

DE TOTALCARE EUROPE

# OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo andarilho **4200 pressão de travagem e 4200 travão de alavanca de travão**, que lhe permitirá obter o máximo renfimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

# GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

<b>1 — Partes do seu andarilho .....</b>	<b>4</b>
<b>2 — Descrição do seu andarilho .....</b>	<b>4</b>
<b>3 — Características técnicas .....</b>	<b>5</b>
<b>4 — Utilização e montagem do seu andarilho .....</b>	<b>6</b>
<b>5 — Manutenção e limpeza .....</b>	<b>6</b>
<b>6 — Informações sobre utilização e segurança .....</b>	<b>6</b>
<b>7 — Garantia.....</b>	<b>7</b>

## 1. PARTES DO SEU ANDARILHO



## 2. DESCRIÇÃO DO SEU ANDARILHO

### ANDARILHO COM ASSENTO E TRAVÃO DE PRESSÃO OU TRAVÃO DE MÃO

Existem duas versões do andador 4200, uma com um travão de pressão e a outra com um travão de mão.

Caracteriza-se por ser feito de alumínio, um material leve, resistente e muito durável, com um peso de 5,90 kg.

Incorpora um assento confortável com 35 cm de largura e 34 cm de profundidade, sob o qual tem um cesto de roupa opaco, que permite um peso máximo de 8 kg, e uma barra acolchoada para um melhor apoio das costas.

4200 FP



4200 FM



3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas	4200 FP	4200 FM
Largura total	60 cm	61 cm
Largura entre as rodas traseiras	36,5 cm	45 cm
Profundidade geral	61 cm	61 cm
Profundidade dobrada	26 cm	28,5 cm
Altura total (ajustável)	78 - 91 cm	78,5 - 91,5 cm
Peso		
Peso total		5,90 kg
Peso máximo suportado		100 kg
Material	Alumínio	CorAzul
Assento		
Largura do assento		35 cm
Profundidade do assento		34 cm
Altura do assento ao chão		53 cm
Tipo de assento		Dobrável
Material do assento		Acolchoamento
Encosto		
Largura do encosto		46 cm
Tipo de encosto		Fixo amovível
Material de encosto		Barra almofadada
Roda	4200 FP	4200 FM
Medidas das rodas dianteiras	Ø13 cm	Ø13 cm
Medidas das rodas traseiras	Ø13 cm	Ø15,5 cm
Largura das rodas dianteiras	2,5 cm	2,5 cm
Largura das rodas traseiras	2,5 cm	2,5 cm
Tipo de rodas	Maciças	Maciças
Número de rodas frontais	2	2
Número de rodas traseiras	4	2
Outras características	4200 FP	4200 FM
Cesto	Cesto em tecido	Cesto em tecido
Dimensões do cesto (largura x altura x profundidade)	41 x 20 x 22 cm	41 x 20 x 22 cm
Peso máximo do cesto	8 kg	8 kg
Dobrável	Sim	Sim
Tipo de travão	Travão de pressão	Travão de mão

## 4. USO E MONTAGEM DO SEU ANDARILHO



- **Para encaixar o encosto**, empurrar os pinos nos lados do encosto e inseri-lo nos suportes na parte da frente do chassi do andarilho. O encosto deve clicar no lugar, os pinos devem saltar para fora dos buracos.
- Desaperte os parafusos e o botão de ajuste para co-locar as pegas no chassi do andarilho.
- **Ajustar a altura das pegas**, à sua altura de acordo com as instruções do seu fisioterapeuta ou profissional treinado. Inserir o parafuso na armação para que a cabeça hexagonal encaixe no orifício de seis lados. Aparafusar o botão até ao fundo, certificando-se de que a cabeça do parafuso está escondida dentro do chassi
- **Para dobrar o seu andarilho**, terá de levantar o assento, pode deixar ou retirar o saco de tecido. No centro do andarilho, encontrará um tubo de alumínio muito fino, coloque a sua mão por baixo e levante o tubo para dobrar o andarilho. Finalmente, o apoio para os pés deve ser dobrado para melhor dobrar.
- **Para fixar os travões**, coloque a mão no travão e baixe-o, para que o seu andarilho não se mexa.

## 5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Efectuar a manutenção regular do andarilho. Limpar a estrutura com um pano húmido para remover a sujidade.
- Armazenar o andarilho dentro de casa à noite. Não o exponha a ar salgado ou a ambientes hostis. Se exposto, verificar se há danos e limpar antes de usar.
- Verificar semanalmente as rodas para uma rotação adequada, cotão ou qualquer coisa que afecte o seu funcionamento. O chassi não é danificado, rachado, ou soldado em qualquer lugar. Os travões estão em bom estado de funcionamento. Se não for este o caso, os travões devem ser ajustados por um técnico de serviço.

## 6. INFORMAÇÕES SOBRE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

### **Não utilizar o andarilho como cadeira de rodas ou cadeira de transporte.**

Utilizar apenas o assento para ficar quieto. Nunca se sente e empurre com os pés. Não utilizar para subir ou descer degraus, escadas rolantes ou tapetes rolantes.

Assegurar que ambos os botões de ajuste de altura são apertados com segurança e que as pegas estão à mesma altura. Teste de estabilidade antes da utilização.

Assegurar que o andarilho está totalmente aberto, o assento está em posição e as dobradiças estão devidamente desdobradas.

Não expor a temperaturas extremas (muito altas ou muito baixas), humidade ou humidade, para evitar deformações das partes plásticas.

Todas as rodas devem estar em contacto com o solo quando o andarilho está a ser utilizado, para que este seja equilibrado.

## 6.1. PARA EVITAR QUE TOMBE:

- Não tente alcançar objectos se tiver que se mover para a frente enquanto estiver sentado no andarilho. Não pendure nada no andarilho.
- O encosto deve estar sempre no lugar e não foi concebido para suportar todo o peso do seu corpo.
- Se quiser alcançar ou apanhar um objecto, deve colocar ambos os pés firmemente no chão.

- Não adicionar peso extra ao andarilho quando estiver sentado.
- Não utilizar o assento se estiver num declive ou em terreno irregular.
- O cesto tem uma capacidade de 5 kg e os objectos não devem sobressair do cesto.
- Para travar temporariamente o andarilho, cavar em ambas as pegas ao mesmo tempo.

# 7. GARANTIA

## DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

## ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

## PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega pos-

terior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

## ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

**NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.**

**CONTACTE O SEU FORNECEDOR.**

## Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de serie.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

## Manual do utilizador

Andarilho 4200 FP/FM

V2 · 08/04/2022