



Elite

Andarilhos para
interior e exterior



MANUAL DO UTILIZADOR

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo andarilho **Elite**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes do andarilho	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Características do produto	5
4 — Precauções de segurança	7
5 — Utilização e montagem	7
5 — Manutenção e limpeza	9
6 — Garantia	10

1. PARTES DO ANDARILHO

*Andarilho Elite FM



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ANDADOR DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO MUITO LEVE PARA USO INTERIOR

O andarilho **Elite 1G** foi concebido com um sistema de dobragem fácil para um transporte conveniente e um armazenamento interior que poupa espaço.

ANDADOR DE ALUMÍNIO INDOOR COM ASSENTO E ASSENTO FOLDING

O andador sentado **Elite 3G** é ideal para pessoas com mobilidade reduzida, pois incorpora um assento confortável para o utilizador parar e descansar quando necessário.

ANDARILHO COM TRAVÃO DE ASSENTO E DE PRESSÃO OU DE ALAVANCA

Existem duas versões do andador **Elite FP** com quatro rodas traseiras e o **Elite FM** com duas

rodas traseiras. Ambas as versões têm duas rodas frontais giratórias que tornam o movimento mais confortável para guiar o movimento.

ANDADORES DOBRÁVEIS DE ALUMÍNIO PARA INTERIORES

O andarilho **Elite 1G UP** é concebido para pessoas com dificuldades de mobilidade.

É um andador de alumínio dobrável com 2 rodas dianteiras e 2 rodas traseiras. É ideal para utilização em interiores. É rápido e fácil de dobrar, o que poupa espaço e permite que seja armazenado no local desejado quando não está a ser utilizado.

O andarilho **Elite 3G UP** é concebido para pessoas com dificuldades de mobilidade.

É ajustável em altura e pode suportar um peso de até 136 kg. Possui pegas de espuma de qualidade que permitem ao utilizador estar firmemente apoiado quando se levanta, mantendo o equilíbrio e a estabilidade.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



elite 1G



elite 3G

INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total	55 cm
Largura entre conteiras traseiras	43 cm
Profundidade total	58,5 - 64,2 cm
Profundidade dobrável	17 cm
Altura total (ajustável)	78,5 - 97,5 cm

Peso

Peso total	3,80 kg
Peso máximo suportado	136 kg

Material Alumínio

Color Preto

Outras características

Dobrável	Sim
Tipo de travão	Conteiras

INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total	57 cm
Largura entre conteiras traseiras	43 cm
Profundidade total	58 - 64 cm
Profundidade dobrável	22 cm
Altura total (ajustável)	78,5 - 97,5 cm

Peso

Peso total	4,25 kg
Peso máximo suportado	136 kg

Material Alumínio

Cor Preto

Outras características

Plegable	Sim
Tipo de travão	Conteiras
Peso máx. suportado cesto	5 kg

**ELITE^{FP}****INFORMAÇÕES GERAIS**

Medidas	
Largura total	61 cm
Largura entre conteiras traseiras	36 cm
Profundidade total	56,5 - 60,5 cm
Profundidade dobrável	22 cm
Altura total (ajustável)	82 - 96 cm
Peso	
Peso total	6,70 kg
Peso máximo suportado	136 kg
Material	
Alumínio	
Cor	
Preto	

Outras características

Dobrável	Sim
Tipo de travão	Travão pressão
Peso máx. suportado cesto	5 kg

**ELITE^{FM}****INFORMAÇÕES GERAIS**

Medidas	
Largura total	59 cm
Largura entre conteiras traseiras	50 cm
Profundidade total	65 - 69 cm
Profundidade dobrável	29 cm
Altura total (ajustável)	84 - 98 cm
Peso	
Peso total	6,70 kg
Peso máximo suportado	136 kg
Material	
Alumínio	
Cor	
Preto	

Outras características

Dobrável	Sim
Tipo de travão	Alavanca do travão
Peso máx. suportado cesto	5 kg



ELITE 1GUP!

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	
Largura total	57,9 cm
Larg. entre conteiras traseiras	51 cm
Profundidade total	58,5 cm
Profundidade dobrável	33,5 cm
Altouratotal (ajustável)	81 - 95,9 cm
Peso	
Peso total	4,20 kg
Peso máximo suportado	136 kg
Material	
Alumínio	
Cor	
Preto	
Rodas	
Medidas rodas dianteiras	Ø14,5 cm
Largura rodas dianteiras	2 cm
Tipo de rodas dianteiras	Fijas y macizas
Tipo de rodas traseiras	Conteras
Número de rodas dianteiras	2
Outras características	
Dobrável	Sim
Tipo de travão	Alavanca do travão



ELITE 3GUP!

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas	
Largura total	57,9 cm
Larg. entre conteiras traseiras	51 cm
Profundidade total	58,5 cm
Profundidade dobrável	33,5 cm
Altura total (ajustável)	81 - 95,9 cm
Altura do assento ao chão	45,6 - 50,7 cm
Peso	
Peso total	5,85 kg
Peso máximo suportado	136 kg
Material	
Alumínio	
Cor	
Preto	
Rodas	
Medidas rodas dianteiras	Ø14,5 cm
Largura rodas dianteiras	2 cm
Tipo de rodas dianteiras	Fixas y macizas
Tipo de rodas traseiras	Conteras
Número de rodas dianteiras	2
Outras características	
Dobrável	Sim
Tipo de travão	Freno maneta
Tamanho do assento	37 x 24,5 cm
Tamanho do saco	37,5 x 22 x 16 cm

4. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Não permitir que as crianças brinquem com o contendor sem supervisão.

Manter o produto fora do alcance das crianças, não é um brinquedo. As crianças podem ser feridas.

O andarilho deve ser operado próximo do corpo, numa postura o mais erecta possível e virado para a frente.

O andarilho só deve ser utilizado para aquilo para que foi desenvolvido.

A carga máxima do andarilho é de 136 kg.

O andarilho só pode ser utilizado se estiver em perfeitas condições.

Certifique-se antes de cada utilização de que o andarilho está em boas condições de funcionamento. Todos os parafusos devem ser apertados.

O assento do andarilho destina-se apenas a pequenas pausas e não é adequado como cadeira.

Nunca fique de pé sobre o andarilho e não o utilize para transportar pessoas.

A temperatura da superfície do apoio para caminhar deve ser verificada antes de ser utilizado. Em condições climáticas adversas (por exemplo, frio extremo, luz solar directa, água quente ou visitas à sauna), a superfície pode atingir temperaturas perigosas para a saúde.

Utilizar o andarilho apenas em superfícies planas e lisas. Evite esgostos, grades ou obstáculos semelhantes, pois as rodas podem ficar presas.

O andarilho só deve ser utilizado depois de ter sido completamente verificado e na posição desdobrada e bloqueada.

4. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

4.1. UTILIZAÇÃO DE DOBRAGEM E DESDOBRAMENTO

Apenas para *elite 16 elite 16UP! elite 36UP!* Apenas para *elite 36 elite FM elite FP*

- Dobragem:** Puxe a barra dobrável para cima, para que o andarilho se dobre para cima.
- Desdobramento:** Puxar a barra dobrável para baixo, para que o andarilho se desdobre.

Passo 1

Passo 2



- Dobragem:** Dobrar o assento para cima e puxá-lo verticalmente. Isto irá dobrar o andarilho.
- Desdobramento:** Dobrar o assento para baixo e puxá-lo na vertical. Isto irá desdobrar o andarilho.

Passo 1

Passo 2



CUIDADO

Tenha cuidado para não apertar as mãos ao dobrar e desdobrar o andarilho. Risco de ferimentos!

4.2. UTILIZAÇÃO DO AJUSTE DA ALTURA DO ANDARILHO

Utilizar o regulador de altura para ajustar as pegas de ambos os lados à altura desejada. As pegas devem estar à altura do pulso.

Uma vez ajustadas, é importante que ambas as pegas estejam sempre ao mesmo nível.

A altura da pega pode ser ajustada através dos orifícios. Para ajustar a altura, soltar e retirar os parafusos de ambos os lados e ajustar a barra à altura desejada. Fixar os dois parafusos no furo correspondente.



4.3. AJUSTE DA ALTURA DO ASSENTO

Para ajustar a altura do assento, ajustar os tubos dianteiro e traseiro, pressionar a esfera de ajuste e ajustar à altura desejada.

Uma vez ajustados, é importante que tanto as pernas dianteiras como as traseiras estejam sempre ao mesmo nível.



4.4. UTILIZAÇÃO DO TRAVÃO

Apenas para **ELITE^{FM}**

Travão de serviço (ao empurrar): Puxar as alavancas de travão para cima.

Travão de estacionamento (estacionar e usar a função do assento): Carregar nas alavancas de travão para baixo, o andarilho será bloqueado.



4.5. MONTAGEM DO ANDARILHO

Passo 1: Retirar o material da embalagem.

Passo 2: Retirar o chassi e colocar o andarilho à sua frente, baixar a barra de dobragem.

Passo 3: Desdobre a estrutura do andarilho e coloque-a no chão.


Paso 2



Paso 3



Passo 4: Montar os tubos das pernas dianteiras e traseiras à estrutura pressionando-os para dentro. Como este modelo tem duplo ajuste independente da altura do assento e da altura das pegas, ajuste as rodas e/ou as pernas em relação à altura que deseja que o assento esteja.

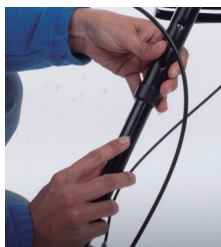

Passo 5: Posicionar a pega e ajustá-la à altura certa, e fixá-la com as pegas.



Solo para: *ELITE³⁶* *ELITE^{FM}* *ELITE^{FP}*

Passo 6: Colocar o encosto sobre a armação pressionando em ambas as bolas de ajuste.



Solo para: *ELITE^{36UP!}* *ELITE^{LITE}*

Passo 7: Para fixar o encosto, orientar a seta de modo a ficar virada para cima, posicionar o encosto e baixar a seta para fixar o suporte do encosto.



CUIDADO

Utilizar o andarilho apenas quando este estiver completamente montado e na posição desdobrada e bloqueada. Antes da utilização, certifique-se de que o produto está em perfeitas condições. Não utilize o andarilho se este apresentar danos visíveis ou se houver qualquer suspeita de que possa estar danificado.

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Assegurar que todo o hardware de fixação esteja sempre seguro.
- **Verificar se os parafusos que fixam o assento à ranhura lateral estão apertados. Caso contrário, aperte-os. Se necessário, contactar imediatamente o local de compra, se necessário.**
- Substituir imediatamente quaisquer peças partidas, danificadas ou desgastadas.
- Limpar as rodas com água morna e um produto de limpeza suave. Limpar com um pano limpo.
- Lubrificar com óleo periodicamente se as rodas começarem a ranger

8. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE HOUVER PEÇAS DANIFICADAS OU EM FALTA.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Conformidade Europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Andarilhos Elite, interior e exterior

V5 · 06/02/2023