



9140

Ausili da bagno

MANUALE D'USO

Ref. BSDPAL9140FB



più di **50 anni** di vita **senza limiti**



Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPA

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto da IM by Totalcare Europa.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo fa sì che i nostri prodotti offrano le migliori funzionalità, permettendoti di godere di una maggiore libertà e autonomia di cui hai bisogno ogni giorno.

Ti suggeriamo di dedicareprenditi un momento per leggere le istruzioni che forniamo. Questo ti permetterà di familiarizzare con la tua nuova sedia da doccia 9140, che ti consentirà di ottenere il massimo delle prestazioni e della vita utile da essa

più di **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti.....	4
2 — Descrizione.....	4
3 — Caratteristiche tecniche	5
4 — Installazione e uso	6
5 — Manutenzione e pulizia.....	6
6 — Garanzia	7

1. PARTI



2. DESCRIZIONE

SEDIA DOCCIA CON SEDUTA A FERRO DI CAVALLO

La sedia doccia modello 9140 con schienale a ferro di cavallo è stata progettata per facilitare l'igiene di persone con mobilità ridotta, ma che conservano la capacità di movimento e un certo grado di stabilità per sedersi.

La sua struttura in alluminio evita gli effetti della corrosione causati dal contatto continuo con l'acqua.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

9140



Misure

Larghezza totale	50,5 cm
Profondità	60 cm
Altezza totale (regolabile su 6 livelli)	70 - 80 cm
Altezza dal pavimento alla seduta	35 - 45 cm
Larghezza della seduta	41 cm
Profondità della seduta	37,5 cm
Larghezza schienale	39 cm
Altezza schienale	22,5 cm

Peso

Peso total	2,70 kg
Portata massima	100 kg

Materiale Plastica e alluminio

Colore Bianco

4. MONTAGGIO E UTILIZZO



- Collocare i tubi metallici seguendo il disegno della base, appoggiando per primo quello con la curvatura più grande. Figura 1.1 **1**
- Avvitare con le viti e le rondelle proporzionate e senza dimenticare di collocare il dado sopra la punta della vite. Figura 2 **2**
- Ripetere l'operazione fino a completare l'uso delle 6 viti. **3**
- Appoggiare le sbarre a forma di L sopra la croce che sostiene le gambe della sedia e avvitare usando le viti più lunghe nei quattro buchi. **4**
- I primi quattro fori delle sbarre a forma di L servono a supportare lo schienale. Avvitare usando le viti a croce e non stringerle individualmente fino a quando non sono tutte e quattro al suo posto. Figura 5 **5**

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Verificare il corretto inserimento dei pezzi prima dell'uso.
- Quando necessario farsi aiutare per garantire un corretto montaggio.
- Non utilizzare la sedia su salite o discese. Usare con prudenza su superfici bagnate o scivolose.
- Assicurarsi di mantenere la stessa altezza di tutte 4 le barre verticali durante il montaggio e la regolazione.
- Cambiare i puntali in gomma antiscivolo quando questi sono consumati.
- Trasporto: questo prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, lontano da sostanze corrosive, e lontano dalla pioggia.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
- Si raccomanda di smaltire il prodotto secondo le comuni isole ecologiche previste per il riciclo
- Parti vulnerabili: i puntali in gomma antiscivolo

ATENCIÓN: Fare particolare attenzione se l'utente ha problemi di disabilità ai membri inferiori

6. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIERERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

Simboli grafici



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo.



Lotto



Codice prodotto.



Numero di serie.

Manuale d'uso

Sedia doccia 9140

V4 · 09/10/2024