



Zoe

Handbike

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SCACZOE300H10N

mais de 50 anos a viver **sem limites**



Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova scooter **Formentera**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

| | |
|---|-----------|
| 1 — Partes da cadeira | 4 |
| 2 — Descrição do Produto | 4 |
| 3 — Características do produto | 5 |
| 4 — Instruções de segurança | 6 |
| 5 — Diagramas | 7 |
| 6 — Utilização e montagem | 8 |
| 7 — Carregamento das baterias | 9 |
| 8 — Regulamento de segurança..... | 9 |
| 9 — Manutenção e limpeza..... | 10 |
| 10 — Recuperação de falhas..... | 10 |
| 11 — Garantia | 11 |

1. PARTES DA CADEIRA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

HANDBIKE POTENTE COM SISTEMA DE ENGATE FÁCIL

A handbike Zoe é um pequeno acessório para cadeira de rodas manual que proporciona liberdade e velocidade quando se desloca ao ar livre. Possui um design e dimensões que facilitam o transporte. Possui luz frontal, buzina e visor digital que indica a distância percorrida e a velocidade. A nova handbike Zoe possui uma anco-

ragem melhorada que permite que a Zoe seja fixada em cadeiras de rodas manuais sem dificuldade. É regulável em altura. Dispõe de uma bateria de lítio de 10 Ah que proporciona uma autonomia de 30 a 35 km, com apenas 7 ou 8 horas de carga completa. Possui um motor 36V 250W que atinge até 20 km/h.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**ZOE HANDBIKE**

INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

| | |
|--------------------|------------|
| Largura total | 18 - 61 cm |
| Profundidade total | 74 cm |
| Altura total | 81 - 91 cm |

Peso

| | |
|------------------|----------|
| Peso totale | 15 kg |
| Peso sem bateria | 11,90 kg |

| | | | |
|-------------|----------|-----|-------|
| Materialais | Alumínio | Cor | Preto |
|-------------|----------|-----|-------|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor

| | |
|--------------------|---------------|
| Motor | 250 W |
| Bateria | 10 Ah (litio) |
| Número de baterias | 1 |
| Autonomia | 30 - 35 km |
| Velocidade máxima | 20 km/h |
| Carregador externo | 2 Ah |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Roda

| | |
|------------------------------|----------|
| Medidas das rodas | Ø 30 cm |
| Largura da roda | 5,5 cm |
| Tipo de roda | Inflável |
| Outros recursos | |
| Buzina | Sim |
| Luzes dianteiras | Sim |
| Marcha-atrás | Sim |
| Dobrado | Sim |
| Rodas anti-tombamento | Sim |
| Tipo de freio | Disco |



Âncora Zoe.



Freios e velocidade.

4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A tração elétrica da cadeira de rodas é um acessório manual da cadeira de rodas. Ao ligar este acionamento elétrico, pode transformar a sua cadeira de rodas manual numa cadeira de rodas elétrica. Uma vez na área pública, será tratado como um transporte/veículo, pelo que também poderão existir riscos de segurança. (Depois de o conduzir em área pública, terá também as propriedades de transporte, pelo que também é possível haver riscos de segurança para todos os modos de transporte).

É necessário saber o seguinte: Uma vez que a tração elétrica de uma cadeira de rodas é conduzida na via pública ou noutros locais públicos, mesmo que esteja em conformidade com a "Lei de Segurança Rodoviária", também podem ocorrer situações perigosas devido à condução não autorizada ou operação incorreta. Quando conduz com tração elétrica mais depressa, a distância de travagem do veículo aumenta proporcionalmente. Em algumas estradas escorregadias ou propensas à chuva, a travagem de emergência pode fazer com que a roda escorregue, aumentando a distância de travagem em conformidade. Por isso, esteja alerta ao conduzir e mantenha a velocidade adequada.


Não seremos responsáveis por qualquer responsabilidade direta ou solidária por qualquer propriedade, perda pessoal, incidente, disputa legal e todos os outros eventos que resultem em conflito de interesses como resultado da violação da "Lei de Segurança no Trânsito Rodoviário".

Não empreste este produto a uma pessoa que não saiba como utilizá-lo em caso de lesões. Seja responsável pela segurança dos seus amigos. Antes de oferecer este produto a um amigo, certifique-se de que o ensina sobre a utilização deste produto e os cuidados relacionados.


Por favor, verifique o produto antes de cada viagem. Se peças evidentes estiverem soltas, a vida útil da bateria for menor, os pneus com fugas ou desgaste excessivo da superfície, som anormal ao rodar, falha dos travões e outras circunstâncias anormais, pare de utilizar imediatamente, não force a direção. Se tiver alguma das situações acima referidas, contacte o seu revendedor local para obter orientação profissional e manutenção.

5. DIAGRAMAS

5.1. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

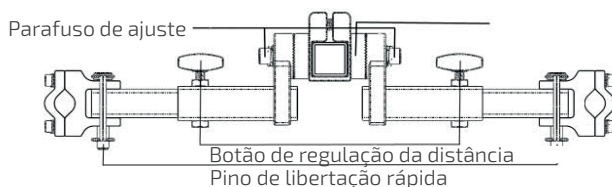

5.2. DIAGRAMA DO GUIADOR

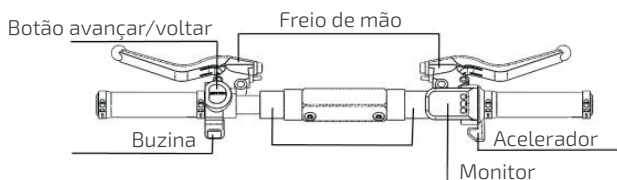

5.3. FUNÇÕES PRINCIPAIS



5.4. RECURSOS DO MONITOR




Função do botão: O funcionamento dos botões divide-se em toque longo e curto, como:

- Pressão longa = ligar; Toque curto = ligar/desligar faróis (desligamento automático após 10 minutos sem funcionamento).
- Botão de mudança de velocidade **ECO MID HIGH**.
- **M** Pressão curta = o monitor mostra ODO/TRIP/VOL.

6. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM


6.1. UTILIZANDO O GUIADOR DOBRÁVEL

Dobre a pega para dentro, o botão do meio do guidão para fechar, ouça um som de "clique".

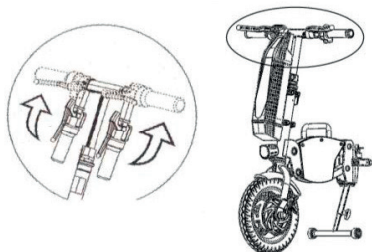


6.2. UTILIZAÇÃO DA ALTURA DO GUIADOR

Coloque a pega numa posição adequada. Em seguida, aperte a chave de ajuste e fixe-a.

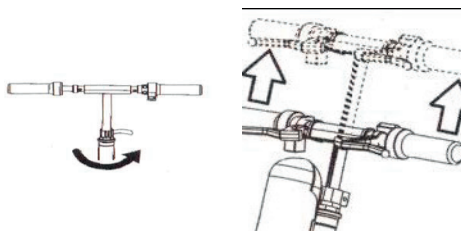

6.3. MONTAGEM DO CORPO


O suporte deve ser inserido no orifício como mostra a figura até ouvir um "clique".

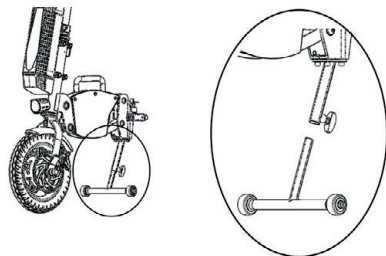

6.4. MONTAGEM DE ÂNCORA


Fixe a âncora à estrutura inferior da cadeira de rodas.

Utilize o botão de distância para ajustar a posição adequada e insira o fecho

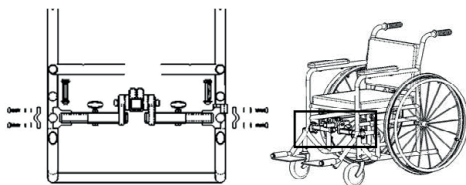


6.5. LIGUE O ACIONAMENTO ELÉTRICO


Eleve o acionamento elétrico até ao mesmo nível da porta de ligação e instale-o.

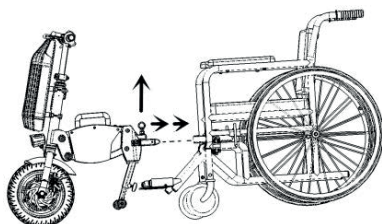

Pressione e mantenha pressionado o botão vermelho para elevar as rodas dianteiras da cadeira de rodas a uma altura adequada do solo. O botão verde baixa e puxa o pino de bloqueio para sair da ligação

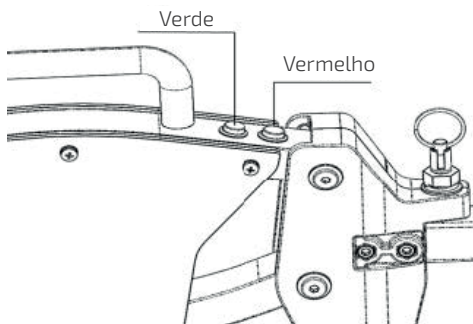

7. CARREGAMENTO DAS BATERIAS

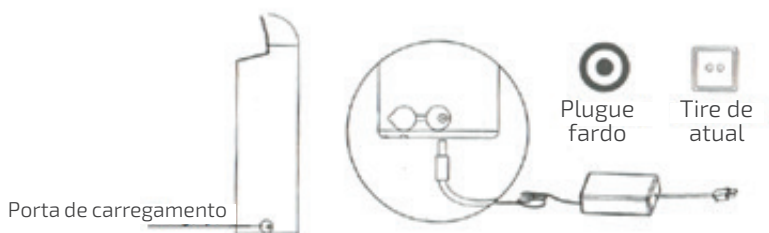

8. REGULAMENTO DE SEGURANÇA

- Ao utilizar o produto, esteja alerta e preste atenção se há pessoas ou coisas por perto para evitar colisões.
- Utilize este produto conforme as instruções.
- Em declives, inclinações horizontais ou obstáculos na estrada, tenha em atenção o impacto da transferência do centro de gravidade.
- Quando atravessar um portão ou uma ponte, certifique-se de que a distância entre os dois lados é suficiente, para que o veículo não colida durante a condução.
- Não sobrecarregue o veículo, o fornecedor não se responsabiliza por danos causados por sobrecarga, impactos ou outra utilização indevida.
- Ao atravessar etapas, peça ajuda a outras pessoas.
- Por favor, obedeça às regras de trânsito quando utilizar o veículo na estrada.
- Por favor, não beba álcool nem conduza sob o efeito de drogas.
- Tenha atenção ao clima e ao trânsito quando sair.
- Não suba colinas de costas.
- Por favor, reduza a velocidade ao virar.
- Ao conduzir tração elétrica, apoie a estrutura.
- Quando andar no escuro, tente usar roupas claras ou refletoras e certifique-se de que o assento tem faixas refletoras em ambos os lados e nas costas.
- Preste atenção e certifique-se de que as faixas refletoras estão limpas e não cobertas por nada. Este produto é apenas para uma pessoa.
- Quando o produto estiver muito tempo estacionado ao ar livre, tenha atenção e cubra-o com um pano para evitar a humidade.
- Em condições muito húmidas e muito frias, a funcionalidade da tração elétrica diminui.
- Desligue o botão de alimentação ao desinstalar o produto.
- Se utilizar pneus com tração elétrica, certifique-se de que estes têm a pressão adequada.

9. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Deve manter a tração da sua cadeira de rodas elétrica, bem como de outros produtos técnicos. Após a manutenção, poderá manter o seu produto nas melhores condições. Siga as seguintes dicas de manutenção.

9.1. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

- Verifique se o pneu está enlameado ou danificado, pois irá prejudicar a utilização do rasgo, limpe-o; Se o pneu estiver danificado, dirija-se ao departamento de manutenção profissional para o reparar.
- Certifique-se de que todos os parafusos estão apertados.
- Ao conduzir, verifique o uso de quebra, se o efeito não for bom, contacte o concessionário.
- Verifique a pressão dos pneus e encha se necessário.

9.2. CADA DOIS MESES

Verifique, lubrifique e ajuste as seguintes peças:

- Eixo e freio.

9.3. CADA SEIS MESES

Confira abaixo de acordo com a frequência de utilização:

- Limpo, estado geral e estado dos pneus.

9.4. LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

- Utilize um pano para limpar a superfície com água quente.
- Remova a sujidade mais dura com um detergente neutro.
- Utilize uma esponja ou escova macia para remover as manchas.
- Não utilize solventes com solventes de limpeza fortes, nem utilize escova dura.
- Não utilize vapor ou pressão para enxaguar

9.5. LIMPEZA DAS PEÇAS PLÁSTICAS

- Utilize apenas uma escova macia ou uma esponja macia e limpe as peças de plástico com um produto de limpeza para peças de plástico.

9.6. LIMPANDO O REVESTIMENTO

- Superfície de alta qualidade pode garantir a melhor resistência à corrosão. Se a superfície exterior estiver riscada ou danificada de outra forma, contacte o revendedor para reparar a superfície afetada.
- Ao limpar, utilize uma escova ou um pano macio, bem como produtos de limpeza domésticos comuns e água morna para garantir que o tubo não se molha.
- A parte galvanizada só deve ser limpa com um pano seco e a sujidade mais persistente pode ser polida com um produto de limpeza para zinco adequado.

10. RECUPERAÇÃO DE FALHAS

| Falhou | Razão do falhanço |
|---|--|
| Não é possível ligar a tração elétrica | O interruptor de alimentação não está ligado. O interruptor da bateria não está ligado. O conector da bateria não está ligado. Falha na bateria. Controlo danificado. Cabo danificado. Mau contacto. |
| Controlo não responde | Controlo danificado. Cabo danificado. Mau contacto. Motor danificado. |
| A bateria não carrega | A bateria não se liga ao carregador. Ficha danificada. Conector danificado. |

11. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto por si adquirido está protegido por esta garantia, devido à falta de conformidade do cliente que se manifeste dentro do prazo de 3 anos a contar da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses a partir da compra do produto, de 2 a 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para obter reparações pela falta de conformidade do bem, mas, utilizador deverá demonstrar que o produto apresenta um defeito de fabrico e não por utilização indevida ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia abrange todo o território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos de à disposição do consumidor de acordo com o disposto no Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de abril, que transpõe as diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA EFETIVAR A GARANTIA

Para a efetivação da Garantia, o consumidor deverá dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido, caso a comunicação com o ponto de venda seja impossível, seja por ter fechado ou porque o produto tenha sido adquirido noutra comunidade autónoma, poderá pode contactar diretamente o fabricante por e-mail para info@totalcare-europe.com.

É indispensável a apresentação de cópia da fatura ou recibo de compra, ou guia de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, onde conste claramente o produto adquirido e a data.

O consumidor deverá entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota explicativa da falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por utilização indevida por parte do utilizador pelo não cumprimento das instruções indicadas neste manual ou causados por outros fatores humanos, utilização indevida, colisão com qualquer objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestades ou qualquer evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manipulados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Caso as peças utilizadas não sejam fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não possua ou tenha o seu número de série ou de fábrica alterado ou apagado.
- A garantia não cobre artigos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizada pela TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Legenda



Conformidade Europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consulte o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu



Lote.



Referência do produto.



Número de série.

Manual d utilizador

Scooter Zoe Handbike

V1 · 19/01/2022