

MARTINIKA

CLASSIC · EVO · IMPULSE



Martinika

Sedia a rotelle elettrica

MANUALE D'USO

SEPALMARTINI

più di 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, poiché possono presentare modifiche progettuali a seconda delle esigenze costruttive.

Il prodotto in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Consulta il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto **IM di TotalCare Europe**.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo significa che i nostri prodotti offrono i migliori vantaggi, permettendoti di godere di più libertà ogni giorno e l'autonomia di cui hai bisogno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. Questo ti permetterà di familiarizzare con la tua nuova sedia a rotelle

elettrica **Martinika** che ti consentirà di ottenere il massimo delle prestazioni e della vita utile da essa.

più di **50 anni** di vita **senza limiti**

GUIDA RAPIDA.

È importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto

1 - Parti della sedia	4
2 - Descrizione del prodotto	4
3 - Caratteristiche del prodotto	5
4 - Utilizzo e montaggio	7
5 - Unità di comando	8
6 - Funzioni dell'unità di comando	8
7 - Motore	9
8 - Trasporto e stoccaggio	9
9 - Batteria e ricarica	10
10 - Consigli per la sicurezza.....	11
11 - Garanzia	14

1. PARTI DELLA SEDIA



2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

UNA SEDIA A ROTELLE ELETTRICA PIEGHEVOLE UNICA NEL SUO GENERE

Martinika Classic è la carrozzina elettrica ideale grazie al suo design moderno, compatto, ergonomico e robusto. Grazie alla facile disconnessione del motore, può essere spinta perfettamente come se fosse una carrozzina manuale. Il motore rimane libero senza applicare alcun tipo di resistenza, consentendo all'accompagnatore di spingere la carrozzina senza alcuno sforzo aggiuntivo. Dispone di due motori da 180W e di una scelta di batterie al litio da 1 x 18Ah o 2 x 18Ah.

Martinika Evo è la grande evoluzione e riprogettazione del passeggino Martinika numero 1, ora più stretto, con una larghezza di soli 59 cm, che consente di accedere facilmente a spazi ridotti come ascensori e corridoi.

Ha il miglior ripiegamento del mercato in quanto può essere ridotto a 31,5 cm di larghezza, in modo da poter essere riposto nel bagagliaio di qualsiasi auto, sotto il letto o anche dietro una porta.

Martinika Impulse fa il suo ingresso nella gamma TotalCare come modello di tendenza. Ora la nota sedia a rotelle Martinika con grandi ruote posteriori permette all'utente di spingersi quando vuole.

Grazie al facile scollegamento del motore, la carrozzina può muoversi perfettamente come se fosse una carrozzina manuale. Il motore rimane libero senza applicare alcun tipo di resistenza, consentendo all'utente di muoversi in totale comodità.

Dispone di due motori da 180W che gli consentono di raggiungere i 6 km/h.

Disponibile con una batteria al litio da 18 Ah o con una batteria da 36 Ah, quest'ultima opzione consente un'autonomia di 30-40 km.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



MARTINIKA
EVO



MARTINIKA
CLASSIC



MARTINIKA
IMPULSE

INFORMAZIONI GENERALI

Medidas	Martinika Evo	Martinika Classic	Martinika Impulse
Larghezza complessiva	59 cm	68 cm	65 cm
Profondità senza roll bar	96 cm	98 cm	-
Profondità con antiribaltamento	96 cm	99 cm	105 cm
Profondità con pedane ripiegate senza antiribaltamento	75,50 cm	77 cm	-
Profondità con pedane ripiegate con antiribaltamento	75,50 cm	78 cm	-
Altezza complessiva	89,50 cm	89,50 cm	89,5 cm
Larghezza totale ripiegata	31,50 cm	35 cm	35,5 cm
Altezza da sedile a terra	48 cm	48 cm	48 cm

Peso	Martinika Evo	Martinika Classic	Martinika Impulse
Peso totale con una batteria	24,60 kg	23,90 kg	29,45 kg
Peso totale con due batterie	26,85 kg	26,15 kg	31,70 kg
Peso massimo supportato	100 kg	100 kg	100 kg

Materiale	Alluminio	Colore	Nero / Arancione / Argento
-----------	-----------	--------	----------------------------

Sedile	Martinika Evo	Martinika Classic	Martinika Impulse
Larghezza del sedile	42 cm	44 cm	44 cm
Profondità del sedile	43 cm	44 cm	44 cm
Tipo di sedile	Imbottitura traspirante	Imbottitura traspirante	Imbottitura traspirante
Materiale del sedile	Tessuto ignifugo	Tessuto ignifugo	Tessuto ignifugo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale	Martinika Evo	Martinika Classic	Martinika Impulse
Larghezza dello schienale	42 cm	45 cm	42 cm
Altezza dello schienale	42 cm	42 cm	42 cm
Tipo di schienale	Partita	Partita	Partita
Materiale dello schienale	Imbottito con tenditori	Imbottito con tenditori	Imbottito con tenditori

Braccioli	Martinika Evo	Martinika Classic	Martinika Impulse
Lunghezza bracciolo	30 cm	30 cm	30 cm
Larghezza bracciolo	5 cm	6 cm	6 cm
Tipo di bracciolo	Fijos	Fijos	Fijos
Materiale del bracciolo	Inyectado	Inyectado	Inyectado

Poggiapiedi

Tipo di poggiapiedi	Singolo / Fisso / Pieghevole
Materiale del poggiapiedi	Plastica e alluminio

Motore

Potenza del motore	2 x 180W
Batterie	1 x 18 Ah / 2 x 18 Ah (Classic - Evo) 1 x 18 Ah / 1 x 36 Ah (Impulse)
Numero di batterie	1 o 2
Velocità massima	6 km/h
Autonomia	20 - 25 Km (18 Ah) / 35 - 40 Km (2 x 18 Ah)
Tipo di ricarica	Dal joystick
Caricabatterie esterno	3 Ah

Ruota

Misure della ruota anteriore	Ø 20 cm
Dimensioni della ruota posteriore	Ø 32 cm
Colore della ruota anteriore	4,5 cm
Colore ruota posteriore	5,5 cm
Tipo di ruote	Solido / Gonfiabile

Altre caratteristiche


Cintura di sicurezza	Sì, sì, sì
Corno	Sì
Freni	Elettromagnetico
Joystick	Programmabile
Retromarcia	Sì
Pendenza massima di salita	6°
Plegbale	Sì
Ruote antiribaltamento	Sì (rimovibile)



Ruota posteriore e antiribaltamento



Joystick

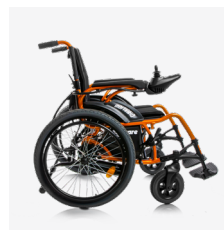

Martinika Impulse

4. UTILIZZO E MONTAGGIO

4.1. USO DEL MECCANISMO DI RIBALTAMENTO

Afferrare le maniglie del sedile e tirare verso l'alto, quindi premere i pulsanti di ripiegamento e tirare verso il basso.



4.2. USO DA DISPIEGATO

Tirare lo schienale verso l'alto fino allo scatto dei pulsanti di ripiegamento, quindi posizionare le mani in corrispondenza delle maniglie e spingere verso il basso..



4.3 USO DEL POGGIAPIEDI

I poggiapiedi sono pieghevoli ma non rimovibili. Le pedane possono essere ripiegate per facilitare l'ingresso nella carrozzina.



4.4 USO DELLO SCHIENALE SDOPPIATO

Premendo verso l'interno è possibile ripiegare lo schienale per una migliore piegatura.




4.5. USO DEI FRENI MANUALI

Per frenare la carrozzina, spingere in avanti la leva del freno. Per rilasciare i freni, tirare la leva del freno all'indietro. I freni possono essere dotati di una prolunga per facilitarne l'uso.



4.6. MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLE RUOTE ANTIRIBALTAMENTO

Per rimuovere le ruote antiribaltamento, premere sulla sfera di alluminio e contemporaneamente estrarre l'antiribaltamento. Per montare le ruote antiribaltamento, premere la sfera di alluminio e spingerla verso l'interno, assicurandosi che sia fissata saldamente.

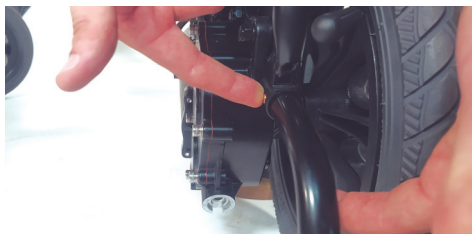

5. UNITÀ DI COMANDO

Il montaggio della manopola è molto semplice: basta inserire l'asta di fissaggio della manopola nel tubo quadrato. Quindi regolare la manopola di controllo nella posizione più adatta all'utente e ruotare il dado per bloccarla in posizione.



5.1 PARTI DELL'UNITÀ DI CONTROLLO

- Per iniziare a utilizzare la poltrona, premere il pulsante di accensione e l'alimentazione si accende. Quando si vuole spegnere la sedia, si preme nuovamente lo stesso pulsante e l'alimentazione si spegne.
- Per spostare la sedia a rotelle, è sufficiente muovere il joystick in avanti, indietro, a destra o a sinistra, e la sedia a rotelle si sposterà sul lato in cui si muove il joystick.
- Per frenare la carrozzina, è sufficiente rilasciare il joystick e la carrozzina rallenterà lentamente.

tamente.

- Per modificare la velocità è necessario premere i pulsanti di regolazione della velocità (superiore o inferiore, ci sono 5 diversi livelli). L'indicatore di velocità mostrerà o diminuirà le diverse scale a seconda del pulsante che si preme per regolare la velocità.
- Per suonare il corno, è sufficiente premere il pulsante del corno; se lo si lascia premuto, il corno sarà in funzione, mentre quando lo si rilascia smetterà di funzionare.
- La durata della batteria si riflette nell'indicatore di batteria, una scala di 5 luci che diminuiscono man mano che la batteria si scarica. È consigliabile caricare le batterie della sedia a rotelle quando sono accese due spie dell'indicatore di batteria, in quanto è meglio per la durata delle batterie.
- Quando è accesa una sola spia, si avverte che la batteria è in condizioni di bassa carica. In questo caso, non è consentito utilizzare la carrozzina in modo continuativo fino a quando la batteria non è completamente carica, perché potrebbe esaurirsi e la carrozzina non funzionare; inoltre, la batteria potrebbe danneggiarsi quando è completamente scarica..

6. FUNZIONI DELL'UNITÀ DI COMANDO



N°	Funzionalità
1	Riduzione della velocità
2	Pulsante di accensione
3	Display di alimentazione
4	Pulsante del clacson
5	Display velocità
6	Aumenta la velocità

6.1 ISTRUZIONI DI CARICAMENTO

Inserire il caricabatterie nella presa del telecomando (come mostrato nell'immagine), facendo attenzione all'orientamento della presa.

Inserire il caricabatterie in una presa di corrente e la spia di carica si accenderà. La luce rossa indica che la batteria è in carica, quella verde che la batteria è completamente carica.



7. MOTORE

Modalità manuale: per mettere la carrozzina in modalità manuale, è necessario sollevare la leva della frizione, situata dietro la ruota posteriore. La modalità manuale è segnalata da un avviso sul joystick.

In questa modalità, il motore non funziona.

Modalità elettrica: per mettere la carrozzina in modalità elettrica, è necessario abbassare la leva della frizione, situata dietro la ruota posteriore.



Silla en modo manual



Silla en modo eléctrica

8. TRASPORTO E STOCCAGGIO

⚠ La carrozzina non è certificata per i crash test e pertanto non può essere utilizzata per il trasporto in veicoli adattati.

Per ripiegare il seggiolino, lasciarlo riposare quando è piegato. Il passeggino pieghevole può essere riposto nel bagagliaio dell'auto.

La batteria deve essere completamente carica e la carrozzina deve essere collocata in un luogo fresco, asciutto e ventilato, nel caso in cui la carrozzina venga conservata per un lungo periodo.

Si noti che la batteria deve essere caricata una volta ogni 15 giorni, altrimenti si potrebbe verificare un'eccessiva scarica, con conseguente danneggiamento della batteria, che dovrebbe essere sostituita con una nuova, non perché la batteria sia difettosa, ma perché non viene utilizzata correttamente..

9. BATTERIA E RICARICA

9.1 BATTERIA

La carrozzina è pieghevole senza rimuovere le batterie.

9.2 REQUISITI DEL CARICABATTERIE

Il caricabatterie viene utilizzato per caricare la batteria. Non utilizzare la carrozzina durante la carica.

Dati tecnici del caricabatterie

Tensione di ingresso: AC220V \pm 10% Tensione di uscita: 24V / DC Corrente di uscita: 3A

9.3 UTILIZZO DEL CARICABATTERIE

Per caricare la batteria, collegare il caricabatterie all'alimentazione e alla spina della scatola della batteria. Seguire le istruzioni riportate di seguito per completare il processo di carica.

Fase 1: Assicurarsi che la fessura del caricabatterie non sia bloccata.

Fase 2: Assicurarsi che la sedia a rotelle sia spenta.

Fase 3: collegare la spina di uscita del caricabatterie alla presa del joystick.

Fase 4: collegare la spina principale del caricabatterie all'alimentazione e la luce rossa si accende. La carica completa richiede da 8 a 10 ore, non sovraccaricare per più di 24 ore.

Fase 5: per evitare una breve durata della batteria, caricarla almeno una volta al mese quando la carrozzina non è in uso.

9.4 USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

Un'operazione errata di sostituzione della batteria può causare il pericolo di esplosione. Per la sostituzione è necessario utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo raccomandato. Assicurarsi che i poli della batteria siano corretti.

Punti chiave per prolungare la durata della batteria: Caricare frequentemente la batteria per mantenerla piena. È meglio caricare completamente la batteria quando la carrozzina non viene utilizzata. Se non la si usa per molto tempo, è meglio caricarla due volte al mese..



ATTENZIONE

Non interrompere la carica fino al completamento del processo di ricarica. L'uso ripetuto della batteria se non è completamente carica ne riduce la durata, pertanto la batteria deve essere caricata completamente il più possibile.

Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di alimentazione si illumina di verde. Non interrompere la carica prima che sia completamente carica.

Al termine della carica, spegnere l'alimentazione, altrimenti la batteria si scaricherà lentamente. Non caricare la batteria per più di 24 ore. Il sovraccarico della batteria può essere pericoloso.

Gli utenti devono attenersi alle seguenti regole per evitare pericoli durante la carica:

La carrozzina elettrica include il caricabatterie. Durante la carica deve essere ben ventilata. Non esporre la carrozzina alla luce del sole e all'umidità.

L'intervallo di temperatura dell'ambiente di ricarica è compreso tra 10 e 50. Se non rientra nell'intervallo di temperatura ambiente, la batteria non può funzionare bene e può essere facilmente danneggiata.

È normale che la ventola emetta un suono durante la carica. Serve a raffreddare la batteria.

Evitare che il liquido entri in contatto con il caricabatterie durante la carica. Non collocare il caricabatterie su oggetti infiammabili come: carburante, poggiatesta o cuscino del sedile.

Tenere lontano dalle fiamme libere quando si carica la batteria. Le fiamme possono causare incendi o esplosioni della batteria.

La carica produce idrogeno; non fumare durante la carica. Non scollegare l'alimentazione quando la presa o le mani sono bagnate, perché ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

In caso di incidente imprevedibile e di lesioni all'utente, non utilizzare o sedersi sulla sedia a rotelle durante la carica.

10. CONSIGLI PER LA SICUREZZA

10.1. LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA GUIDA

Prima di utilizzare la carrozzina, l'utente deve leggere questo manuale d'uso e familiarizzare con i suoi componenti e le sue caratteristiche..

10.2. ESERCITAZIONI

L'utente deve esercitarsi nella guida assistita in luoghi aperti, pianeggianti e sicuri per il normale utilizzo. Per spostarsi in avanti, indietro, lateralmente e per parcheggiare. Indossare la cintura di sicurezza fornita con la carrozzina.


10.3. MOVIMENTO ALL'INDIETRO

Prima di iniziare la manovra, l'utente deve essere consapevole di ciò che si trova dietro di lui per evitare collisioni. Spingere leggermente all'indietro la leva di comando.



10.4. GIRARE

Per svoltare, spingere la leva di comando a sinistra o a destra. Fare attenzione a ciò che si trova sul lato in cui si gira per evitare collisioni

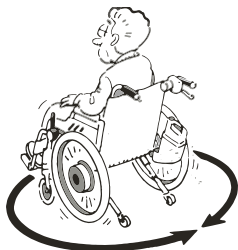

10.5. GUIDA IN CURVA

Spingere leggermente il joystick in direzione della curva. Controllare la velocità della pratica.




10.6. EVITARE GLI OSTACOLI

Spingere leggermente il joystick in entrambe le direzioni per evitare e manovrare intorno agli ostacoli.




10.7. GUIDA VELOCE

Spingete il joystick fino in fondo nella direzione in cui volete andare. Tirate il joystick a metà se non sentite il controllo al 100%.

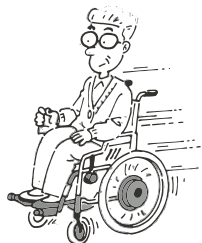

10.8. GUIDA SU PICCOLI CORDOLI

Spingere leggermente la leva di comando e spingerla lentamente lungo il marciapiede..

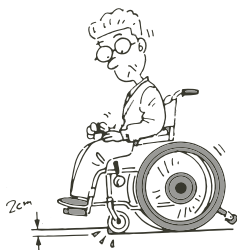


10.9. GUIDA IN SALITA

Mantenere il corpo inclinato in avanti per mantenere stabile il baricentro. Guidare lentamente. Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia una pendenza inferiore a 6 gradi..



10.10. ENTRATA O USCITA DALL'ASCENSORE

L'utente deve prestare attenzione agli intervalli di apertura e chiusura della porta dell'ascensore per evitare collisioni quando entra o esce dall'ascensore.

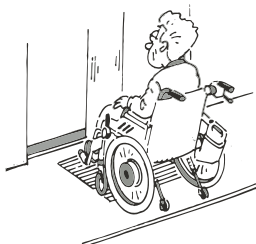


10.11. GUIDA SUI MARCIAPIEDI

L'utente deve rimanere sul marciapiede ed evitare di entrare nella corsia dei veicoli a motore, tranne che per attraversare la strada. Prestare attenzione agli ostacoli ed evitare il contatto con essi..



10.12. ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA

Prestare attenzione a evitare le auto e attraversare solo quando è consentito. È necessario guidare lentamente lungo la strada, tornando sul marciapiede.

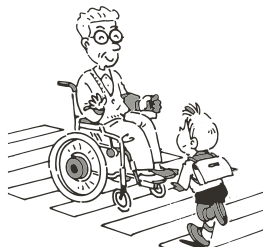


10.13. TRASFERIMENTO DELLA PERSONA CON SEDIA A ROTELLE

Il veicolo deve essere adeguatamente adattato, sia la sedia a rotelle che l'utente devono essere in posizione di guida.




10.14. GUIDA SU BINARI FERROVIARI/FERROVIARI

Non attraversare i binari ferroviari/treni da soli, si raccomanda vivamente di essere accompagnati da un aiutante.

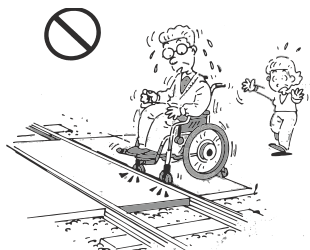


10.15. RAMPE

La guida su una rampa ripida può causare un ribaltamento o un incidente.

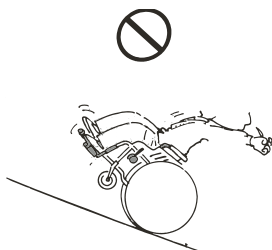

10.16. SALITA O DISCESA

Salire o scendere da un marciapiede o da un gradino può causare un ribaltamento..

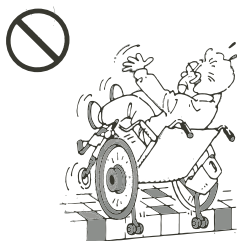


10.17. RACCOMANDAZIONE

Si raccomanda che l'utente sia assistito se è necessaria assistenza per salire e scendere dalla carrozzina..



10.18. NON TENTARE DI RIPARARE L'UNITÀ DA SOLI.

Potrebbe causare danni permanenti alla carrozzina e mettere a rischio l'utente. La riparazione deve essere effettuata da personale specializzato.

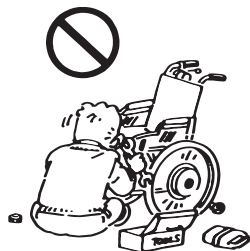

10.19. AVVERTENZA

Non permettere ai bambini di accedere alla carrozzina.



10.20. NON SPRUZZARE LA CARROZZINA CON ACQUA O ALTRI LIQUIDI.

Ciò potrebbe danneggiare la carrozzina e mettere in pericolo la vostra sicurezza personale. Pulire quindi con un panno umido.




10.21. NON LASCIARE LA BATTERIA O I COMPONENTI ELETTRICI DELLA CARROZZINA IN UN'AUTO ESPOSTA AL SOLE.

Ciò causerebbe danni permanenti. Pertanto, tenerla lontana da fonti di calore e dal fuoco.



10.22. AVVERTENZE PER I BAMBINI

Non permettere ai bambini di accedere alla batteria o ai componenti elettrici della carrozzina. La carrozzina deve essere conservata in un luogo fresco e asciutto, dove i bambini non possano accedervi.

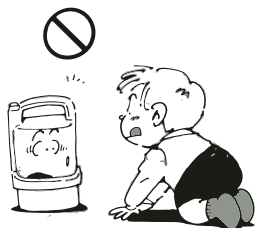

10.23. NON COLLOCARE OGGETTI SUL CARICABATTERIE MENTRE È IN CARICA.

Se durante la carica la batteria si surriscalda, si deforma o emette un odore, interrompere immediatamente la carica.



10.24. NON CONSERVARE LA BATTERIA ALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE.

Conservarla in un luogo asciutto, fresco e ventilato, che non sia accessibile ai bambini. Inoltre, non conservarla in un ambiente molto freddo. Ciò potrebbe danneggiare e ridurre la durata della batteria.



11. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto da te acquistato è protetto da questa garanzia, a causa del difetto di conformità del cliente che si manifesti entro il termine di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, da 2 anni a 3 anni, il consumatore dovrà continuare a rivolgersi alla parte venditrice per ottenere la riparazione del difetto di conformità del bene, ma se necessario, l'utente dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso per motivi di fabbricazione e non per uso improprio o mancanza di manutenzione.

L'ambito territoriale della presente Garanzia si estende all'intero territorio nazionale spagnolo.

La presente Garanzia non pregiudica i diritti di a disposizione del consumatore in conformità con le disposizioni del regio decreto legge 7/2021, del 27 aprile, recepimento delle direttive dell'Unione Europea in difesa dei consumatori.

PROCEDURA PER RENDERE EFFICACE LA GARANZIA

Affinché la Garanzia abbia effetto, il consumatore dovrà recarsi presso il punto vendita in cui ha acquistato il prodotto, nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, sia perché chiuso, sia perché il prodotto è stato acquistato in un'altra comunità autonoma, è possibile contattare direttamente il produttore tramite e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com.

È indispensabile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o ricevuta d'acquisto, oppure una bolla di consegna successiva alla fattura o ricevuta, riportante chiaramente il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore dovrà consegnare il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato, accompagnando una nota esplicativa del difetto di conformità.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente non rispettando le istruzioni indicate in questo manuale o causati da altri fattori umani, uso improprio, collisione con un oggetto...
- Danni causati da incidenti, abusi, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto che non riporti o il cui numero di serie o di fabbrica sia alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli articoli soggetti ad usura.
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, S.L

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE APPARE DANNEGGIATO O CON PARTI MANCANTI

CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE.

Etichettatura legenda.



Conformità europea



Dovresti fare riferimento alle istruzioni di utilizzo per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Riferimento prodotto



Numero di serie

Manuale d'uso

Sedia a rotelle elettrica Martinika

V9 · 31/03/2023