



Magnum

Andarilho de exterior

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. AALMAGNUM

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Ver o nosso website para o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo andarilho de exterior **Magnum**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes do andarilho	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Características do produto	5
4 — Utilização e montagem	7
5 — Segurança e mais informações	8
6 — Manutenção e limpeza	9
7 — Garantia	10

1. PARTES DO ANDARILHO



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ANDARILHO DOBRÁVEL PARA EXTERIOR COM CESTO DE GRANDE CAPACIDADE

O andador com assento Magnum é feito de alumínio, um material leve que permite uma utilização contínua pelo utilizador.

Foi concebido com um sistema de dobragem fácil que poupa espaço dentro de casa e facilita o seu transporte.

Disponível nos tamanhos 41 cm e 43 cm, a profundidade do assento é de 25 cm.

Está incluída uma bolsa de transporte com fecho de velcro, muito prática para uso diário, e também pode ser transportada sobre o ombro graças à alça ajustável.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



MAGNUM

INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas	Talla 41	Talla 43
Largura total	56 cm	58 cm
Largura entre as rodas traseiras	50 cm	52 cm
Profundidade total	65,5 cm	65,5 cm
Altura total (ajustável)	80 - 96,5 cm	80 - 96,5 cm

Medidas de dobragem

Largura dobrada	24 cm
Altura total dobrada	80 cm
Profundidade dobrada	65,5 cm

Peso

Peso total	7,90 kg
Peso máximo suportado	136 kg

Material	Alumínio	Cor	Cinzentos escuro
----------	----------	-----	------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento	41 cm / 43 cm
Profundidade do assento	25 cm
Altura do assento ao piso	53 cm
Material do assento	Tecido anti-fogo com encosto
Cor do assento	Preto

Rodas

Dimensões da roda dianteira	Ø19,5 cm
Dimensões da roda traseira	Ø19,5 cm
Largura das rodas frontais	3 cm
Largura da roda traseira	3 cm
Tipo de rodas	Maciços
Tipo de travão	Travão de mão
Número de rodas frontais	2 rotativo

Saco

Largura do saco	31 cm
Altura do saco	32 cm
Profundidade do bolso	10 cm
Material da bolsa	Nylon
Reflectores de sacos	Sim
Tipo de fecho de saco	Velcro
Cor do saco	Preto

Outras características

Encosto	Sim, nylon
Tipo de dobragem	Cruzado
Porta-bengalas	Sim
Reflectores	Sim



Alças ajustáveis em altura.



Travão de mão



Grande cabaz de capacidade.

4. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

4.1. TIRAR O ANDARILHO DA CAIXA

Antes de começar, na caixa encontrará um saco com quatro parafusos de botão.



4.2. UTILIZAÇÃO DO VISOR

Passo 1: Baixar ambas as rodas dianteiras e fixá-las firmemente com dois parafusos de botão, um em cada extremidade da parte superior da roda.



Passo 2: Agora deve realizar a mesma ação que acima, mas com as rodas traseiras.



Passo 3: Desdobrar o assento.



Passo 4: Coloque a pega ajustável em altura onde melhor lhe convier, para mudar a altura, pressione o pino de bloqueio prateado, saberá que a altura está completamente fixa quando vir o pino entre um dos oito buracos.



Passo 5: Fixar o saco ao cabide do andarilho e utilizar o velcro para o fixar à estrutura.



4.3. UTILIZAÇÃO DE DOBRAGEM

Para efectuar a dobragem, pode utilizar a secção "4.2. Utilização do desdobramento", seguindo as instruções na ordem inversa.

Passo 1: Retirar a bolsa da estrutura.

Passo 2: Puxar a pega ajustável.

Passo 3: Puxar a correia de bloqueio no meio do assento para cima: o andarilho dobra-se para cima.

Passo 4: Soltar os parafusos do botão da roda dianteira e depois dobrar as rodas para cima.

Passo 5: Utilizar os parafusos no manípulo para bloquear as rodas.



4.4. UTILIZAÇÃO DO TRAVÃO

Serviço de travagem (ao empurrar): Puxar as manetes de travão para cima.

Travão de estacionamento (ao estacionar e ao utilizar a função de banco): Empurrar as manetes de travão para baixo.



4.5. MONTAGEM DO PORTA-BENGALAS

Com a ajuda de uma chave de fendas, colocar o parafuso no buraco visível, como se pode ver.



5. SEGURANÇA E MAIS INFORMAÇÃO

CUIDADO

Não utilizar o andador como cadeira de rodas ou cadeira de transporte.

- Utilizar apenas o assento para ficar quieto.
- Nunca se sente e empurre com os pés.
- Não utilizar para subir ou descer escadas, escadas rolantes ou tapetes rolantes.

Consulte sempre o seu médico ou terapeuta para determinar a utilização adequada e o ajuste da altura para um apoio máximo e uma activação correcta do travão.

Certifique-se de que ambos os botões de ajuste de altura estão bem apertados e que as pegadas estão à mesma altura. Teste de estabilidade antes da utilização.

Certifique-se de que o andador está totalmente aberto, que o assento está em posição e que as dobradiças estão devidamente colocadas.

Verificar se as configurações de altura estão correctas e se as rodas se movem livremente antes da utilização.

Respeitar o limite de peso do produto.

Substituir as rodas quando desgastadas ou danificadas. Verificar semanalmente as rodas dianteiras para detectar sinais de danos.

Interromper a utilização do andador se verificar que as rodas estão soltas e regressar ao local de compra para ajustar o andador.

Não expor a temperaturas extremas (muito altas ou muito baixas), humidade ou ficar molhado, para evitar deformações das partes plásticas.

Todas as rodas devem estar em contacto com o solo quando o andador está a ser utilizado, para que este seja equilibrado.

Para evitar a sua viragem:

- Não alcançar os objectos se tiver de avançar enquanto estiver sentado no andador.
- Não pendurar nada no andador.
- O encosto deve estar sempre no lugar e não foi concebido para suportar o peso total do corpo.
- Se quiser alcançar ou apanhar um objecto, deve colocar os dois pés firmemente no chão.
- Não adicionar peso extra ao andador quando sentado.
- Não utilizar o assento se estiver num declive ou num terreno irregular.
- O cesto tem uma capacidade de 5 kg e os objectos não devem sobressair do mesmo.
- Para abrandar temporariamente o andador, carregar em ambas as pegadas ao mesmo tempo.

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Manutenção

A sujidade normal em peças metálicas e plásticas pode ser removida com agentes de limpeza normais.

Verificar o conteúdo dos agentes de limpeza e utilizar apenas agentes de limpeza e desinfecção adequados. Não utilizar solventes ou agentes de limpeza abrasivos. Apesar da construção robusta e da utilização de materiais resistentes e resistentes à corrosão, o andarilho está sujeito a desgaste, pelo que se recomenda verificar o andarilho regularmente (pelo menos uma vez por ano).

Tal verificação deve incluir: Uma verificação visual de todas as partes da moldura: se foram dobradas, danificadas, desgastadas ou corroídas e, em particular, uma verificação do seguinte

- Estrutura do andarilho.
- Barras de pressão, pegas e alça.
- Manípulos e cabos de travão.
- Garfos e rodas dianteiras
- Rodas traseiras travadas.
- Assento e dispositivo de fecho.
- Bolsa.
- Verificar se faltam peças de montagem (por exemplo, porcas, parafusos, rebites...) e se funcionam e estão bem apertadas.
- Verificar a função de travagem, abrandando e travando as rodas.

Limpeza

A limpeza e desinfecção devem ser efetuadas em intervalos regulares. Utilizar uma solução de sabão suave e não abrasiva.

Os métodos padrão podem ser utilizados para desinfecção. Não utilizar equipamento de injeção de vapor, esfregadores ou produtos de limpeza corrosivos.

7. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO utilizar ESTE PRODUTO SE ele PARECER estar DANIFICADO OU faltar PEÇAS.

contacte o seu FORNECEDOR.

ANDARILHO MAGNUM

O andarilho Magnum com assento é feito de alumínio, um material leve que permite uma utilização contínua pelo utilizador.



Legenda da etiquetagem.



Conformidade Europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Andarilho para exterior Magnum

V7 · 06/09/2022