



Magnum

Camminatore all'aperto

MANUALE DI ISTRUZIONI

Ref. AALMAGNUM

Oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso del nuovo **camminatore Magnum**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti	4
2 — Descrizione	4
3 — Caratteristiche tecniche	5
4 — Montaggio e utilizzo.....	7
5 — Informazioni e norme di sicurezza.....	8
6 — Montaggio e utilizzo.....	9
7 — Garanzia	10

1. PARTI



DESCRIZIONE

DEAMBULATORE DA ESTERNO PIEGHEVOLE CON BORSA DI GRANDE CAPACITÀ

Il deambulatore Magnum con sedile è realizzato in alluminio, un materiale leggero che consente un uso continuo da parte dell'utente.

È progettato con un facile sistema di piegatura che permette di risparmiare spazio all'interno e trasportarlo comodamente.

Disponibile in misure di 41 cm e 43 cm di larghezza, con una profondità di seduta di 25 cm.

Questo deambulatore possiede una borsa chiusura in velcro, molto pratica per l'uso quotidiano. La borsa può anche essere staccata e portata a tracolla.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE



MAGNUM

INFORMAZIONI GENERALI

Misure	Talla 38	Talla 45
Larghezza totale	54 cm	63 cm
Larghezza tra le ruote posteriori	46 cm	55 cm
Profondità	65,5 cm	65,5 cm
Altezza totale (regolabile)	80 - 96,5 cm	80 - 96,5 cm

Misure della sedia piegata

Larghezza	24 cm
Altezza totale	80 cm
Profondità	65,5 cm

Peso

Peso total	7,90 kg
Portata massima	136 kg

MaterialE

ALLuminio

ColorE

Grigio scuro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Seduta

Larghezza della seduta	38 cm / 45 cm
Ancho útil para sentarse	41 cm / 48 cm
Profondità	25 cm
Altezza dal pavimento alla seduta	53 cm
Materiale	Tessuto ignifugo
Colore	Nero

Ruote


Diametro ruote anteriori	Ø19,5 cm
Diametro ruote posteriori	Ø19,5 cm
Spessore ruote anteriori	3 cm
Diametro ruote posteriori	3 cm
Tipologia	Solido
Tipo di Freno	Freno a leva
Numero di ruote anteriori	2 girevoli

Borsa


Larghezza	31 cm
Altezza	32 cm
Profondità	10 cm
Materiale	Nylon
Riflettori	Sì
Tipo di chiusura	Velcro
Colore	Nero

Altre caratteristiche

Schienale	Sì, nylon
Meccanismo per chiusura	Forma a X
Porta bastone	Sì
Riflettenti	Sì

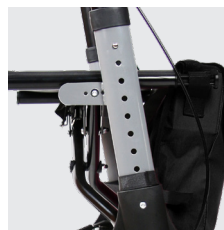

Manici regolabili in altezza.

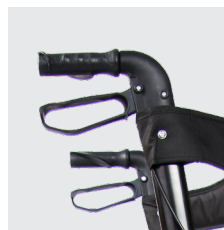

Leva del freno.



Cesto di grande capacità.

4. MONTAGGIO E UTILIZZO

4.1. IMBALLAGGIO

Ritirare il deambulatore dall'imballaggio assieme a una borsa contenente quattro viti a pomello.



4.2. MONTAGGIO

Passo 1: Abbassare entrambe le ruote anteriori e fissarle saldamente con due viti a manopola, una a ogni estremità della parte superiore della ruota.



Passo 2: Eseguire la stessa azione precedente con le ruote posteriori.



Passo 3: Aprire il sedile.



Passo 4: Regolare le impugnature all'altezza conveniente. Per cambiare l'altezza premere sul perno di bloccaggio argentato. L'altezza è finalmente bloccata quando si vedi il perno in uno degli otto fori della barra.

Passo 5: Collocare la borsa sulla barra del deambulatore e fissarla al telaio usando il velcro.



4.3. UTILIZZO

Per chiudere il deambulatore basta seguire i passi del montaggio.

Passo 1: Staccare la borsa dal telaio

Passo 2: Rimuovere l'impugnatura regolabile.

Passo 3: Tirare verso l'alto la fascia di bloccaggio al centro del sedile: il deambulatore si chiude.

Passo 4: Allentare i bulloni sul pomello della ruota anteriore, quindi piegare le ruote verso l'alto.

Passo 5: usare le viti a pomello per bloccare le ruote.



4.4. USO DEL FRENO

Freno di servizio (quando si spinge): Tirare verso l'alto il freno a maniglia.

Freno di stazionamento (quando si parcheggia e si utilizza la funzione del sedile): premere il freno a maniglia verso il basso.



4.5. MONTAGGIO DEL PORTACANNA

on l'aiuto di un cacciavite avvitare la vite nel foro visibile, come si apprezza in queste due immagini.



5. INFORMAZIONI E NORME DI SICUREZZA

Non utilizzare il deambulatore come sedia a rotelle o sedia da trasporto.

- Usare il sedile solo per fare una pausa.
- Non sedersi mai per poi spingere con i piedi.
- Non utilizzare per salire o scendere scale, scale mobili o nastri trasportatori.
- Consultare sempre il proprio medico o terapeuta per determinare l'uso corretto e la regolazione dell'altezza per il massimo appoggio e il buon uso del freno
- Assicurarsi che entrambe le manopole di regolazione dell'altezza siano strette e che le impugnature siano alla stessa altezza. Si prega di testare la stabilità prima dell'uso.
- Assicurarsi che il deambulatore e i cardini sia completamente aperti, e il sedile nella sua corretta posizione.
- Regolare l'altezza e assicurarsi che le ruote si muovono liberamente prima dell'uso.
- Rispettare la portata massima del deambulatore.
- Sostituire le ruote se usurate o danneggiate. Controllare settimanalmente le ruote anteriori per segni di danni.
- Interrompere l'uso del deambulatore se si osservano problemi di scorrimento delle ruote e contattare il punto di vendita.
- Non esporre il deambulatore a temperature estreme (molto alte o molto basse), umidità o acqua per evitare la deformazione delle parti in plastica.
- Tutto le ruote devono essere a contatto con il terreno durante l'utilizzo del deambulatore in modo che questo sia stabile e bilanciato.
- Per evitare il ribaltamento:
 - Non cercare ad afferrare oggetti se si deve avanzare mentre seduto nel deambulatore.
 - Non appendere nulla sul deambulatore.
 - Lo schienale deve sempre essere inserito ma non è stato disegnato per sopportare il peso del corpo.
- Se si vuole raggiungere o raccogliere un oggetto, si devono posare entrambi i piedi a terra.
- Non aggiungere altro peso al deambulatore quando si è seduto.
- Non utilizzare il seggiolino se ci si trova su un pendio o su un terreno irregolare.
- Il cestino ha una capacità di 5 kg e gli oggetti non devono sporgere da esso.
- Per fermare momentaneamente il deambulatore, premere contemporaneamente su entrambe le maniglie.

6. MANTENIMENTO Y LIMPIEZA

Manutenzione

- Lo sporco normale sulle parti in metallo e plastica può essere rimosso con normali detersivi.
- Controllare gli ingredienti del detersivo e usare prodotti adatti per la pulizia e la disinfezione. Non utilizzare solventi o detersivi abrasivi. Nonostante la solida struttura e l'utilizzo di materiali resistenti e anticorrosivi, il deambulatore è soggetto ad usura, pertanto si consiglia di controllare regolarmente il deambulatore (almeno una volta all'anno).
- Questo controllo dovrebbe includere: Un controllo visivo di tutte le parti del telaio: se sono state piegate, danneggiate, usurate o corrose, e in particolare un controllo di quanto segue
 - Telaio del deambulatore.
 - Maniglie, e impugnature.
 - Maniglie dei freni e cavi dei freni.
 - Forcelle e ruote anteriori.
 - Ruote posteriori frenate.
 - Sedile e dispositivo di bloccaggio.
 - Borsa..
- Controllare se mancano parti di montaggio (es. dadi, bulloni, viti...) e se sono ben strette.
- Controllare il funzionamento dei freni rallentando e frenando le ruote

Pulizia

La pulizia e la disinfezione devono essere effettuate a intervalli regolari. Utilizzare una soluzione saponosa delicata senza abrasivi.

È possibile utilizzare metodi standard per la disinfezione. Non utilizzare attrezzature per l'iniezione di vapore o detersivi abrasivi o corrosivi.

7. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

DEAMBULATORE MAGNUM

Il deambulatore Magnum con sedile è realizzato in alluminio, un materiale leggero che consente un uso continuo da parte dell'utente.



Simboli grafici



Conformità Europea.



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto.



Codice prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico

Manuale d'istruzione

Deambulatore Magnum

V8 · 08/05/2023