



4200
FP/FM

Deambulatore da esterno

MANUALE D'ISTRUZIONE

Ref. AAL4200



Oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPA

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA

Grazie per aver acquistato un prodotto da IM by Totalcare Europa.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo, fa in modo che i nostri prodotti offrano le migliori funzionalità, permettendoti di godere di una maggiore libertà e autonomia di cui hai bisogno ogni giorno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. In questo modo potrai familiarizzare con il tuo nuovo girello freno a pressione 4200 e freno a leva 4200, che ti permetterà di ottenere il massimo delle prestazioni e della vita utile da esso.

più di **50 anni** che vivono senza limiti

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

| | |
|---|----------|
| 1 — Parti | 4 |
| 2 — Descrizione | 4 |
| 3 — Caratteristiche tecniche | 5 |
| 4 — Montaggio e utilizzo..... | 6 |
| 5 — Manutenzione e pulizia..... | 6 |
| 6 — Informazione generali..... | 6 |
| 7 — Garanzia | 7 |

1. PARTI



2. DESCRIZIONE DEL DEAMBULATORE

DEAMBULATORE CON SEDILE E FRENO A PRESSIONE, O A MANIGLIA

Esistono due versioni del deambulatore 4200: quello con freno a pressione, e quello con freno a maniglia.

Il deambulatore 4200 è realizzato in alluminio, un materiale leggero, resistente e altamente durevole, con un peso di 5,90 kg.

Possiede una barra imbottita per un migliore sostegno della schiena, e una comoda seduta (35cm x 34cm) sotto la quale si trova un cestino in tessuto scuro che consente una portata massima di 8 kg.

4200 FP



4200 FM



3. CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Misure | 4200 FP | 4200 FM |
|---|------------------|---------------------------|
| Larghezza totale | 60 cm | 61 cm |
| Larghezza tra le ruote posteriori | 36,5 cm | 45 cm |
| Profondità aperto | 61 cm | 61 cm |
| Profondità ripiegato | 26 cm | 28,5 cm |
| Altezza totale (regolabile) | 78 - 91 cm | 78,5 - 91,5 cm |
| Peso | | |
| Peso total | 5,90 kg | |
| Portata massima | 100 kg | |
| Materiale | Alluminio | Colore |
| | | Nero / Grigio / Blu opaco |
| Seduta | | |
| Larghezza | 35 cm | |
| Profondità | 34 cm | |
| Altezza dal pavimento alla seduta | 53 cm | |
| Tipologia | Pieghevole | |
| Materiale | Imbottito | |
| Schienale | | |
| Larghezza | 46 cm | |
| Tipologia | Fisso staccabile | |
| Materiale | Barra imbottita | |
| Ruote | 4200 FP | 4200 FM |
| Diametro ruota anteriore | Ø13 cm | Ø13 cm |
| Diametro ruota posteriore | Ø13 cm | Ø15,5 cm |
| Spessore ruote anteriori | 2,5 cm | 2,5 cm |
| Spessore ruote posteriori | 2,5 cm | 2,5 cm |
| Tipo di ruota | Solido | Solido |
| Numero di ruote anteriori | 2 | 2 |
| Numero di ruote posteriori | 4 | 2 |
| Altre caratteristiche | 4200 FP | 4200 FM |
| Cestino | In tessuto | In tessuto |
| Misure (larghezza x altezza x profondità) | 41 x 20 x 22 cm | 41 x 20 x 22 cm |
| Portata massima | 8 kg | 8 kg |
| Pieghevole | Sí | Sí |
| Tipo di freno | Pressione | Maniglia |

4. MONTAGGIO E UTILIZZO



- **Per fissare lo schienale**, spingere verso l'interno i due puntali sui laterali e inserire la barra imbottita al telaio del deambulatore. Il supporto dovrebbe fare clic se installato correttamente: si deve ascoltare il meccanismo fare un click e i perni devono fuoriuscire dai fori.
- Allentare le viti e la manopola di regolazione per collocare le impugnature.
- **Regolare l'altezza delle impugnature**, secondo quanto indicato dal tuo fisioterapista o professionista sanitario. Inserire la vite nel telaio in modo che la testa esagonale si inserisca nel foro a sei facce. Avvitare la manopola fino in fondo, assicurandosi che la testa della vite sia nascosta all'interno del telaio.
- **Per piegare il deambulatore**, dopo aver alzato il sedile, lasciare o rimuovere il cestino in stoffa. Al centro del deambulatore si trova un tubo molto sottile che bisogna sollevare in modo che si possa piegare, dopodiché ripiegare le pedane.
- **Para fijar los frenos**, basterà esercitare pressione con le mani sulle impugnature o sulle maniglie so-

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Eseguire una manutenzione regolare del deambulatore.
- Pulire il telaio con un panno umido per rimuovere lo sporco.
- Conservare il deambulatore in casa durante la notte. Non esporlo ad aria salmastra o ambienti ostili. Se esposto, verificare la presenza di danni e pulirlo prima dell'uso.
- Controllare settimanalmente le ruote, vedere se girano correttamente, se non hanno sporco o qualsiasi altra cosa che possa interferire con il suo buon funzionamento. Controllare ugualmente che il telaio non sia danneggiato, che

6. INFORMAZIONI PER L'USO SICURO

Non utilizzare il deambulatore come sedia a rotelle o sedia da trasporto.

Usa il sedile solo per fare una sosta da fermo.

Non sederti mai e spingere con i piedi.

Non utilizzare per salire o scendere gradini, scale mobili o nastri trasportatori.

Assicurarsi che entrambe le manopole di regolazione dell'altezza siano strette e che le impugna-

ture siano alla stessa altezza. Si prega di testare la stabilità prima dell'uso.

Assicurarsi che il deambulatore e i cardini siano completamente aperti, e il sedile nella sua corretta posizione.

6.1. PER EVITARE IL RIBALTAMENTO:

- Non cercare ad afferrare oggetti se si deve avanzare mentre seduto nel deambulatore.
- Lo schienale deve sempre essere inserito ma non è stato disegnato per sopportare il peso del corpo.
- Se si vuole raggiungere o raccogliere un oggetto, si devono posare entrambi i piedi a terra
- Non aggiungere altro peso al deambulatore

quando si è seduto.

- Non utilizzare il seggiolino se ci si trova su un pendio o su un terreno irregolare.
- Il cestino ha una capacità di 5 kg e gli oggetti non devono sporgere da esso.
- Per fermare momentaneamente il deambulatore, premere contemporaneamente su entrambe le maniglie.

7. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

Simboli grafici.



Conformità Europea



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione



Rappresentante europeo.



Lotto di produzione



Codice prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico

Manuale d'istruzione

Deambulatore 4200 FP/FM

V6 · 30/08/2023