



4200 XL

Andarilho para exterior

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. AAL4200XLFMP

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo andarilho **4200 XL**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Peças	4
2 — Descrição do seu andarilho	4
3 — Características técnicas.....	5
4 — Utilização e montagem do seu andarilho	6
5 — Manutenção e limpeza.....	6
6 — Informações sobre utilização e segurança	6
7 — Garantia.....	7

1. PEÇAS



2. DESCRIÇÃO DO SEU ANDARILHO

ANDARILHO RESISTENTE DE ALUMÍNIO COM ASSENTO E TRAVÃO DE MÃO

O 4200 XL é um andador concebido para ter uma maior resistência e durabilidade. Tem um travão de mão e é feito de alumínio, o que o torna leve, forte e muito duradouro.

Incorpora um assento confortável com 35 cm de largura e 34 cm de profundidade, sob o qual existe um cesto de metal e uma barra acolchoada para apoio das costas. Vem com porta-bengalas de série.



4200 XL

3. CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Medidas

Largura total	61,5 cm
Largura entre as rodas traseiras	43,5 cm
Profundidade geral	67 cm
Profundidade dobrada	32 cm
Altura total (ajustável)	83 - 96,5 cm

Peso

Peso total	8,65 kg
Peso máximo suportado	138 kg

Material	Alumínio	Cor	Prata
----------	----------	-----	-------

Assento

Largura do assento	35 cm
Profundidade do assento	34 cm
Altura do assento ao chão	54 cm
Tipo de assento	Dobrável
Material do assento	Acolchoado

De volta

Largura do encosto	45 cm
Tipo de encosto	Destacável fixo
Material de encosto	Barra acolchoada

Roda


Medidas das rodas dianteiras	Ø19 cm
Medidas das rodas traseiras	Ø19 cm
Largura das rodas dianteiras	3 cm
Largura das rodas traseiras	3 cm
Tipo de rodas	Sólido
Número de rodas frontais	2
Número de rodas traseiras	2

Outras características


Cesto	Grade de metal
Dimensões do cesto (largura x altura x profundidade)	44 x 15 x 24 cm
Peso máximo do cesto	5 kg
Dobrável	Sim
Tipo de travão	Travão de mão e de bloqueio



Alavanca de freio.

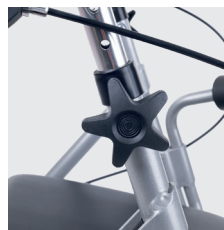

Botão de ajuste e altura e parafuso.

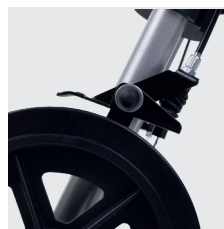

Mecanismo de roda.



Dobragem do andarilho 4200XL.

4. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM DO SEU ANDARILHO



- **Para encaixar o encosto**, empurrar os pinos nos lados do encosto e inseri-lo nos suportes na parte da frente do chassi do andarilho. O encosto deve fazer um "clique" se estiver bem instalado.
- Desaperte os parafusos e o botão de ajuste para colocar as pegas no chassi.
- **Ajustar a altura das pegas**, à sua altura de acordo com as instruções do seu fisioterapeuta ou profissional treinado. Inserir o parafuso na estrutura para que a cabeça hexagonal encaixe no orifício de seis lados. Aparafusar o botão até ao fundo, certificando-se de que a cabeça do parafuso está escondida dentro do chassi.
- **Para dobrar o seu andarilho**, terá de levantar o assento, e retirar o cesto. No centro do andarilho, encontrará um tubo de alumínio muito fino, colocará a mão por baixo e puxará o tubo para cima para dobrar o andarilho.
- **Para fixar os travões**, coloque a mão no travão e baixe-o, para que o seu andarilho não se mexa.

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Efetuar a manutenção regular do andarilho. Limpar a estrutura com um pano húmido para remover a sujidade
- Armazenar o andarilho dentro de casa à noite. Não o exponha a ar salgado ou a ambientes hostis. Se exposto, verificar se há danos e limpar antes de usar.
- Verificar semanalmente as rodas para uma rotação adequada, cotão ou qualquer coisa que afete o seu funcionamento. O chassi não é danificado, rachado, ou soldado em qualquer lugar. Os travões estão em bom estado de funcionamento. Se não for este o caso, os travões devem ser ajustados por um técnico de serviço.

6. INFORMAÇÕES SOBRE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

Não utilizar o andarilho como cadeira de rodas ou cadeira de transporte.

Utilizar apenas o assento para ficar quieto. Nunca se sente e empurre com os pés. Não utilizar para subir ou descer degraus, escadas rolantes ou tapetes rolantes.

Consulte sempre o seu médico ou terapeuta para determinar a utilização adequada e o ajuste da altura para um apoio máximo e uma activação correcta do travão. Certifique-se de que ambos os botões de ajuste de altura estão bem apertados

e que as pegas estão à mesma altura. Teste de estabilidade antes da utilização.

Assegurar que o andarilho está totalmente aberto, que o assento está em posição e que as dobradiças estão correctamente desdobradas.

Não expor a temperaturas extremas (muito altas ou muito baixas), humidade ou humidade, para evitar deformações das partes plásticas.

Todas as rodas devem estar em contacto com o solo quando o andarilho está a ser utilizado, para que este seja equilibrado.

6.1. PARA EVITAR QUE TOMBE:

- Não alcançar os objectos se tiver de avançar enquanto estiver sentado no andarilho. Não pendurar nada no andarilho.
- O encosto deve estar sempre no lugar e não foi concebido para suportar todo o peso do seu corpo.
- Se quiser alcançar ou apanhar um objecto, deve colocar ambos os pés firmemente no chão.

- Não adicionar peso extra ao andarilho quando sentado.
- Não utilizar o assento se estiver num declive ou em terreno irregular.
- O cesto tem uma capacidade de 5 kg e os objectos não devem sobressair do cesto.
- Para travar temporariamente o andarilho, cavar em ambas as pegas ao mesmo tempo.

7. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou

recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de serie.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Andarilho 4200XL

V2 · 08/04/2022