



4200 XL

Camminatore all'aperto

MANUALE DI ISTRUZIONI

Ref. AAL4200XLFM

Oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso del nuovo **4200 XL**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti	4
2 — Descrizione	4
3 — Caratteristiche tecniche	5
4 — Montaggio e utilizzo.....	6
5 — Manutenzione e pulizia.....	6
6 — Informazione generali.....	6
7 — Garanzia	7

1. PARTI



2. DESCRIZIONE

DEAMBULATORE IN ALLUMINIO CON SEDILE E FRENO A MANIGLIA

Il deambulatore modello 4200 XL è un deambulatore progettato con telaio in alluminio per renderlo più leggero ma anche più resistente.

Disegnato con freno a maniglia, una barra di sostegno imbottita per appoggiare comodamente la

schiena, e un porta-bastone standard.

Possiede una comoda seduta (35cm x 34cm) sotto la quale si trova un cestino in metallo



4200 XL

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure

Larghezza totale	61,5 cm
Larghezza tra le ruote posteriori	43,5 cm
Profondità aperto	67 cm
Profondità ripiegato	32 cm
Altezza totale (regolabile)	83 - 96,5 cm

Peso

Peso total	8,65 kg
Portata massima	138 kg

Materiale	Alluminio	Colore	Grigio opaco
------------------	-----------	---------------	--------------

Seduta

Larghezza	35 cm
Profondità	34 cm
Altezza dal pavimento alla seduta	54 cm
Tipologia	Pieghevole

Materiale	Imbottito
-----------	-----------

Schienale

Larghezza	45 cm
Tipologia	Fisso staccabile
Materiale	Barra imbottita


Ruote

Misure delle ruote anteriori	Ø19 cm
Misure delle ruote posteriore	Ø19 cm
Spessore ruote anteriori	3 cm
Spessore ruote posteriori	3 cm
Tipologia	Solido
Numero di ruote anteriori	2
Numero di ruote posteriore	2


Altre caratteristiche

Cestino	Griglia metallica
Misure cestino (larghezza x altezza x profondità)	44 x 15 x 24 cm
Portata massima	5 kg
Pieghevole	Sì

Tipo di freno	Freno maniglia
---------------	----------------

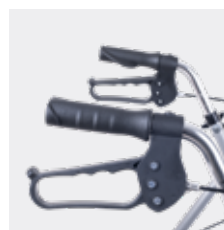

Freno maneta.

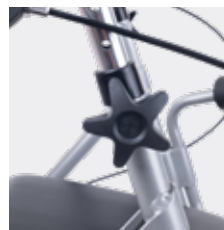

Pomo de ajuste de altura y tornillo.



Mecanismo de la rueda.



Plegado del andador 4200XL.

4. MONTAGGIO E UTILIZZO



- **Posizionare lo schienale**, spingere verso l'interno i due puntali sui laterali e inserire la barra imbottita al telaio del deambulatore. Il supporto dovrebbe fare clic se installato correttamente: si deve ascoltare il meccanismo fare un click e i perni devono fuoriuscire dai fori.
- Allentare le viti e la manopola di regolazione per posizionare le impugnature sul telaio.
- **Regolare l'altezza delle impugnature**, secondo quanto indicato dal tuo fisioterapista o professionista sanitario. Inserire la vite nel telaio in modo che la testa esagonale si inserisca nel foro a sei facce. Avvitare la manopola fino in fondo, assicurandosi che la testa della vite sia nascosta all'interno del telaio.
- **Per piegare il deambulatore**, dopo aver alzato il sedile, lasciare o rimuovere il cestino in stoffa. Al centro del deambulatore si trova un tubo molto sottile che bisogna sollevare in modo che si possa piegare, dopodiché ripiegare le pedane.

5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Eseguire una manutenzione regolare del deambulatore. Pulire il telaio con un panno umido per rimuovere lo sporco.
- Conservare il deambulatore in casa durante la notte. Non esporlo ad aria salmastra o ambienti ostili. Se esposto, verificare la presenza.
- Controllare settimanalmente le ruote, vedere se girano correttamente, se non hanno sporco o qualsiasi altra cosa che possa interferire con il suo buon funzionamento. Controllare ugualmente che il telaio non sia danneggiato, che non presenti crepe o altri problemi con le saldature. Per ultimo, assicurarsi che i freni fun-

6. INFORMAZIONI PER L'USO SICURO

Non utilizzare il deambulatore come sedia a rotelle o sedia da trasporto.

Usa il sedile solo per fare una sosta da fermo. Non sederti mai e spingere con i piedi. Non utilizzare per salire o scendere gradini, scale mobili o nastri trasportatori. Assicurarsi che entrambe le manopole di regolazione dell'altezza siano strette e che le impugnature siano alla stessa altezza. Si prega di testare la stabilità prima dell'uso.

Assicurarsi che il deambulatore e i cardini sia

completamente aperti, e il sedile nella sua corretta posizione. Non esporre il deambulatore a temperature estreme (molto alte o molto basse), umidità o acqua per evitare la deformazione delle parti in plastica.

Tutte le ruote devono essere a contatto con il terreno durante l'utilizzo del deambulatore in modo che questo sia stabile e bilanciato.

6.1. PARA EVITAR QUE VUELQUE:

- Non cercare ad afferrare oggetti se si deve avanzare mentre seduto nel deambulatore.
- Lo schienale deve sempre essere inserito ma non è stato disegnato per sopportare il peso del corpo.
- Se si vuole raggiungere o raccogliere un oggetto, si devono posare entrambi i piedi a terra.
- Non aggiungere altro peso al deambulatore quando si è seduto.
- Non utilizzare il seggiolino se ci si trova su un pendio o su un terreno irregolare.
- Il cestino ha una capacità di 5 kg e gli oggetti non devono sporgere da esso.

7. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

Simboli grafici.



Conformità Europea.



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto di produzione



Codice prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico

Manuale d'istruzione

Deambulatore 4200 XL

V5 · 14/06/2023